



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. – Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy  
 Italia: tel. 199 400 401 – fax. 199 400 403  
 Export: tel. +39 02 953854209/221/225 – fax. +39 02 95380056  
[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) – [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

## STECCOBENDE IN NEOPRENE

### Manuale utente



**ATTENZIONE:** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

**REF**

04SN0040 (Gima code 34680) – 04SN0020 (Gima code 34681) – 04SN0010 (Gima code 34682) –  
 04SN0050 (Gima code 34683) – 04SN0030 (Gima code 34684) – 04KSBRO5 (Gima code 34685)



Megapharma Ospedaliera s.r.l.  
 Via Asolana, 26/b · I-31017 Crespano del Grappa (TV)  
 Tel. +39 0423 538746 · Fax. +39 0423 538748



## Composizione

Neoprene - fissaggi in velcro acrilico.  
I materiali costituenti il dispositivo sono privi di lattice naturale.

## Indicazioni e destinazione d'uso

Supporto, protezione ed immobilità dell'arto o l'area a cui viene applicato. In caso di utilizzo prolungato o lunga degenza è consigliato rimuovere o allentare il dispositivo per brevi periodi al fine di aerare la parte interessata.

## Istruzioni d'uso

Applicare il dispositivo e fissarlo tramite il velcro, verificare che l'applicazione sia stata eseguita correttamente (l'estremità con velcro di colore diverso va verso l'alto), l'anima in metallo può essere piegata o rimossa a seconda dell'esigenza.  
Il dispositivo non deve essere utilizzato a contatto diretto con la cute lesa.

### Attenzione

Prestare la massima cautela durante l'applicazione.



è consigliata applicazione da parte di personale medico specializzato, o comunque su indicazioni di personale medico.  
Prima dell'applicazione, informare il medico che ha prescritto il dispositivo circa eventuali disturbi o problemi di salute.

In caso si dovessero riscontrare reazioni allergiche o di altro tipo che si presume possano derivare dall'utilizzo del prodotto, consultare un medico.

Dispositivo non sterile.

## Conservazione e pulizia

Conservare in luogo fresco, asciutto e pulito, lontano da luce solare diretta e fonti di calore.  
Dispositivo riutilizzabile, lavare a temperatura non superiore a 30°C.

Numero di lotto e data di produzione riportati sull'etichetta. Dispositivo Medico Classe 1

## CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto. Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA. Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura.

La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia. La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio. GIMA non risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc. La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulti asportato, cancellato o alterato. I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.