



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SUPPORTO MOBILE PER 23454,23456

MOBILE STAND FOR 23454,23456

MANUALE D'USO – USER MANUAL


REF **GIMA 23458**

Importato da/Imported by
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



Fabbricante / Manufacturer
Qualmedi Technology Co.
Ltd.A302 Room, No.23, HangBu Road,
Feixi County Economic Development Zone, Hefei
City, Anhui Province, China.
Made in China




ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE

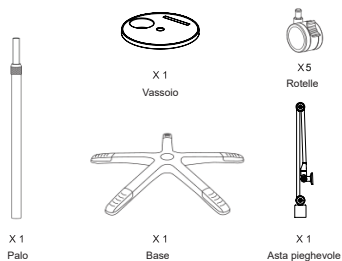

Cassetta delle parti di ricambio

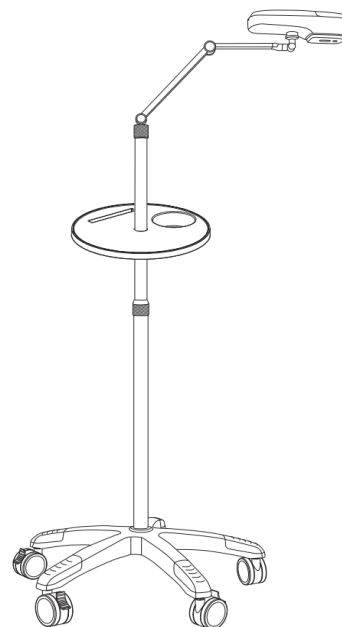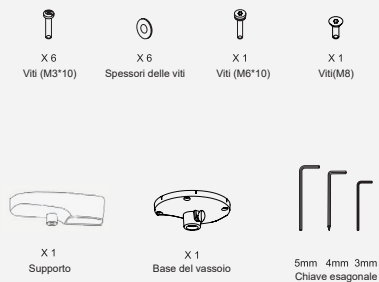


Tipo A

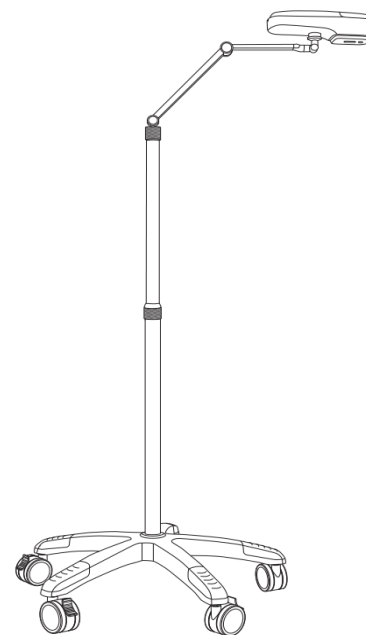


Tipo B



Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni; tenerle lontane dai bambini.

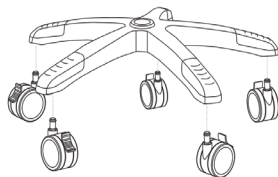PASSAGGIO 1: INSTALLARE LA BASE DEL SUPPORTO / IL PALO


Inserire con forza cinque rotelle nel foro della base per renderla stabile.

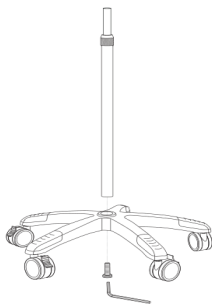



Inserire il palo nella base e fissare la vite (M1) con la chiave dalla parte inferiore della base.

Allentare la manopola, estrarre il palo interno ad un'altezza adeguata e quindi stringere la manopola, assicurandosi che sia ben serrata.


PASSAGGIO 2: MONTARE IL VASSOIO

Si tratta di una fase opzionale in base alle esigenze del cliente. Il vassoio può contenere gli strumenti dell'infermiere per le iniezioni.


Collegare la base del vassoio e il vassoio con la vite (M3*10) e lo spessore della vite.

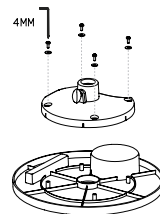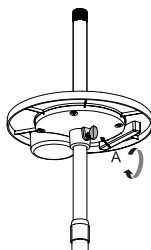

Montare il vassoio partendo dall'alto del palo, regolarlo nella posizione appropriata e stringere la manopola A.

PASSAGGIO 3: INSTALLAZIONE DEL TUBO/SUPPORTO


Mettere la manopola sul palo, quindi stringerla completamente.

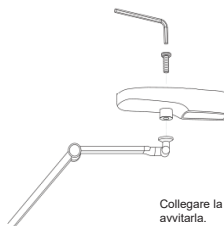

Collegare la traversa del supporto all'adattatore e avvitare.

FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Altezza: 667-1630mm

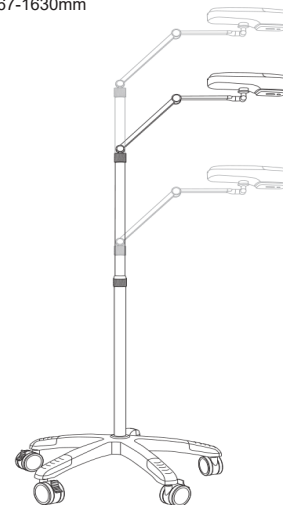
REGOLAZIONE DELLA TENSIONE

Regolare la tensione dell'attrezzatura tramite la chiave.


CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.