

PINZAS DE ASTILLA

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

Dispositivos

Pinzas para garrapatas (no estériles, de acero inoxidable).

Descripción

El producto está fabricado con acero inoxidable. El producto debe utilizarse únicamente para el fin previsto mencionado en la ficha técnica.

Advertencias

Nunca:

- Utilice incorrectamente los instrumentos ni fuerce en exceso las articulaciones ni los bastidores.
- El uso de abrasivos en los instrumentos estropeará el acabado de la superficie. Esto puede causar posteriormente decoloración, oxidación o picaduras.
- Maneje los instrumentos por las puntas. Estas solo deben ser limpiadas por personal capacitado, que se asegurará de que las puntas de trabajo delicadas estén adecuadamente protegidas durante el almacenamiento o la esterilización.
- Embale los instrumentos con otros más pesados. Acuérdesse siempre de poner los instrumentos pesados en el fondo y los ligeros en la parte superior.
- Utilice aceites de uso general para los instrumentos; solo deben utilizarse lubricantes solubles en agua.
- Deje los instrumentos en remojo más tiempo del necesario en las soluciones químicas de esterilización. Una vez esterilizados, deben lavarse a fondo en agua tibia para eliminar todos los restos de los productos químicos y evitar que se decoloren o queden marcados.
- Almacene los instrumentos húmedos. Antes deben secarse a fondo.

Instrucciones

Siempre:

- Compruebe todas las instrucciones de uso y esterilización de los instrumentos nuevos. A menos que se indique lo contrario, deben ser inspeccionados, limpiados, enjuagados y lubricados antes de ser utilizados.
- Lubrique después de la limpieza con un lubricante para instrumentos soluble en agua patentado.
- Siga el procedimiento de limpieza aprobado por el hospital.
- No utilice productos de limpieza corrosivos. Recomendamos el uso de soluciones de limpieza y enjuagues con pH 7,0.
- No utilice limpiadores abrasivos ni cepillos de cerdas duras.
- Utilice solo agua destilada para el enjuague. El agua que contiene cloruro puede dañar o incluso destruir los instrumentos.
- No deje los instrumentos en las soluciones de limpieza o desinfección durante mucho tiempo (durante la noche o el fin de semana), ya que de hacerlo puede destruirlos.
- Asegúrese de que los instrumentos se utilicen únicamente para el fin para el que fueron diseñados.
- Maneje todos los instrumentos con cuidado. No los fuerce en exceso ni los deje caer, ni los utilice de forma incorrecta.
- Compruebe si los instrumentos se han dañado con el uso.
- Asegúrese de que todos los instrumentos estén bien secos antes de guardarlos.
- Embale los instrumentos con cuidado, colocando los más pesados sobre un trozo de tela o toalla y en el fondo.
- Compruebe la dureza del agua utilizada en el autoclave. El agua demasiado dura dejará un depósito en los instrumentos.
- Si se utiliza un ablandador de agua, asegúrese de que está en el nivel recomendado por el fabricante. Un exceso de ablandador puede causar decoloración o marcas.

Limpieza y desinfección

Antes de la limpieza preliminar, elimine toda la suciedad (restos de material biológico como huesos, tejidos o polvo, etc.) utilizando toallitas higiénicas desechables, toallas de papel o cepillos con fibras plásticas no naturales (por ejemplo, níquel).

Esterilización

Los instrumentos deben ser esterilizados por el método de esterilización mediante calor húmedo, aplicando una temperatura de 274°F (134°C) durante 3 minutos máximo 50 ciclos.

Eliminación

No se requiere ninguna descomposición ni eliminación especial para los instrumentos quirúrgicos, ya que no contienen ningún material tóxico o peligroso; el material de acero inoxidable se puede reciclar en unidades ordinarias de fabricación de acero.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

 REF	IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto		IT Fabbricante GB Manufacturer FR Fabricant ES Fabricante		IT Non sterile GB Non-sterile FR Pas stérile ES No estéril		IT Dispositivo medico GB Medical Device FR Dispositif médical ES Producto sanitario
	IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso		IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar		IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco		IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745				IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote		IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación
	IT - Identificatore univoco del dispositivo GB - Unique device identifier FR - Identifiant unique de l'appareil ES - Identificador de dispositivo único						

REF 24390