

ISTRUZIONI PER L'USO / INDICATIONS FOR USE

Nastro con indicatore di viraggio esente da piombo per sterilizzazione a vapore
Indicatori di Tipo 1 e1 **STEAM** norma ISO 11140-1:2014



DESCRIZIONE / INDICAZIONI PER L'USO

Ref. 6110

Nastro monoadesivo con indicatore di processo esente da piombo, concepito per la chiusura di imballi da utilizzare nei processi di sterilizzazione a vapore. Resistente alle alte temperature e all'umidità, è dotato di elevata adesione sui vari tipi di teli, metalli, plastiche, no woven e carte.

Il prodotto non è in alcun modo destinato alla convalida del processo di sterilizzazione.

Viraggio in base alle condizioni minime di processo previste dalla norma ISO 11140-1:2014 per le parti applicabili al Tipo 1 e1:

Colore iniziale	verde chiaro	
Cicli a vapore	121°C - 10 minuti	da verde chiaro a verde scuro
	134°C - 2 minuti	da verde chiaro a verde medio / scuro

/

Nelle condizioni di uso più diffuse in autoclave il viraggio è tipicamente verde scuro

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE / STORAGE CONDITIONS

Prima dell'utilizzo: il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente (15-25°C) al riparo da luce

solare diretta, fonti di calore o eccessiva umidità (umidità relativa <65%),
protetto nell'imballo originale

Dopo l'utilizzo: il prodotto è stabile dopo la sterilizzazione e l'indicatore non varierà visibilmente entro i 6 mesi successivi se conservato nelle condizioni descritte sopra

DATA DI SCADENZA /

Quando conservati come indicato, i nastri hanno una scadenza di 30 mesi dalla data di produzione

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' /

Gli indicatori sono conformi alla norma ISO 11140-1:2014 per le parti applicabili al Tipo 1 e1



Produttore / Manufacturer:
Sicad S.p.A.
Via Caduti della Liberazione, 57
21040 Uboldo (VA)