



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TAPPETINO IN SILICONE SILICONE MAT

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Destinazione d'uso/funzione

- il prodotto deve essere utilizzato per i processi di sterilizzazione in autoclave.
 - il tappetino in silicone consente di tenere fermi gli strumenti nel vassoio di sterilizzazione in modo ben saldo ma delicatamente.
- Può essere utilizzato intero o tagliato per adattarlo al vassoio. I fori migliorano la circolazione dell'aria, aiutando il processo di asciugatura.

Specifica componente

Il tappetino è fabbricato in silicone

AVVERTENZE

- Non utilizzare polveri abrasive o spazzole di metallo, in quanto potrebbero danneggiare la superficie
- Non superare 137°C (279 °F)
- Non superare 8 minuti

LIMITAZIONI AL RICONDIZIONAMENTO

Il ricondizionamento ripetuto ha un effetto minimo sulla vita utile del dispositivo. La fine della vita utile è normalmente determinata dall'usura e dal danneggiamento dovuti all'uso previsto. Ispezionare sempre il dispositivo tra un trattamento e il successivo, per verificare il corretto funzionamento.

ISTRUZIONI PER IL RICONDIZIONAMENTO

Preparazione per l'uso:

- Ispezionare il tappetino di silicone prima del trattamento
- Pulire il tappetino prima di iniziare a usarlo, seguendo le istruzioni per la pulizia
- Scartare i tappetini danneggiati
- Sciacquare con acqua tiepida per rimuovere eventuali residui

Uso del prodotto:

- 1) Tenendo le dita rivolte verso l'alto, collocare sul vassoio

- 2) Collocare delicatamente gli strumenti, in un unico strato e adeguatamente distanziati per evitare il contatto tra loro
- 3) Posizionare il coperchio sul vassoio per fissare gli strumenti

Lavaggio manuale:

- 1) Lavare i tappetini con detergenti e disinfettanti aventi un pH compreso tra 2 e 13, detergenti enzimatici o biocidi compatibili con il polipropilene
- 2) Risciacquare con acqua critica conformemente agli standard AAMI

Pulizia automatica:

- 1) Collocare il tappetino nella lavastrumenti automatica al di fuori del vassoio
- 2) Eseguire il "Ciclo strumenti" della lavastrumenti

Disinfezione:

I tappetini possono essere disinfettati con il ciclo di termidisinfezione della lavastrumenti a termodisinfezione

Asciugatura:

Asciugare con un panno privo di lanugine

Manutenzione, ispezione e collaudo:

- Ispezionare visivamente il prodotto per identificare eventuali danneggiamenti
- Scartare i tappetini danneggiati

Sterilizzazione:

Materiale compatibile con sterilizzazione a vapore e con ossido di etilene

Ciclo raccomandato per la sterilizzazione a vapore:

- 132°C (270°F) per 4 minuti
- 135 °C (275°F) per 3 minuti

Conservazione:

Conservare in ambiente pulito e asciutto, su un ripiano e nella confezione originale.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

	Conservare in luogo fresco ed asciutto		Numero di lotto
	Codice prodotto		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Fabbricante
	Conservare al riparo dalla luce solare		Leggere le istruzioni per l'uso
	Dispositivo medico		Non sterile
	Data di fabbricazione		Identificatore univoco del dispositivo

REF 37320 - 37321 - 37323



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan

