

**ITALIANO**

**19/04/1/S CINTURA PETTORINA CON CHIUSURA DI SICUREZZA**

**20/04/1/S CINTURA ADDOMINALE CON CHIUSURA DI SICUREZZA**

**21/04/1/S CINTURA PELVICA CON CHIUSURA DI SICUREZZA**

**AVVERTENZE**

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Erregi sas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo. In caso di incidente grave verificatosi in relazione all'utilizzo del dispositivo, si prega di segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito

**DESCRIZIONE**

Ref. 19/04/1/S, 20/04/1/S, 21/04/1/S: Cinture posturali realizzate in tessuto poliammide idrorepellente ignifugato in classe 1. con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo classe 1 IM e nastri in polipropilene con chiusura di sicurezza.

**INDICAZIONI**

Cinture posturali per il mantenimento della postura dei pazienti su carrozzine, comode e per la prevenzione delle cadute.

**PRECAUZIONI D'USO**

Il dispositivo deve essere posizionato con una tensione adeguata per consentire il corretto funzionamento. Nella regolazione dei nastri, deve passare una mano piana tra il paziente e il dispositivo. Si raccomanda di monitorare con regolarità il paziente e la zona interessata dalla cintura.

**Utilizzare il dispositivo sempre indossando un indumento a protezione della persona.**

**CONTROINDICAZIONI**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

**COMPOSIZIONE**

Tessuto esterno: 92% poliammide 8% poliuretano, ignifugato in classe 1. Imbottitura: poliuretano espanso ignifugo classe 1 IM

**MODALITÀ DI LAVAGGIO**



La Ditta produttrice non risponde di eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche dell'ausilio in caso di mancata osservanza delle modalità di lavaggio.

**DISINFEZIONE**

Utilizzare prodotti con presidio medico chirurgico.

**CONSERVAZIONE**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore, umidità.

**SMALTIMENTO**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

<b>REF</b>	Codice prodotto	<b>MD</b>	Dispositivo medico
<b>LOT</b>	Numero di lotto		Fabbricante
<b>CE</b>	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Leggere le istruzioni per l'uso
	Conservare al riparo dalla luce solare		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Data di fabbricazione		Non prodotto con lattice di gomma naturale
<b>UDI</b>	Identificativo unico		

NON rimuovere l'etichetta dal Dispositivo Medico, in quanto consente la rintracciabilità del prodotto fornito (Fabbricante, UDI, numero di lotto, codice prodotto).

**CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA**

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

---

**REF** 21/04/1/S (GIMA 43175)  
20/04/1/S (GIMA 43176)  
19/04/1/S (GIMA 43177)

 **Erregi S.a.s.**  
Via Adua 40  
21040 Vedano Olona (Va)  
commerciale@erregiausilimedici.it  
www.erregiausilimedici.it  
MADE IN ITALY

