



bro onde o utilizador e / ou o paciente está estabelecido.

#### DESCRIÇÃO

Ref.º 19/04/1/S, 20/04/1/S, 21/04/1/S: Cintas posturais feitas em tecido de poliamida, hidrorrepelente, ignífugo de classe 1, com acolchoamento de poliuretano, expandido, ignífugo, classe 1 IM e fitas de polipropileno com fecho de segurança.

#### INDICAÇÕES

Cintas posturais para a manutenção da postura dos pacientes em cadeiras de rodas, cómodas e para a prevenção das quedas.

#### CUIDADOS DE UTILIZAÇÃO

O dispositivo deve ser posicionado com uma tensão adequada para permitir o funcionamento correto. Ao ajustar as fitas, deve passar uma mão espalmada entre o paciente e o dispositivo. Recomenda-se monitorizar regularmente o paciente e a área abrangida pela cinta.

**Utilize sempre o dispositivo vestindo roupas de proteção pessoal.**

#### CONTRAINDICAÇÕES

Não foram detetadas contra-indicações exceto em casos de sensibilidade verificada aos materiais constituintes.

#### COMPOSIÇÃO

Tecido externo: 92% poliamida 8% poliuretano, ignífugo de classe 1

Acolchoamento: poliuretano, expandido, ignífugo, classe 1 IM.

#### MODO DE LAVAGEM



A empresa produtora não se responsabiliza por quaisquer alterações das características técnicas do apoio em caso de inobservância dos métodos de lavagem.

#### DESINFEÇÃO

Utilize produtos com supervisão médico-cirúrgica.

#### CONSERVAÇÃO

Conserve ao abrigo de fontes de luz, calor e humidade.

#### ELIMINAÇÃO

Elimine o dispositivo de acordo com os regulamentos em vigor relativos à proteção do ambiente e à recolha seletiva de resíduos.

<b>REF</b>	Código produto	<b>MD</b>	Dispositivo médico
<b>LOT</b>	Número de lote		Fabricante
<b>CE</b>	Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745		Consulte as instruções de uso
	Guardar ao abrigo da luz solar		Armazenar em local fresco e seco
	Data de fabrico		Sem látex de borracha natural
<b>UDI</b>	Identificador exclusivo		

NÃO remova a etiqueta do Dispositivo Médico, pois permite a rastreabilidade do produto fornecido (Fabricante, IUD, número do lote, código do produto).

#### CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

#### PORTUGUESE

#### 19/04/1/S CINTURA PETTORINA COM CINTA PEITILHO COM FECHO DE SEGURANÇA

#### 20/04/1/S CINTURA ADDOMINALE COM CINTA ABDOMINAL COM FECHO DE SEGURANÇA

#### 21/04/1/S CINTA PÉLVICA COM FECHO DE SEGURANÇA

#### AVISOS

Antes de efetuar qualquer operação, inspecione visualmente a integridade do dispositivo. Caso o produto apresente anomalias, contacte imediatamente o ponto de venda onde foi efetuada a compra.

A Erregi s.a.s. não assume qualquer responsabilidade pela utilização indevida do dispositivo. No caso de se verificar um acidente grave relacionado com a utilização do dispositivo, solicita-se que informe a ocorrência ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Mem-

**REF** 21/04/1/S (GIMA 43175)  
20/04/1/S (GIMA 43176)  
19/04/1/S (GIMA 43177)

**Erregi S.a.s.**  
Via Adua 40  
21040 Vedano Olona (Va)  
commerciale@erregiasuilmedici.it  
www.erregiasuilmedici.it  
MADE IN ITALY

