



# MONTAGGIO DELLA MASCHERA

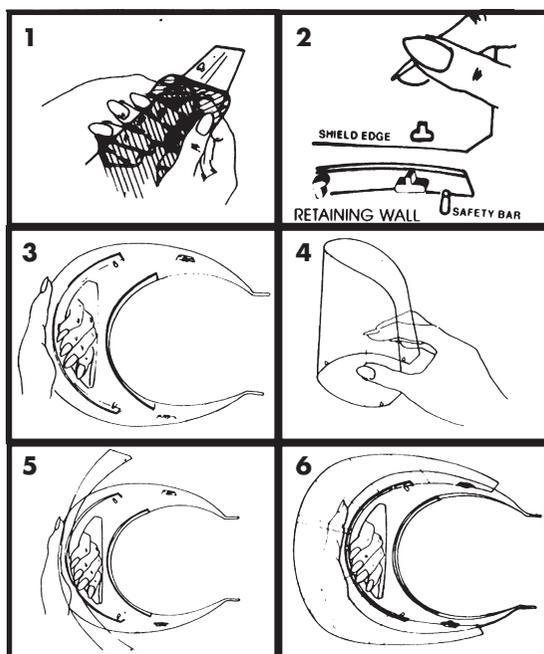

1. Iniziando da un angolo, rimuovere la pellicola protettiva da entrambi i lati dello schermo.
2. Cercate i simboli chiave sia sulla visiera che sullo schermo.  
 simbolo "P"  
 simbolo "OP"
3. Prendete la visiera con la mano sinistra passando le dita attraverso l'apertura (vedi figura) e premete con un dito centralmente sul simbolo "P".
4. Prendete lo schermo con la mano destra come indicato in figura.
5. Prima, fissate lo schermo alla visiera: premete lo schermo contro la visiera centralmente sul simbolo "P" e col dito della stessa mano la visiera verso lo schermo centralmente sul simbolo "P" ma in senso contrario.
6. Mentre con l'indice della mano destra mantenete la pressione centralmente sul simbolo "P", continuate a fissare lo schermo alla visiera, sempre con la mano destra, prima spingendo le estremità dello schermo verso l'alto, poi premendo lo schermo centralmente e lateralmente verso i simboli "P": i fori sullo schermo si allineeranno automaticamente ai simboli "OP", ai quali potranno a questo punto essere fissati.

1. Questo è il mini schermo, la cui funzione è di impedire a spruzzi accidentali di penetrare dalle aperture di ventilazione, garantendo comunque sempre la ventilazione.  
 Agisce quale "barriera sovrapposta".  
**PROCEDETE AL MONTAGGIO DEL MINI SCHERMO SOLO DOPO AVER MONTATO LO SCHERMO SULLA VISIERA.**
2. Il mini schermo viene montato inserendolo nell'apertura posta sulla visiera, agendo dall'alto verso il basso, spingendolo finché le tacche laterali non si incastrino sul bordo.
3. La figura mostra come appariranno a questo punto gli schermi visti di profilo.
4. Per completare il montaggio del mini schermo è necessario capovolgere il tutto.
5. Tirate il mini schermo con le dita mentre col pollice premete la base del mini schermo sino ad incastrarlo con un "click" sotto al simbolo "P".
6. Indossate come fosse un paio di occhiali, calzerà solo un po' più in alto sul capo. Assicuratevi che lo schermo sia parallelo al vostro viso e che ci sia una distanza di circa 2-3 dita tra di essa ed il vostro mento.

# MONTAGGIO DELLA MINI-MASCHERA

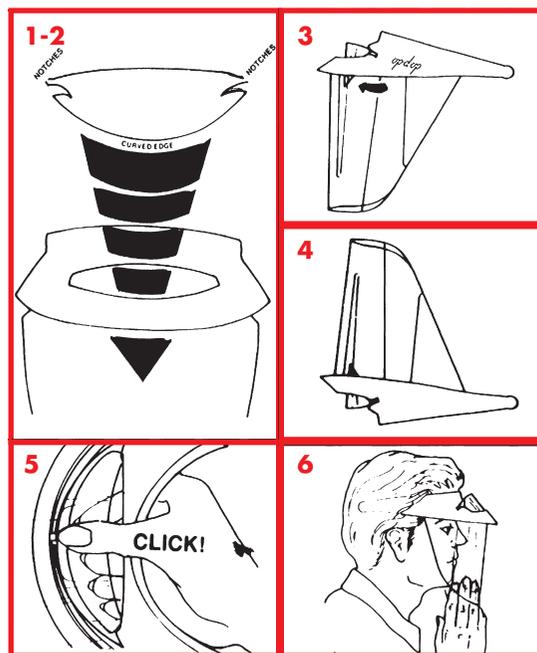

## AVVERTENZE PER L'USO

Lo schermo non è stato appositamente trattato con materiali antiappannanti in quanto questi ne rovinerebbero la qualità ottica e potrebbero causare disturbi agli occhi.

È quindi necessario seguire scrupolosamente le indicazioni al punto 6, in modo da evitare l'appannamento dello schermo e garantire allo stesso tempo la giusta posizione.

## LA MASCHERA È TROPPO LUNGA?

In caso la maschera arrivi a toccarvi le spalle o il petto, la potete accorciare tagliandola con una forbice robusta e molto tagliente.

## PULIZIA DELLA MASCHERA

In caso la maschera fosse molto sporca, Vi consigliamo di gettarla e montarne una nuova. La maschera è comunque riutilizzabile e, se trattata correttamente, dura molto a lungo.

È necessario lavarla in acqua corrente con un detergente germicida o disinfettante, purché non abrasivo, avendo cura di sciacquarla bene per evitare che residui di detergente rovinino la maschera anzitempo. Asciugare con un panno di tessuto morbido.

**NON SFREGARE LE MASCHERE CON ASCIUGAMANI DI CARTA** per non rigarle.

Le maschere non sono autoclavabili. Secondo le indicazioni del produttore, le maschere possono essere immerse in liquidi sterilizzabili a freddo.

## ATTENZIONE:

Questo prodotto non previene la contrazione di malattie o infezioni, ma riduce puramente il rischio di spruzzi di liquidi organici negli occhi, nel naso o nella bocca dell'utilizzatore. Questo prodotto deve essere adeguatamente disinfettato o gettato dopo l'uso.

## ATTENZIONE:

Questo prodotto è un dispositivo di esclusivo impiego clinico. Non usarlo fuori dall'ambulatorio per scopi diversi a quello cui è dedicato.



## LA VISIERA

Per operare con tranquillità

## THE VISOR SHIELD

To move in close with confidence



Distribuito da:



GIMA S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia  
Tel. 199 400 401 - Fax: 199 400 403

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)