



CABLES DE PACIENTE DE ECG: INSTRUCCIONES DE USO

¡ADVERTENCIA! Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no conecte el cable a ninguna fuente de alimentación.

Los cables de paciente GIMA son compatibles con los instrumentos indicados. Se debe seguir el procedimiento de conexión recomendado. Para desconectar el cable, tire suavemente el conector, sin ejercer ningún esfuerzo directamente sobre el cable. Antes de usar un cable, verifique cuidadosamente que el cable esté intacto y sea compatible con el dispositivo en cuestión.

Limpieza: trate los cables del paciente y las terminaciones GIMA con una solución de agua tibia y detergente suave. Limpiar con un paño suave. ¡Nunca sumerja los cables de paciente y las terminaciones GIMA! Después de la limpieza, limpie los cables del paciente y las terminaciones GIMA con un paño limpio. Para secar el cable, manténgalo alejado del divisor de rama moviendo la tela hacia el conector, lo mismo para las terminaciones. Evite el contacto con detergentes agresivos y con solventes aromáticos, cloratos, cetonas, éter o ésteres. Las soluciones agresivas (como las soluciones alcohólicas o fuertemente alcalinas, los disolventes de resistencia media, las soluciones de limpieza) dañan los cables del paciente y las terminaciones GIMA.

Desinfección: los cables del paciente y las terminaciones GIMA pueden tratarse con desinfectantes que contengan etanol (70% -80%), propanol (70% -80%), aldehídos (2% -4%), dialdehídos activados (Cidex) o hipoclorito de Sodio (lejía en solución acuosa 1:10). No use solventes orgánicos. Después de lavar, enjuague los cables con agua y séquelos con un paño limpio.

Esterilización: los cables del paciente y las terminaciones GIMA se pueden esterilizar con óxido de etileno (EtO). Después de la esterilización, ventile adecuadamente el cable antes de usarlo. Los cables y terminaciones para pacientes GIMA NO PUEDEN esterilizarse en autoclave.

Advertencia

- disponga los cables y las terminaciones para que el paciente u operadores no queden atrapados.
 - no esponga el cable o las terminaciones a radiación ultravioleta demasiado intensa.
 - verifique la integridad del cable y las terminaciones antes de su uso.
 - Limpie y desinfecte el cable y las terminaciones antes de aplicarlos a un nuevo paciente.
 - no esterilice en autoclave los cables de paciente y las terminaciones GIMA.
 - los productos GIMA solo pueden ser utilizados o manejados por personal calificado.
- Debe informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentre de cualquier incidente grave relacionado con el producto sanitario que haya suministrado.