



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

مسابجه لاساي قم

- يف قصص تخبرنا قتل سلاو قمنا صالدا كملنا الى اب اندوز يذللنا يبطلنا زاملنا ب قلعتي ام يف عقو ري طخ شدام يا نم اروف غالب اليا بجي
اهي عقي يتلنا وضعنا قلدولنا

REF

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante/Hersteller/Κατασκευαστής/عن اصحاب:
Samson Innovation Corporation Ltd. - Room F, 8th Floor, Hop Hing Industrila Building, 704 Castle Peak Road,
Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong - Made in China




Fita para a avaliação da distribuição do tecido adiposo. Corpo em ABS com cabo ergonómico. A fita é feita com um material plástico especial indeformável, com escala dupla de avaliação colorida para as indicações de risco dividido, homem e mulher.

Utilizável em todas as circunferências do corpo, graças ao seu botão retrátil e ao batente flexível que permite uma leitura fácil dos dados.

A flexibilidade particular de seu braço em material termoplástico atóxico permite que seja utilizado especificamente no âmbito pediátrico

Posição da fita, para uma medição correta da circunferência abdominal

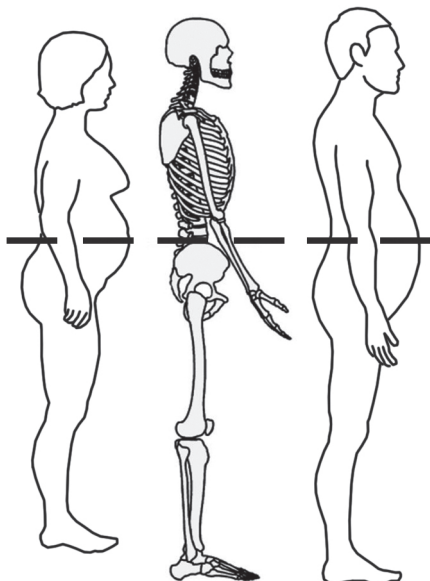

Indivíduo na posição ereta.

Localize a margem superior da anca e o ápice da crista ilíaca direita.

Posicione a fita horizontal ao redor do abdómen ao nível da margem da crista ilíaca.

Antes de fazer a medição, certifique-se de que a fita esteja justa, mas não comprima a pele e que esteja paralela ao solo.

Faça a medição no final de uma expiração normal.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.