



TITANOX s.r.l. - via Canove 2/A - Loc. Canove dé  
Biazi -26038 Torre dé Picenardi (CR) - Italy -  
[www.titanox.it](http://www.titanox.it) [info@titanox.it](mailto:info@titanox.it) MADE IN ITALY

## Manuale d'uso "T5000"

Struttura in tubo d'acciaio verniciato con polvere epossidica. Schienale regolabile tramite pompa a gas. Poggia gambe regolabile manualmente. Poggia piedi in metallo estraibile manualmente. Braccioli con snodi, regolabili manualmente in altezza. Imbottitura in schiuma poliuretanică ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM, copertura in tessuto spalmato, lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Maniglia di spinta posteriore. Ingombro materasso: 170x55 cm. Altezza da suolo a seduta: 56 cm. Quattro ruote diam 100 mm, di cui 2 direzionabili e 2 con freno. Fornito con supporto porta cartelle e vassoio porta coperte completo di cinghie per fissaggio bombola ossigeno.

Portata: 150Kg

Tutti i prodotti sono realizzati eliminando fonti di eventuale rischio per l'utente in caso di urto involontario, come bordi taglienti o spigoli vivi

Il prodotto è destinato all'uso esclusivo da parte di personale medico specializzato istruito su utilizzo e cura degli strumenti. Non è consentito l'utilizzo per scopi estranei alla sua destinazione. L'uso scorretto o la scarsa o non appropriata manutenzione possono far deteriorare rapidamente gli strumenti.

- Controllare il corretto serraggio di tutte le parti mobili prima e durante l'uso;
- Per la pulizia non utilizzare sostanze abrasive, acidi, alcool, detersivi a base di cloro, disinfettanti ed acetone: il fabbricante non sarà responsabile per il danneggiamento causato dall'utilizzo di materiali che possano deteriorare la superficie del prodotto o da corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia.

### CONDIZIONI DI GARANZIA TITANOX

Si applica la garanzia Titanox di 12 mesi dalla data di fatturazione.

**È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.**



TITANOX s.r.l. - via Canove 2/A - Loc. Canove dé  
Biazi -26038 Torre dé Picenardi (CR) - Italy -  
[www.titanox.it](http://www.titanox.it) [info@titanox.it](mailto:info@titanox.it) MADE IN ITALY

**REF** T5000





TITANOX s.r.l. - via Canove 2/A - Loc. Canove dé  
Biazi -26038 Torre dé Picenardi (CR) - Italy -  
[www.titanox.it](http://www.titanox.it) [info@titanox.it](mailto:info@titanox.it) MADE IN ITALY

	<b>IT</b> Fabbricante <b>ENG</b> Manufacturer <b>FR</b> Fabricant
	<b>IT</b> Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso <b>ENG</b> Caution: read instructions (warnings) carefully <b>FR</b> Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)
	<b>IT</b> Leggere le istruzioni per l'uso <b>ENG</b> Consult instructions for use <b>FR</b> Consulter les instructions d'utilisation
	<b>IT</b> Conservare al riparo dalla luce solare <b>ENG</b> Keep away from sunlight <b>FR</b> Á conserver à l'abri de la lumière du soleil
	<b>IT</b> Conservare in luogo fresco ed asciutto <b>ENG</b> Keep in a cool, dry place <b>FR</b> Á conserver dans un endroit frais et sec
	<b>IT</b> Codice prodotto <b>ENG</b> Product code <b>FR</b> Code produit
	<b>IT</b> Numero di lotto <b>ENG</b> Lot number <b>FR</b> Numéro de lot
	<b>IT</b> Dispositivo medico <b>ENG</b> Medical Device <b>FR</b> Dispositif médical
	<b>IT</b> Il dispositivo è conforme ai requisiti del regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745 ed è classificato come dispositivo medico di classe I <b>ENG</b> The product complies with the requirements of the regulation on medical devices (EU) 2017/745 and is classified as a Class I medical device <b>FR</b> Le produit est conforme aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 et est classé comme dispositif médical de classe I

# T5000

**MANIGLIA:** CONTROLLARE SEMPRE CHE LA MANIGLIA NON SIA ALLENTATA, SE COSI' FOSSE STRINGERLA

**HANDLE:** ALWAYS CHECK THE HANDLE NOT BE LOOSE, IN CASE IT IS LOOSEN, TIGHTEN IT

**POIGNEE:** VERIFIEZ TOUJOURS QUE LA POIGNEE NE SOIT PAS DESSERREE, LE CAS ECHEANT IL FAUT LA SERRER

SPINGERE LA LEVA VERSO L'ALTO PER ABBASSARE LO SCHIENALE  
(N.B. AIUTARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCHIENALE, SPINGENDO LEGGERMENTE CON UNA MANO SE LA PERSONA E' CORICATA SULLA POLTRONA STESSA)

PUSH THE LEVER UPWARD, TO LOWER THE BACKREST  
(N.B. HELP THE POSITIONNING OF THE BACKREST, BY PUSHING SOFTLY WITH YOUR HAND IF A PERSON IS LYING ON THE COUCH)

POUSSER LE LEVIER VERS LE HAUT POUR ABAISSER LE DOSSIER  
(N.B. AIDER LE POSITIONNEMENT DU DOSSIER, EN POUSSANT DOUCEMENT AVEC VOTRE MAIN SI UNE PERSONNE EST COUCHE SUR LE FAUTEUIL)

SPINGERE LA LEVA VERSO SINISTRA PER SOLLEVARE LO SCHIENALE  
(N.B. AIUTARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCHIENALE, SPINGENDO LEGGERMENTE CON UNA MANO SE UNA PERSONA E' CORICATA SULLA POLTRONA STESSA)

PUSH THE LEVER TO THE LEFT TO LIFT THE BACKREST  
(N.B. HELP THE POSITIONNING OF THE BACKREST, BY PUSHING SOFTLY WITH YOUR HAND IF A PERSON IS LYING ON THE COUCH)

POUSSER LE LEVIER VERS LA GAUCHE POUR SOULEVER LE DOSSIER  
(N.B. AIDER LE POSITIONNEMENT DU DOSSIER, EN POUSSANT DOUCEMENT AVEC VOTRE MAIN SI UNE PERSONNE EST COUCHE SUR LE FAUTEUIL)

