



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LETTINI ELETTRICI PER TRATTAMENTI ESTETICI **ELECTRIC BEAUTY BEDS** **FAUTEUILS ÉLECTRIQUES POUR SOINS ESTHÉTIQUES** **CAMILLAS DE BELLEZA ELÉCTRICAS**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante:
SILVERFOX CORPORATION LIMITED
No. 18, 1st TongLe Road, TangXia Town, Pengjiang District,
JiangMen City, GuangDong Province, China
amy.liang@silverfox.cn
Made in China

REF GIMA 28025 - 28046

REF 2246A - 2246

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



1 ACERCA DE ESTE MANUAL

Este manual debe utilizarse exclusivamente como referencia para el funcionamiento de este modelo específico. Si el manual se utiliza para otros fines, SILVERFOX no asumirá ninguna consecuencia ni responsabilidad al respecto.


Toda la información contenida en este manual está protegida por derechos de autor, y ninguna de sus partes puede ser copiada o traducida, sin la autorización por escrito de nuestra empresa SILVERFOX.

2 ADVERTENCIAS

- Debe cortarse el suministro eléctrico cuando se cambien componentes eléctricos o se realice el mantenimiento y la limpieza de las máquinas.
- El enchufe debe conectarse a una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra, para evitar el riesgo de incendio y descarga eléctrica.
- No se ponga de pie sobre este equipo.
- No permita que los niños jueguen con el equipo ni lo coloque en un lugar donde los niños puedan tocarlo. Por favor, ajuste el respaldo a la posición más alta cuando deje de usar el equipo.
- No coloque el equipo en lugares húmedos, como el cuarto de baño, para evitar descargas eléctricas u otros fallos; mantenga también los mandos alejados del agua.
- Por favor, no coloque ni haga funcionar el equipo en lugares donde se estén realizando tareas de pintura/revestimiento o suministro de oxígeno.
- A menos que sean supervisadas o instruidas por personal que pueda ser responsable de su seguridad personal, las personas que tengan obstáculos físicos, trastornos táctiles, trastornos mentales, falta de experiencia, sentido común o niños, no están autorizadas a utilizar el equipo.
- En caso de peligro, póngase en contacto con el distribuidor, el centro de servicio o el personal con la experiencia y los conocimientos adecuados para reparar el enchufe.
- Asegúrese de que no hay nada accesible dentro de la carrera durante cualquier manipulación de los productos.
- El uso del equipo está destinado a profesionales capacitados.


3 PRECAUCIONES

- Este producto debe ser utilizado por una persona experta que debe estar familiarizada con la estructura, el funcionamiento y las instrucciones del producto. También debe efectuar las tareas normales de mantenimiento.
- Lea detenidamente este manual antes de instalar, utilizar o realizar tareas de ajuste. Y consérvelo en buenas condiciones.
- Este producto no debe utilizarse para trabajos de carga en un solo lado o en un solo punto.
- Cumpla con las normas de funcionamiento de seguridad, el producto no debe ser sobrecargado, y para asegurar que el equipo de protección de seguridad del producto sea completo y confiable, elimine los factores de inseguridad a su debido tiempo.
- Apriete los pernos y tuercas regularmente para evitar fallos causados por aflojamiento, deslizamiento, vibración y caída.
- Durante el mantenimiento, el operador no debe desmontar, a su discreción, ningún producto de la camilla.
- No está permitido usar el producto cuando presente fallos. Si se detecta un fenómeno anormal o un sonido anómalo, debe detenerse inmediatamente para inspeccionarlo, y el trabajo puede reanudarse después de solucionar los problemas.
- El operador debe estar familiarizado con las precauciones descritas en cada sección del manual para garantizar la seguridad de la persona y del producto.
- Este producto está equipado con un cable de alimentación de tres hilos. El cable de alimentación debe enchufarse a una toma de corriente de tres orificios que esté correctamente instalada y conectada a tierra. Esto no sólo previene el riesgo de descarga eléctrica, sino que garantiza el correcto funcionamiento del producto.
- Utilice el equipo siguiendo estrictamente la etiqueta de advertencia estampada en el mismo.
- Mientras se controla la elevación, el botón debe pulsarse continuamente hasta que el producto se encuentre en una posición adecuada.
- Tenga en cuenta que los tiempos de funcionamiento continuo deben ser Máx. 2Min. ENCENDIDO; 18Min. APAGADO, cuando el motor está funcionando.
- El mantenimiento debe ser llevado a cabo por profesionales capacitados.
- Después de cualquier tratamiento, limpie el producto utilizando una solución neutra para eliminar el polvo o las manchas.
- Al ajustar cada pieza, mantenga las manos, los pies y la cabeza alejados de la posición indicada por la flecha. (Como se muestra en la foto).

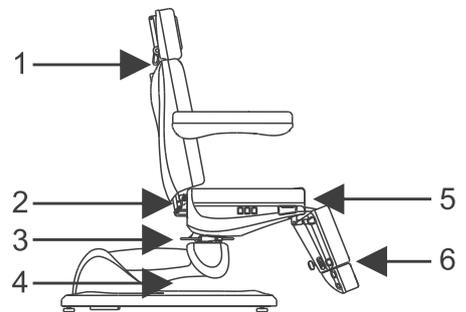


4 INSTALACIÓN

1. Coloque el producto en un lugar adecuado, de acuerdo con el plano general, la iluminación natural o artificial y las condiciones de funcionamiento del salón o de la casa. Y guárdelo en un ambiente limpio, seco y fresco.
2. Abra la caja de embalaje para comprobar si el producto está intacto y si los accesorios o repuestos están completos. Póngase en contacto con el distribuidor o con nosotros si tiene algún problema.
3. Instalación
Coloque el producto en la posición adecuada. Tenga en cuenta que no es necesario instalar tornillos adicionales en el suelo para sujetar el producto, ya que el diseño original ha tenido en cuenta la estabilidad. No obstante, asegúrese de colocar el producto sobre un suelo firme y plano para evitar accidentes. Si el producto gira o se inclina debido a un suelo irregular, ajuste las cuatro patas de plástico (M10x30) y las tuercas (M10) con una llave hexagonal fija, para garantizar la estabilidad del plástico.
5. Conecte correctamente el enchufe del producto con la fuente de alimentación. (Como se muestra en la foto).

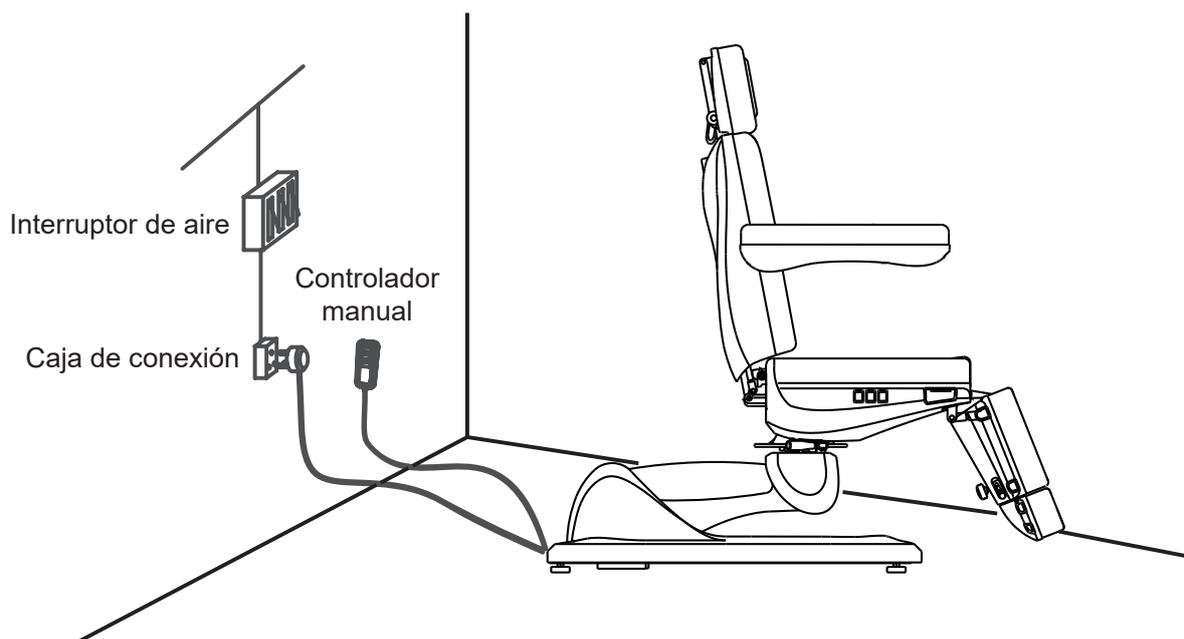


5 ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

- El producto consta de caja de control, motor, pieza de madera, herrajes, piezas de plástico y cuero. Entre ellos, la caja de control controla el funcionamiento de los motores y el controlador manual.
- Este producto incluye el ajuste del ángulo del respaldo, el ajuste del ángulo del cojín del asiento y el ajuste de elevación de toda la camilla, que es una estructura completa e integral.
(Como se muestra en la foto)

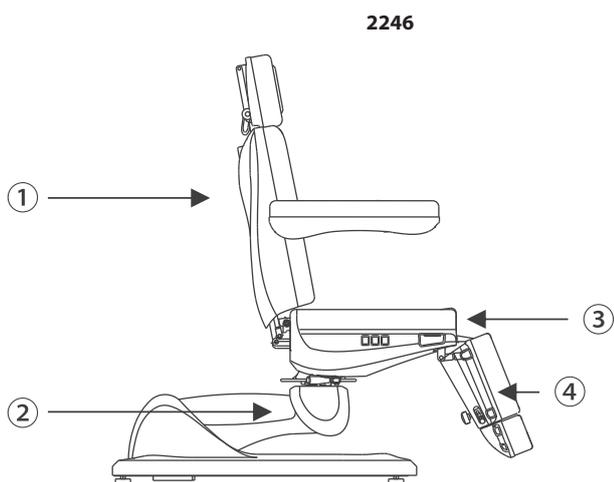



- ① ajuste del ángulo del respaldo
- ② ajuste de elevación
- ③ ajuste del ángulo del asiento
- ④ ajuste del ángulo del reposapiés (ajuste manual)

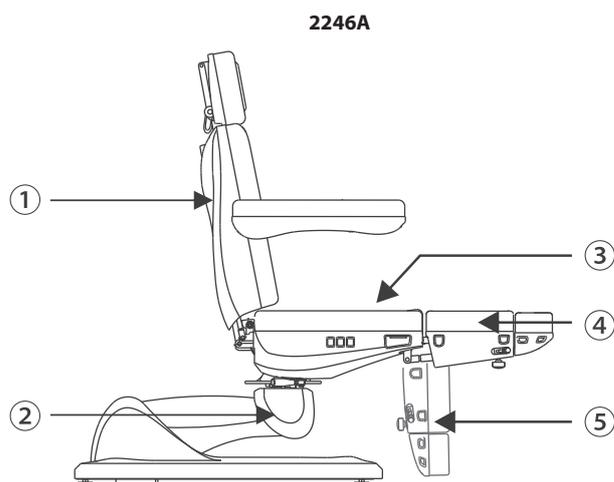

- ① ajuste del ángulo del respaldo
- ② ajuste de elevación
- ③ ajuste del ángulo del asiento
- ④ ajuste del ángulo del reposapiés (derecha) (ajuste manual)
- ⑤ ajuste del ángulo del reposapiés (izquierda) (ajuste manual)


6 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Configuración estándar (panel de botones)

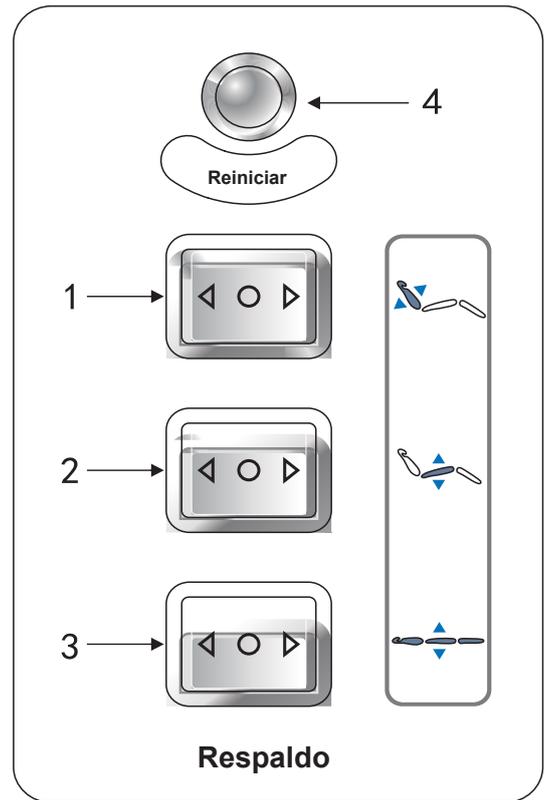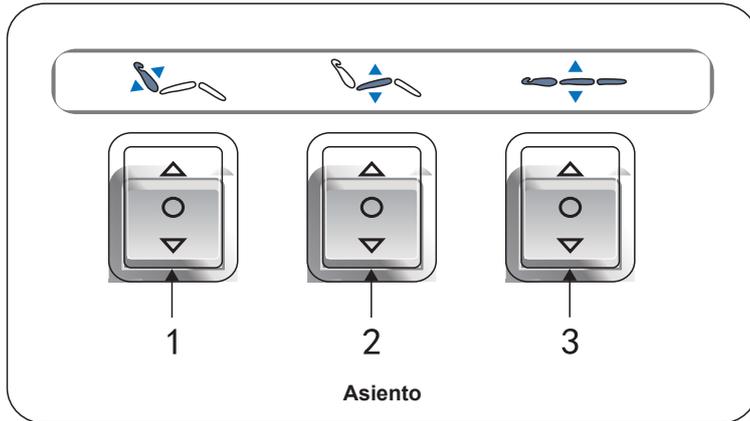


N.º	DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN
1	Botón de ajuste del respaldo	Pulse el botón hacia arriba (hacia abajo), el respaldo se mueve hacia arriba (hacia abajo), el ángulo aumenta (disminuye) a velocidad constante.
2	Botón de ajuste del asiento	Pulse el botón hacia arriba (hacia abajo), el asiento se inclina hacia atrás (vuelve a la posición horizontal).
3	Botón para el control de la altura	Pulse el botón hacia arriba (hacia abajo), el asiento se mueve hacia arriba (hacia abajo), la altura aumenta (disminuye) a una velocidad constante.
4	Botón de reinicio de una tecla	Pulse el botón, el respaldo se moverá automáticamente hacia arriba hasta el máximo, el ángulo del cojín del asiento se moverá automáticamente hasta la posición plana, el reposapiés se moverá hacia abajo hasta el mínimo, la altura de la camilla alcanzará automáticamente la posición más baja.


1. Configuración opcional (Controlador manual)

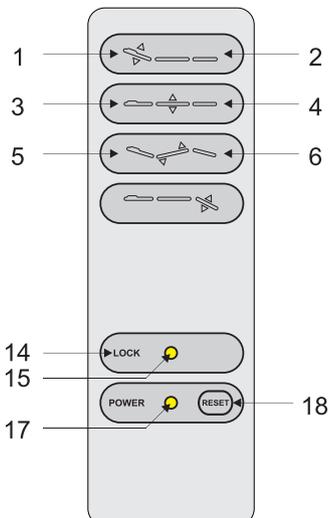

2. Configuración opcional (Controlador manual)

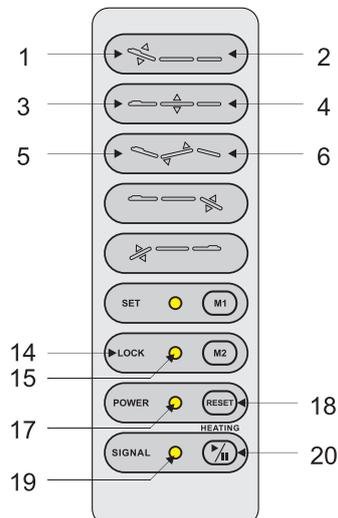

3. Configuración opcional (Controlador de pedal)

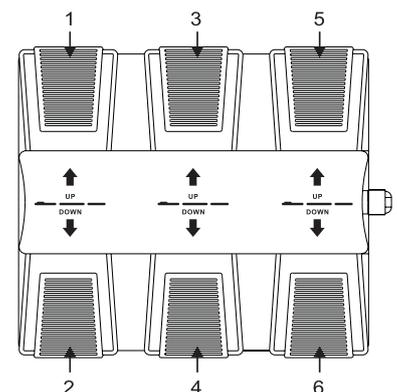


N.º	DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN
1	El respaldo se mueve hacia arriba	El respaldo sube suavemente pulsando el botón.
2	El respaldo se mueve hacia abajo	El respaldo baja suavemente pulsando el botón.
3	Mover hacia arriba	Sube suavemente pulsando el botón.
4	Mover hacia abajo	Baja suavemente pulsando el botón.
5	Cojín del asiento hacia arriba	El asiento se inclina suavemente pulsando el botón.
6	Cojín del asiento hacia abajo	El asiento se aplana suavemente pulsando el botón.
7	El reposapiés (derecho) se mueve hacia arriba	Pulse el botón, el reposapiés derecho se moverá hacia arriba, su ángulo se reducirá al mínimo.
8	El reposapiés (derecho) se mueve hacia abajo	Pulse el botón, el reposapiés derecho se moverá hacia abajo, su ángulo se moverá al máximo.
9	El reposapiés (izquierdo) se mueve hacia arriba	Pulse el botón, el reposapiés izquierdo se moverá hacia arriba, su ángulo se reducirá al mínimo.
10	El reposapiés (izquierdo) se mueve hacia abajo	Pulse el botón, el reposapiés izquierdo se moverá hacia abajo, su ángulo se moverá al máximo.
11	Acceda al ajuste de posición de memoria (Opción)	El indicador luminoso se enciende después de pulsar el botón durante 2 segundos, entonces entra en el estado de ajuste de posición de memoria.
12	Indicador luminoso de ajuste de memoria (Opción)	
13	Ajuste posición de memoria 1 (Opción)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse el botón "SET" durante 2 segundos para acceder al estado de ajuste de la posición de memoria, el indicador de ajuste de la posición de memoria se enciende. Ajuste la posición que necesite, y pulsando el botón "M1" las acciones se guardan en la memoria. Al salir del estado de ajuste de la posición de memoria, el indicador se apaga. 2. Pulse el botón para pasar automáticamente al estado de acción de memoria.
14	Botón de bloqueo de seguridad	Mantenga pulsado el "botón de bloqueo de seguridad" durante unos dos segundos, se encenderá la luz verde alrededor del botón, todos los botones no podrán ser utilizados excepto el botón de bloqueo de seguridad. Mantenga pulsado el botón de bloqueo de seguridad durante unos dos segundos de nuevo, las luces verdes del botón se apagan, todos los botones vuelven al estado de funcionamiento normal.
15	Botón luminoso de bloqueo de seguridad	
16	Ajuste 2 de la posición de memoria (Opción)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse el botón "SET" durante 2 segundos para acceder al estado de ajuste de la posición de memoria, el indicador de ajuste de la posición de memoria se enciende. Ajuste la posición que necesite, y pulsando el botón "M2" las acciones se guardan en la memoria. Al salir del estado de ajuste de la posición de memoria, el indicador se apaga. 2. Pulse el botón para pasar automáticamente al estado de acción de memoria.
17	El indicador de alimentación	El controlador manual está conectado correctamente a la red eléctrica, el indicador luminoso se enciende. De lo contrario, no se encenderá.
18	Botón de reinicio de una tecla	Pulse el botón, el ángulo del respaldo se moverá automáticamente al máximo, el ángulo del cojín del asiento se moverá automáticamente a la posición plana, el reposapiés se moverá hacia abajo al máximo, la altura de la camilla alcanzará automáticamente la posición más baja.
19	Luz indicadora de la función de calefacción (Opción)	Pulsando el botón, la luz se enciende, la función de calefacción se activa; pulsando de nuevo el botón, la luz se apaga, la función de calefacción se detiene.
20	Calefacción (Opción)	

Notas:


1. El ajuste de la posición de memoria sólo está disponible para los modelos con función de memoria.
2. La función de calefacción sólo está disponible para los modelos con función de calefacción.
3. Deben elegirse diferentes controladores manuales según las diferentes configuraciones.

7 PRECAUCIONES DE USO

Si la varilla de soporte del reposacabezas se afloja, siga los pasos anteriores para ajustarla.

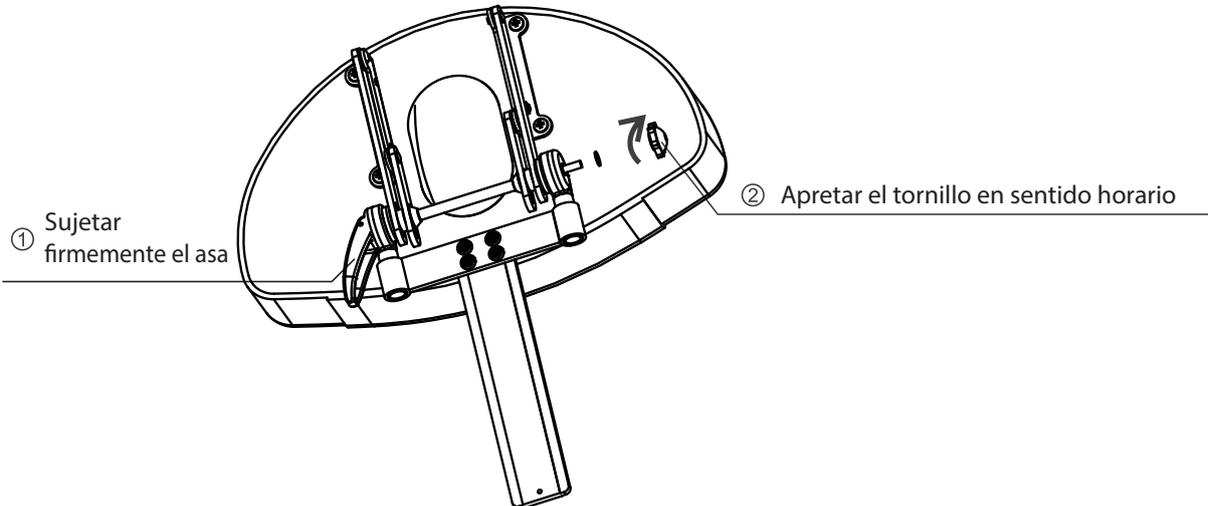


No está permitido inclinar el cojín del asiento cuando la camilla está en la posición más baja.

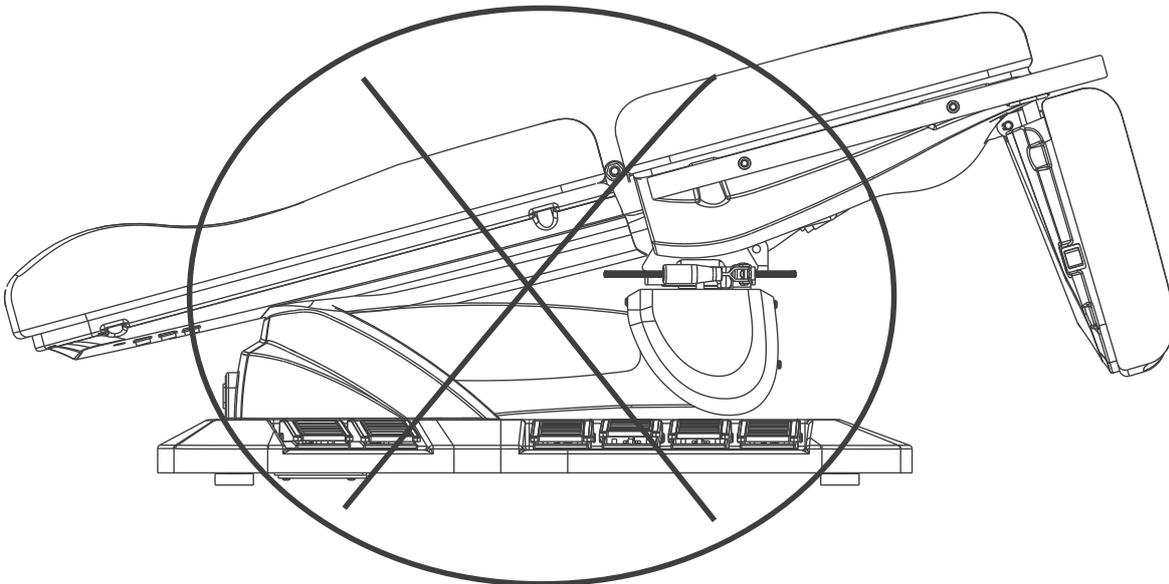

No se sienten en la posición de respaldo/reposapiés ni salte por encima de la posición de respaldo/reposapiés para evitar el riesgo de caída debido a la fractura por fuerza excesiva de la articulación del respaldo/reposapiés.


Instrucción para apretar el bloque de frenado

(Esto es para apretar el bloque de frenado cuyo engranaje está desgastado.)

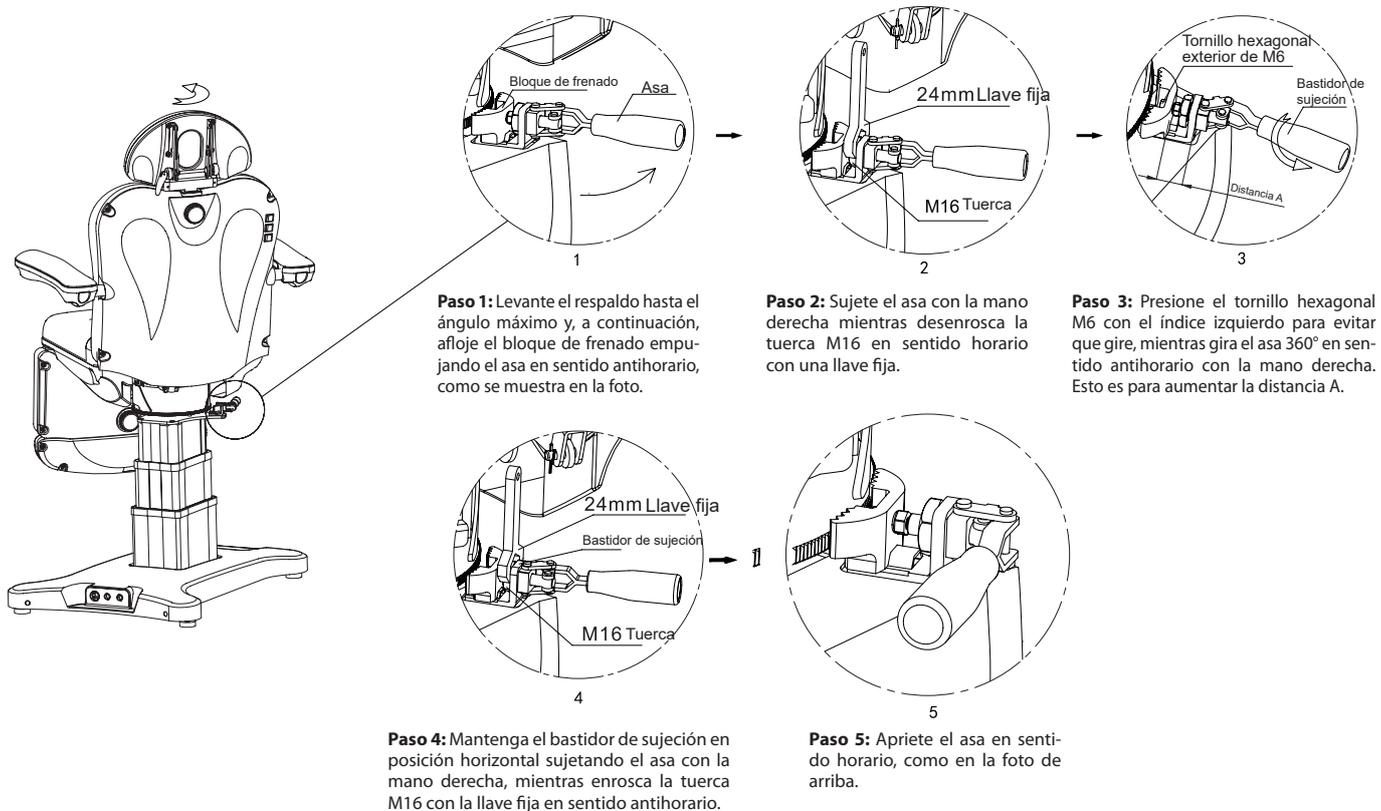

Instrucción para reemplazar el bloque de frenado



(Esto es para reemplazar el bloque de frenado si el engranaje del bloque de frenado está totalmente desgastado y ya no funciona.)

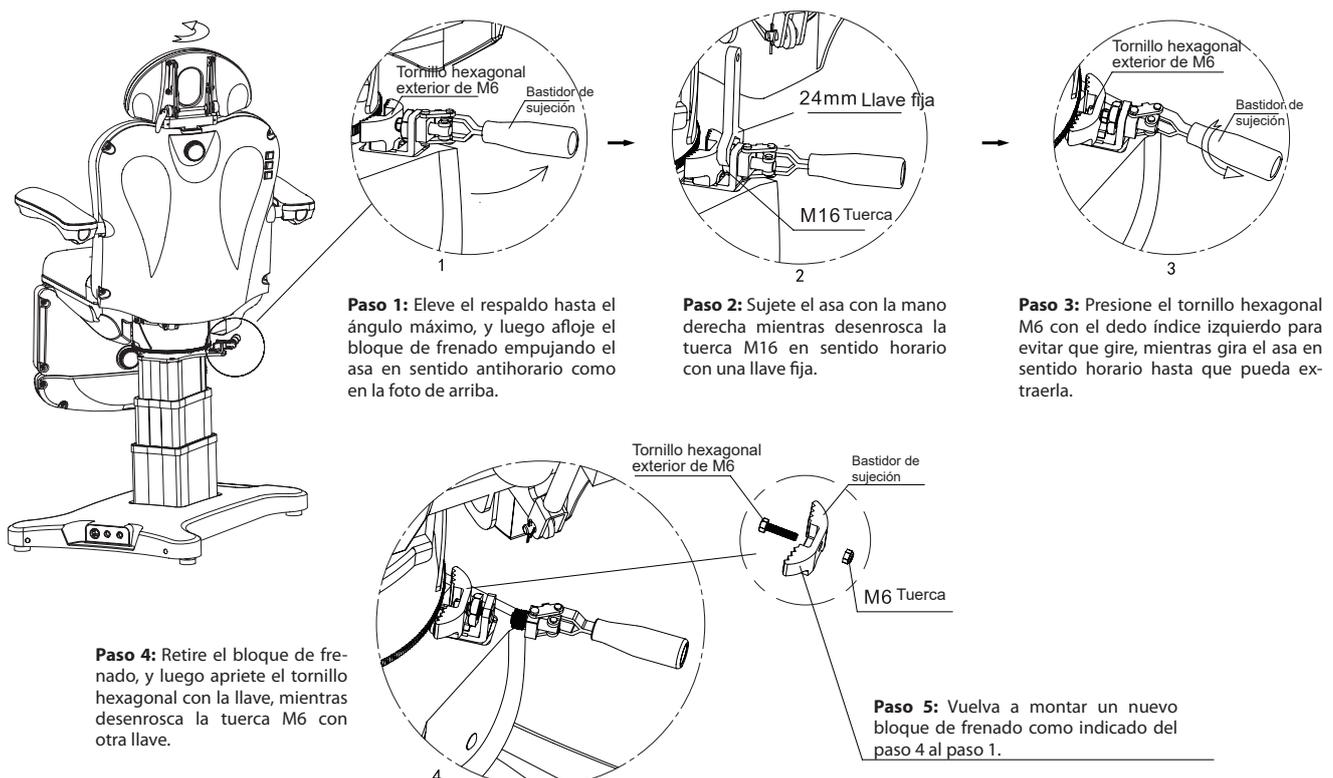

Esta imagen del producto es sólo para mostrar la estructura específica del producto, tome como referencia el producto real.

8 PARÁMETROS TÉCNICOS

Alimentación	AC 100-120V o AC 220-240V o AC 100-240V, 50/60Hz
Potencia máxima	300W
Temperatura ambiente	0°C--40°C
Humedad relativa	30%^90%
Carga de elevación nominal	175 KG
Tamaño del paquete	1360x820x720MM (2246 / 2246A)

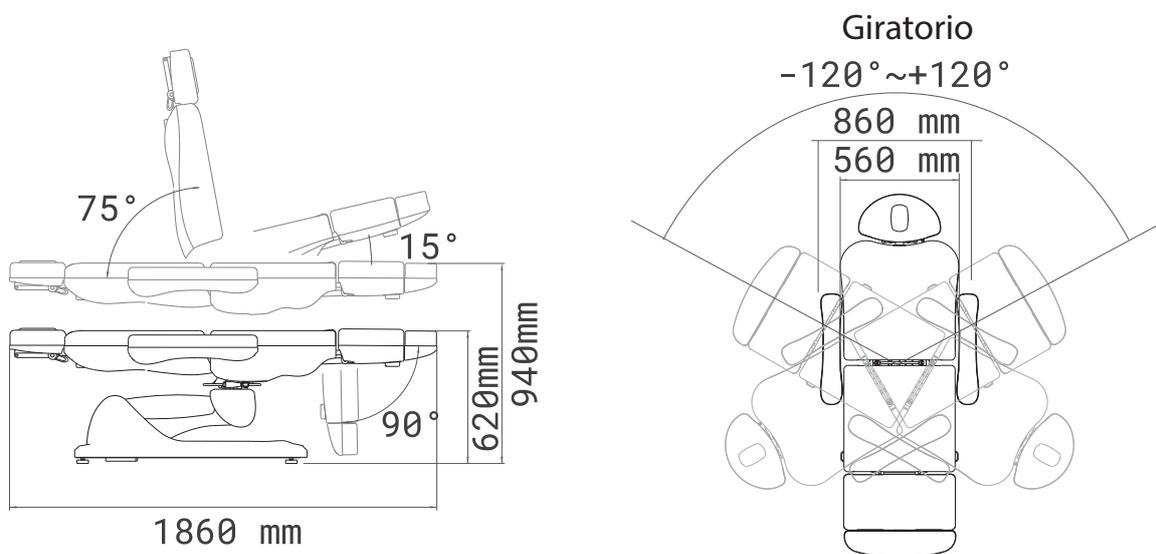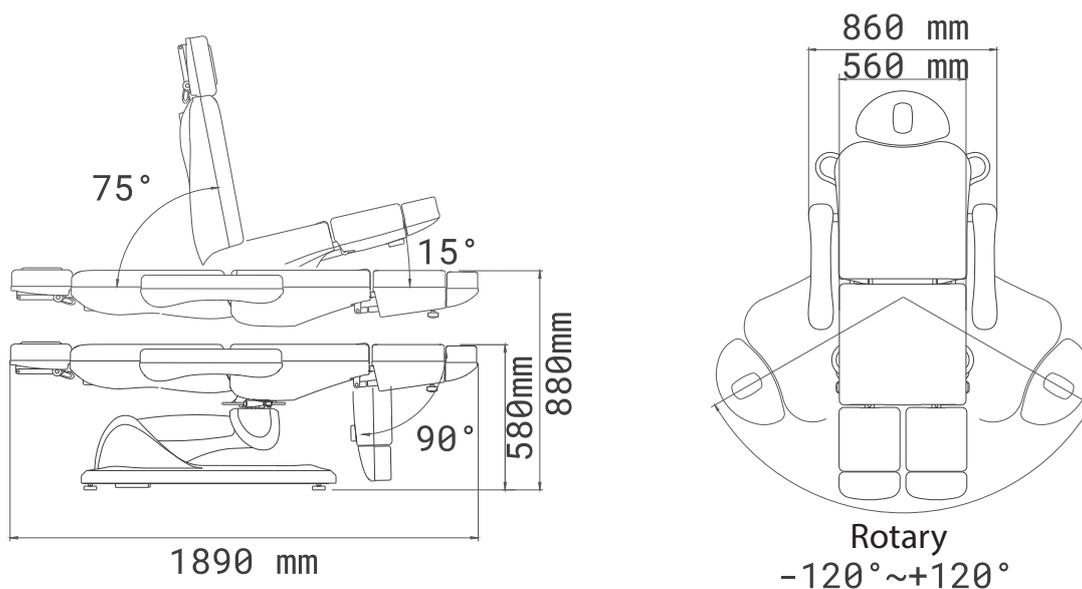2246

2246A

9 MANTENIMIENTO

- Después de cada tratamiento, utilice únicamente una solución neutra para eliminar el polvo y las manchas del cuero, las piezas metálicas u otras partes. Las soluciones desinfectantes como el alcohol, el ácido o las soluciones alcalinas están prohibidas. Esto es para evitar que se acorte la vida útil de los componentes.
- Lubrique las piezas móviles con regularidad (una vez al año)

10 DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITOS



11 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

DESCRIPCIÓN DEL FALLO	CAUSA	SOLUCIÓN
El motor no funciona normalmente	1. El cable de alimentación no está conectado o no está enchufado correctamente	1. Conecte el cable de alimentación o enchúfelo correctamente
	2. Mala calidad del controlador manual o el controlador de pedal	2. Sustituya el controlador manual o el controlador de pedal
	3. Mala calidad de la caja de control	3. Póngase en contacto con el centro de mantenimiento o con el proveedor para solucionar el problema.
	4. Rotura de la cola del motor	
	5. El motor se ha dañado	
	6. Se ha pulsado el interruptor de emergencia pero no se ha restablecido.	4. Restablezca el interruptor de emergencia.
Error del sistema de audio	1. Error de conexión de entrada/salida	1. Vuelva a comprobar la conexión de entrada/salida
	2. Error de la caja de control de audio	2. Sustituir las piezas defectuosas
	3. Mala calidad del altavoz de audio	3. Si el problema no se soluciona, póngase en contacto con el centro de mantenimiento o el proveedor para solucionar el problema.
Sonido anormal	1. Las piezas giratorias carecen de aceite lubricante	1. Añadir aceite lubricante
	2. Las posiciones giratorias (como bisagra, conjuntos POM, elevador de gas) carecen de aceite lubricante	2. Añadir aceite lubricante
	3. Problemas de calidad del motor	3. Sustituir el motor

Si el problema sigue sin resolverse después de la operación anterior, póngase en contacto con el centro de mantenimiento o con el proveedor para solucionarlo.



Eliminación: Este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Los usuarios deben desechar este equipo entregándolo a un centro de reciclaje específico para aparatos eléctricos y electrónicos.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía estándar B2B de 12 meses de Gima.