

**ESPAÑOL**

**LÍNEA PREVENTIVA DECÚBITO  
EN FIBRA HUECA DE SILICONA**

**ADVERTENCIAS**

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

Antes de realizar cualquier operación, controlar visualmente la integridad del dispositivo. Siempre que el producto presente anomalías, contactar inmediatamente con el punto de venta en el cual se ha realizado la compra

Erregi sas no asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado del dispositivo.

**DESCRIPCIÓN**

Cojines de prevención de decúbito en algodón 100%, con acolchado en fibra hueca de silicona contenida en una funda de algodón con sistema de fijación con velcro. La elevada resiliencia y la alta transpirabilidad permiten una acción eficaz en la prevención de la aparición de las lesiones desde decúbito.

**INDICACIONES**

Prevención del decúbito para pacientes postrados con el fin de disminuir los picos de presión, de reducir las fuerzas de corte y fricción y favorecer la circulación del aire.

**PRECAUCIONES DE USO**

Producto sanitario indicado para la prevención del decúbito, a utilizar previa evaluación clínica por un médico especialista. Coloque el cojín en el asiento de la silla de ruedas teniendo cuidado de que los cierres de velcro, cuando los haya, se encuentren en el lado del respaldo. Por lo tanto, asegurar el cojín a una estructura de la silla de ruedas a través de las fijaciones con velcro. Por lo tanto, se recomienda supervisar con regularidad la zona interesada, realizar una frecuente movilización del paciente y tener mucho cuidado con la higiene.

Con este fin se recomienda consultar los protocolos y las líneas guía para la prevención de las llagas desde decúbito. Utilizar el dispositivo siempre utilizando una prenda para la protección de la persona. Dispositivo no ignífugo

**CONTRAINDICACIONES**

No se han detectado contraindicaciones salvo en los casos de sensibilidad comprobada a los materiales componentes.

**COMPOSICIÓN**

Interno: Fibra hueca de silicona

Funda: Algodón 100%

**MODALIDAD DE LAVADO**



El fabricante no se hace responsable de las variaciones en las características técnicas de la ayuda en caso de incumplimiento de las instrucciones de lavado.

**CONSERVACIÓN**

Conservar protegido de fuentes de luz, calor y humedad.

**DESINFECCIÓN**

Utilizar productos con presidio médico quirúrgico

**ELIMINACIÓN**

Eliminar el dispositivo respetando las normativas vigentes en materia de protección ambiental y recogida selectiva.

<b>REF</b>	Código producto	<b>MD</b>	Producto sanitario
<b>LOT</b>	Número de lote		Fabricante
<b>CE</b>	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Consultar las instrucciones de uso.
	Conservar al amparo de la luz solar		Conservar en un lugar fresco y seco
	Fecha de fabricación		No contiene látex de caucho natural
<b>UDI</b>	Identificador único de dispositivo		

NO retire la etiqueta del producto sanitario, ya que permite la trazabilidad del producto suministrado (fabricante, UDI, número de lote, código de producto).

**CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA**

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

**REF** 01/04 (GIMA 28550)  
05/04 (GIMA 28551)  
04/04 (GIMA 28552)

**Erregi S.a.s.**  
Via Adua 40  
21040 Vedano Olona (Va)  
commerciale@erregiausilimedi.it  
www.erregiausilimedi.it  
MADE IN ITALY



M28555-Rev.5-07.25