

- sous le niveau de la vessie urinaire pour éviter les reflux, en position verticale avec la sonde d'alimentation tournée vers le haut.
- Le modèle de poche à urine de jambe doit être fixé à la jambe à l'aide de bandes élastiques, en positionnant la poche en dessous du niveau de la vessie, de façon à éviter le reflux
  - Évitez d'écraser, de pincer ou d'écraser la tubulure pendant l'utilisation afin de ne pas interrompre l'écoulement de l'urine dans la poche.
  - Éviter le contact avec des solvants chimiques ainsi que l'exposition à des sources de chaleur lors de la conservation.
  - Ne pas manipuler avec des outils pointus ou coupants.
  - En cas de présence d'air à l'intérieur de la poche, vider celle-ci avant usage.
  - Pour garantir l'usage de la totalité du volume de la poche, éviter la présence d'air même durant l'utilisation.
  - Pour les modèles munis de robinet de vidange, vérifier la fermeture avant usage.
  - La réutilisation de la poche pourrait entraîner un risque d'infection.
  - Veillez à remplacer la poche avant d'atteindre le niveau maximum.
  - Fixez solidement le connecter à la sonde ou à l'adaptateur pénien.

#### INDICATIONS POUR L'ÉLIMINATION

- Utiliser des gants de protection.
- Vider après la première utilisation conformément aux dispositions légales en vigueur.

	Fabricant	<b>REF</b>	Code produit
	Date de fabrication	<b>LOT</b>	Numéro de lot
	Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser		Date d'échéance
	Distribué par		Consulter les instructions d'utilisation
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil		À conserver dans un endroit frais et sec
	Non stérile	<b>MD</b>	Dispositif médical
<b>CE</b>	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745	<b>UDI</b>	Identifiant unique de l'appareil

#### CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

## FRANÇAIS

### POCHES À URINE

#### USAGE PRÉVU

- À utiliser exclusivement pour la collection et l'évacuation des urines.
- Ne l'utilisez pas comme instrument de mesure pour les tests de laboratoire.
- Les indications de volume sont approximatives.

#### CONDITIONS D'UTILISATION

#### ET DE CONSERVATION

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

- Avant l'utilisation, contrôler l'intégrité et la date d'expiration du produit (Gima décline toute responsabilité en cas de mauvaise conservation et d'utilisation non appropriée du produit).
- Veillez à ce que la poche soit toujours suspendu à un support,

	REF
<b>GIMA 28688</b>	800160
<b>GIMA 28690</b>	800161
<b>GIMA 28689</b>	800162
<b>GIMA 28692</b>	800163
<b>GIMA 28694</b>	802220
<b>GIMA 28691</b>	802221
<b>GIMA 28695</b>	802222
<b>GIMA 28693</b>	802223
<b>GIMA 28707</b>	804257
<b>GIMA 28708</b>	804258



TECNOCLINIC, S.A.  
Ctra. de Prats de Lluçanès, Km. 2.300 P.I.  
La Llanera 08208 Sabadell (Barcelona) - Spain  
Made in Spain



**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

