
PORTUGUESE

SACOS DE URINA

UTILIZAÇÃO PREVISTA

- Utilizar apenas para recolha de urina e drenagem.
- Não utilize como instrumento de medição e para testes de laboratório.
- As indicações do volume são aproximadas

MODO DE USO E CONSERVAÇÃO

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

- Verificar a integridade do produto e a data de validade antes de utilizar (Se o produto foi indevidamente conservado e utilizado de forma inadequada, a Gima não assumirá nenhum tipo de responsabilidade que daí possa advir).
- A bolsa deve ser sempre pendurada num suporte, posicionando-a abaixo do nível da bexiga urinária para evitar o refluxo, na posição vertical e com o tubo de adução voltado para cima.
- O modelo do saco de perna tem de ser fixado à perna por meio de bandas elásticas, posicionando-o abaixo do nível da bexiga, para evitar o refluxo
- Durante a utilização, evite de apertar, beliscar ou estrangular o tubo para não interromper o fluxo de urina para a bolsa.

- Guardar os sacos longe de solventes, produtos químicos e fontes de calor.
- Não utilizar com utensílios aguçados.
- Na eventualidade do saco ter ar, esvaziá-lo antes de utilizar.
- Para garantir o uso de todo o volume do saco, evite a presença de ar também durante a utilização.
- Verificar se a válvula de despejo está bem fechada antes de utilizar.
- A reutilização da bolsa pode comportar um risco de infeção.
- A bolsa deve ser substituída antes de atingir o nível máximo.
- Fixe firmemente o conector à sonda ou ao adaptador para o pénis.

INDICAÇÕES PARA A ELIMINAÇÃO

- Utilizar luvas de protecção.
- O saco é de uso único. Eliminar o saco depois de ter sido utilizado ao abrigo das disposições legais em vigor.

	Fabricante	REF	Código produto
	Data de fabrico	LOT	Número de lote
	Dispositivo descartável, não reutilizar		Data de validade
	Distribuído por		Consulte as instruções de uso
	Guardar ao abrigo da luz solar		Armazenar em local fresco e seco
	Não estéril	MD	Dispositivo médico
CE	Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745	UDI	Identificador exclusivo do dispositivo

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

	REF
GIMA 28688	800160
GIMA 28690	800161
GIMA 28689	800162
GIMA 28692	800163
GIMA 28694	802220
GIMA 28691	802221
GIMA 28695	802222
GIMA 28693	802223
GIMA 28707	804257
GIMA 28708	804258



TECNOCLINIC, S.A.
Ctra. de Prats de Lluçanès, Km. 2.300 P.I.
La Llanera 08208 Sabadell (Barcelona) - Spain
Made in Spain



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

