

ATTENZIONE:

Evitare l'esposizione visiva diretta prolungata.

SPECIFICHE:

- Lampada fluorescente, sostituibile (REF UV59B) – circa 365 nm
- Lampada a LED (diodo a emissione di luce), non sostituibile
- Alimentazione – 6V (4 batterie AA sostituibili)

Usò medico previsto/Indicazione d'uso

La Wood's Light a luce UV è una lampada portatile palmare e leggera, a batterie, in grado di emettere, come opzione, luce ultravioletta.

Principio di funzionamento

Utilizzata per la visualizzazione diagnostica e il rilevamento del liquido seminale.

Popolazione di pazienti

Non limitata

Punto d'uso e condizioni del sito

Punto d'uso – Pelle

Condizioni del sito – Non limitate

Profilo utente di destinazione

Il dispositivo è destinato all'uso da parte di professionisti sanitari addestrati.

Condizioni d'uso previsto

Ambiente

- Funzionalità limitata in presenza di umidità
- Visione chiara e priva di ostruzioni del punto di applicazione

Frequenza d'uso

Nessuna limitazione della durata della batteria o della lampada

Smaltimento

- Lampada fluorescente – Eliminare la lampada nel rispetto delle linee guida per lo smaltimento delle lampade fluorescenti
- Rischio biologico – Smaltire la luce UV secondo il protocollo della struttura ospedaliera

ISTRUZIONI:

Rimuovere il nastro protettivo in plastica per accedere all'interruttore della Wood's Light.

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA FLUORESCENTE

Schiacciare e far scorrere entrambe le estremità del coperchio della lampada (B) per rimuoverlo.

Rimuovere la lampadina a fluorescenza ruotandola di 90 gradi e sollevandola. Sostituire la lampadina. Reinserrire e far scattare in posizione il (B) coperchio della lampada.

NOTA: La Lampada a LED (A) non è sostituibile.

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Far scorrere il coperchio del vano batteria per aprirlo (C). Rimuovere tutte le 4 batterie. Sostituire le batterie osservando la polarità.



OFF/No Light





Fluorescent Lamp On



LED Lamp On



R_x ONLY

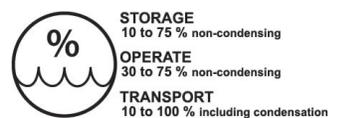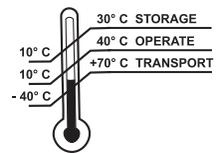

Bovie[®]

Bovie Medical Corporation
5115 Ulmerton Road
Clearwater, Florida 33760 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague
The Netherlands

