



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

FR

Le produit est destiné à être exclusivement utilisé par un personnel spécialisé. Ne pas utiliser de manière inadéquate les instruments et ne pas solliciter excessivement les joints ou les supports.

L'usage incorrect ou un mauvais ou insuffisant entretien peuvent détériorer rapidement les instruments. Nous conseillons vivement, la première fois et après chaque utilisation, de nettoyer, sécher et stériliser l'instrument. Les instruments doivent toujours être nettoyés avant la stérilisation. Ne pas utiliser de détergents corrosifs et/ou de produits abrasifs. Il est conseillé d'utiliser des solutions détergentes et de rinçage ayant un pH 7,0. Veiller à ce que les produits n'entrent pas en contact avec des acides ou autres désinfectants agressifs. Cela pourrait provoquer par la suite une décoloration, une oxydation ou la formation de trous. Ne pas mettre les instruments à tremper dans les solutions chimiques détergentes / stérilisantes plus longtemps que nécessaire. Après les avoir stérilisés, les instruments doivent être soigneusement lavés à l'eau chaude pour éliminer toute trace de substances chimiques, et prévenir ainsi la décoloration ou la corrosion.

Respecter les instructions fournies avec le détergent ; nettoyer les instruments en position ouverte et fermée, rincer pendant 3 minutes et contrôler que l'eau rentre et sort des trous plusieurs fois de suite. Utiliser de l'eau complètement déminéralisée pour la phase finale de rinçage. L'eau contenant du chlorure peut endommager les instruments. Sécher toujours l'instrument.

Les instruments présentant des signes de corrosion doivent être immédiatement éliminés. Toujours effectuer un examen visuel pour identifier tout dommage ou signe d'usure : les bords coupants doivent être dépourvus d'encoches et avoir un bord continu ; il ne doit pas y avoir de distorsion des instruments avec des parties longues ; toujours contrôler le mouvement fluide des charnières ; toujours contrôler que les systèmes de blocage fonctionnent.

Ne pas manipuler les instruments en les tenant par les embouts. Le nettoyage doit être uniquement effectué par un personnel qualifié.

Ne pas ranger les instruments s'ils sont encore humides.

Prêter le maximum d'attention aux instruments microchirurgicaux. Les embouts fins de ces instruments peuvent s'endommager facilement en cas de contact avec d'autres instruments ou avec les côtés de l'étui dans lequel ils doivent être conservés. Il est préférable de les nettoyer à la main.

Conserver et stériliser les instruments qui ont un manche arqué sur un support spécial. Toujours laisser les fermetures et les ressorts ouverts.

Stérilisation

Avant d'être utilisée en chirurgie, l'instrumentation doit être stérilisée avec la méthode de stérilisation à chaud à 270°F (132°C) pendant 15 minutes. Les températures de stérilisation ne doivent pas dépasser les 280°F (137°C). Il n'y a pas d'indications concernant le nombre maximal de cycles de stérilisation, car ils dépendent en grande partie de l'état du produit.

Entretien et lubrification

Après le nettoyage et avant la stérilisation, il est nécessaire que les instruments ayant des parties mobiles (par exemple charnières, fermoirs à boîte, pièces coulissantes ou rotatives) soient soumis

à une lubrification avec un lubrifiant hydrosoluble (ne pas utiliser d'huiles génériques). Toujours suivre les instructions du fabricant du lubrifiant concernant la dilution, la durée et la méthode d'application

Élimination

Les instruments vétérinaires ne doivent pas être éliminés de manière particulière, car ils ne contiennent pas de matériaux toxiques ou dangereux ; l'acier inox est recyclable dans les unités de production d'acier.

En cas de dommages ou de défauts détectés sur le produit, prière de contacter le fournisseur

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA - La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /
Κατασκευαστής / المصانع

Buraq Surgical Coporation

59C small Industrial estate 51310 Sialkot Pakistan

bsc@brain.net.pk

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por /
Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / داري من :
Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Pakistan

