


**Attenersi alle istruzioni dettagliate  
indicate di seguito:**

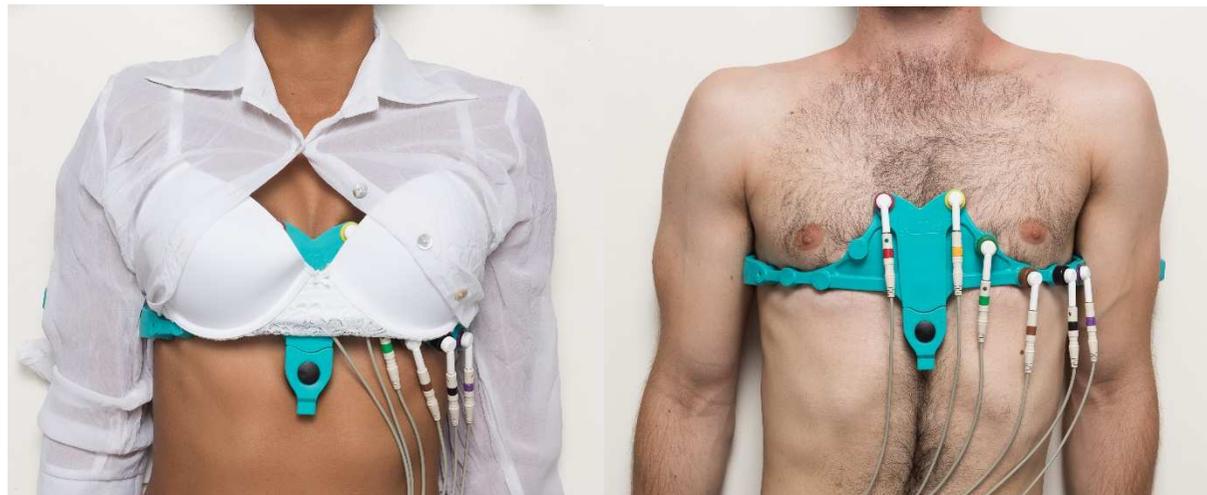

**Fascia ECG LevMed AllBrand™ con manipoli**

**Verificare che il cavo paziente ECG sia  
collegato al dispositivo ECG.**

**Verificare che le viti sulla fascia ECG siano correttamente serrate:**



## Collegare il cavo paziente ECG alle viti utilizzando il connettore a snap/coccodrillo:

*Adattatore da banana a snap*



*Adattatore da banana a coccodrillo*



\*Se il cavo paziente ECG è dotato di connettori a banana, utilizzare gli adattatori da banana a snap o da banana a coccodrillo.


## Collegare il cavo paziente ECG a ciascuno dei 4 morsetti:

### Cavo paziente con connettore a banana:




1. Svitare la vite.
2. Inserire il connettore a banana.
3. Riavvitare la vite.

### Cavo paziente snap/coccodrillo:


1. Riavvitare la vite.
2. Collegare lo snap/coccodrillo.

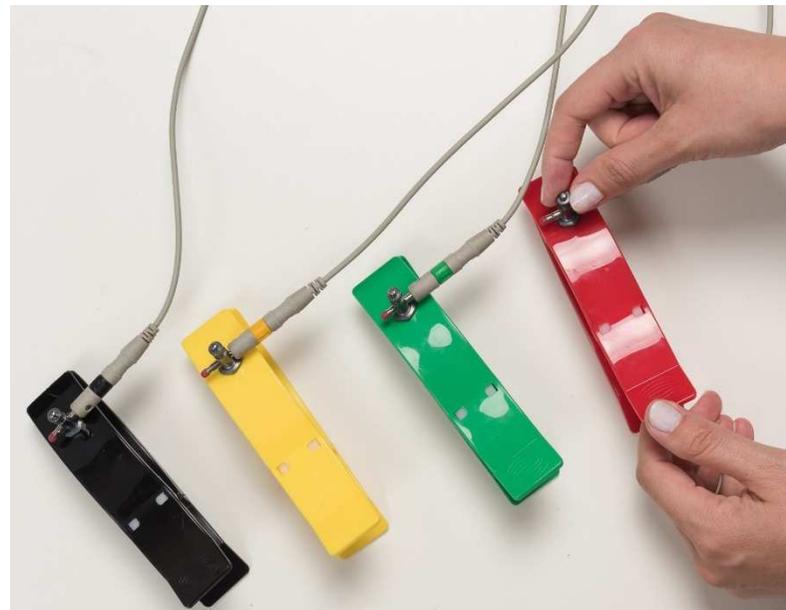

## Aprire o rimuovere la maglia del paziente:

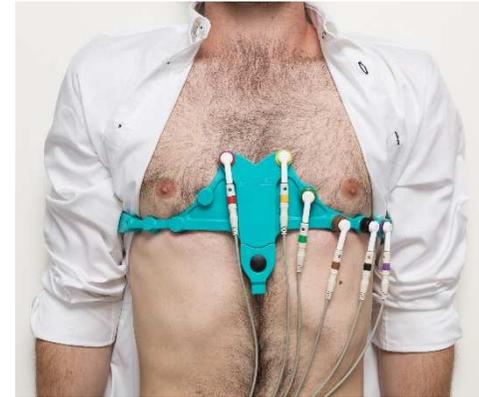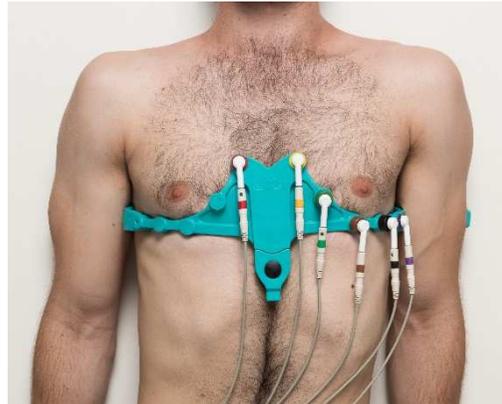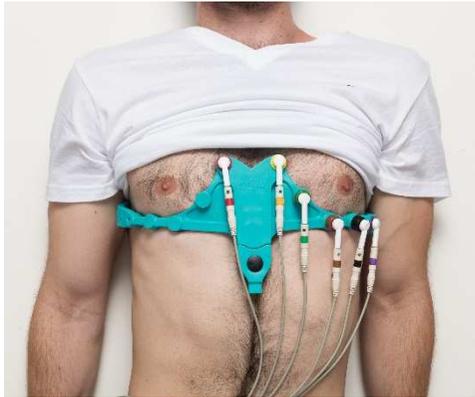

Inumidire i 6 elettrodi (V1-V6) con acqua corrente:

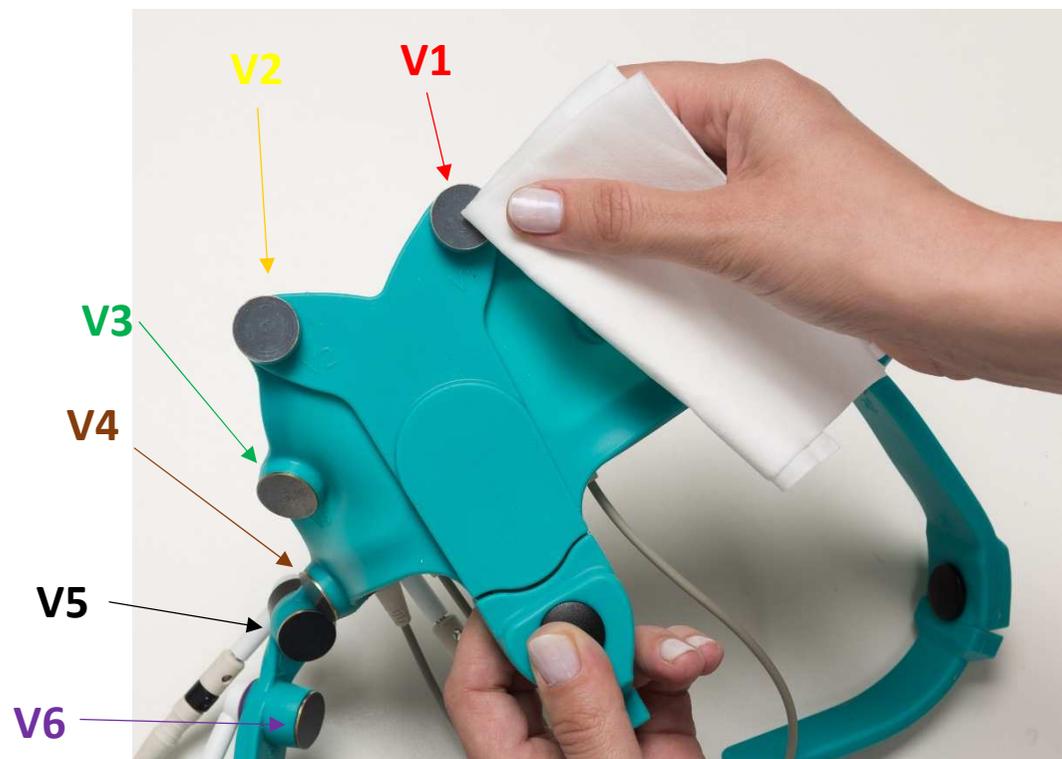


**Regolare i manipoli destro e sinistro in modo da adattarli alle braccia del paziente:**



**Se necessario, piegare V1 e V2 per garantire che l'elettrodo sia a contatto con il torace del paziente:**




**Una volta adagiato il paziente in posizione distesa, applicare la fascia sul torace in modo che V1 e V2 si trovino in posizione simmetrica sui due lati dello sterno:**

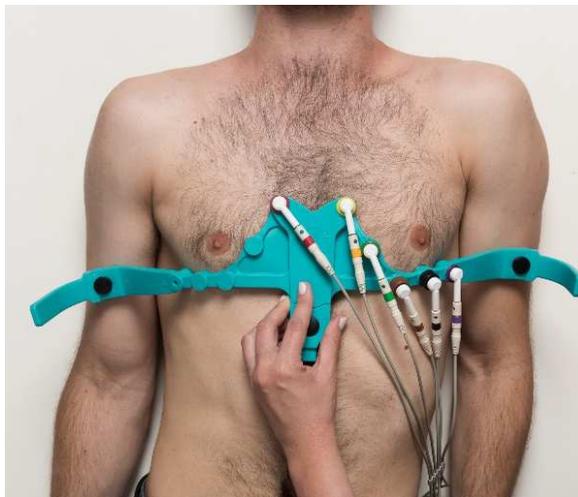

Nota: per i pazienti di sesso femminile, applicare la fascia sotto il reggiseno:



**Applicare le impugnature a metà braccio,  
tra il gomito e la spalla:**

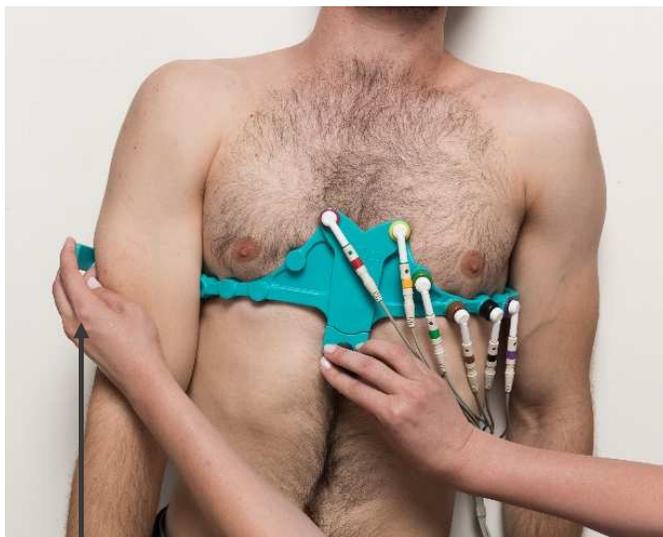


**Manipolo  
sinistro**





**Manipolo  
destro**

**Verificare che gli elettrodi V4, V5 e V6  
si trovino sotto il petto:**

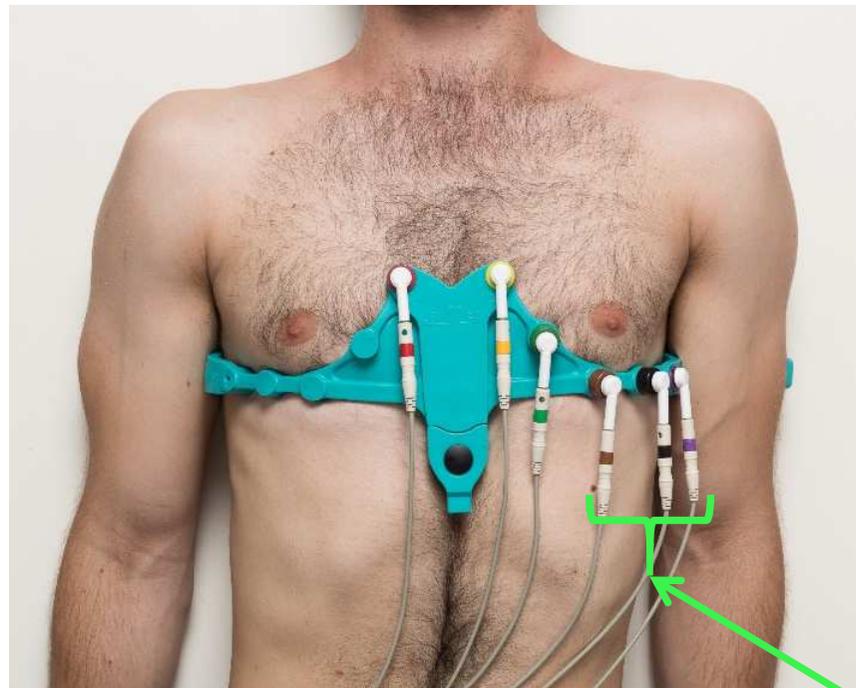


V4, V5, V6

**Verificare che tutti i 6 elettrodi siano a contatto con la pelle del paziente:**

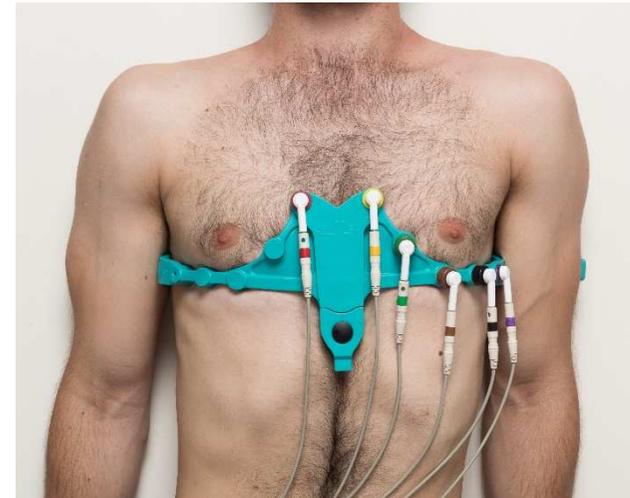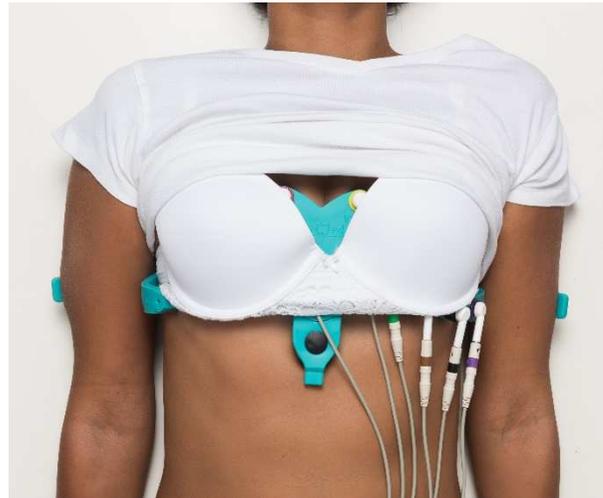

**Inumidire l'elettrodo su ciascuno dei 4 morsetti  
con acqua corrente:**

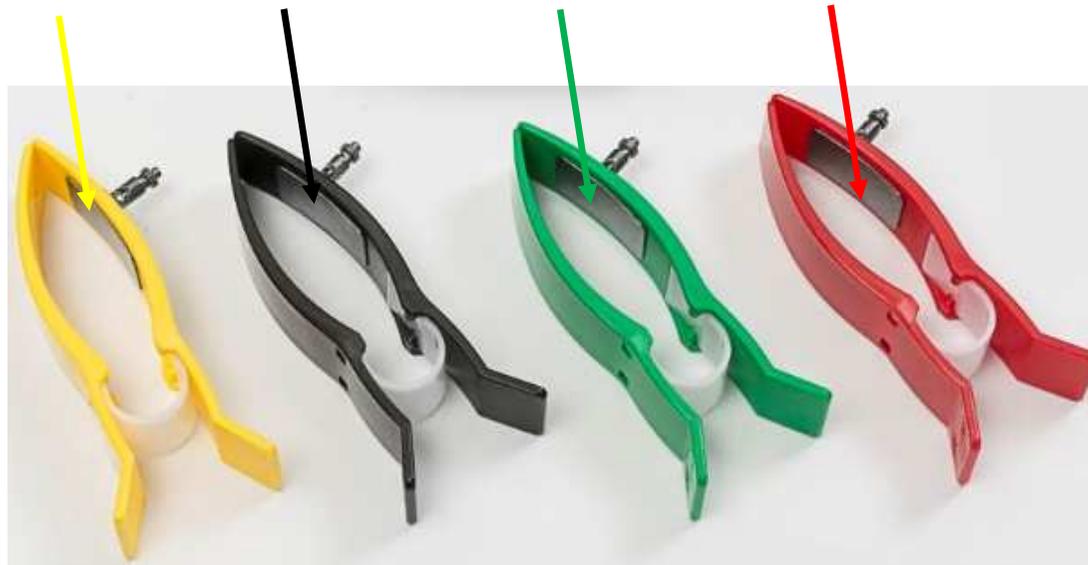


Applicare i morsetti sugli arti:

**Rosso = braccio destro**

**Giallo = braccio sinistro**


**Verde = gamba sinistra**

**Nero = gamba destra**

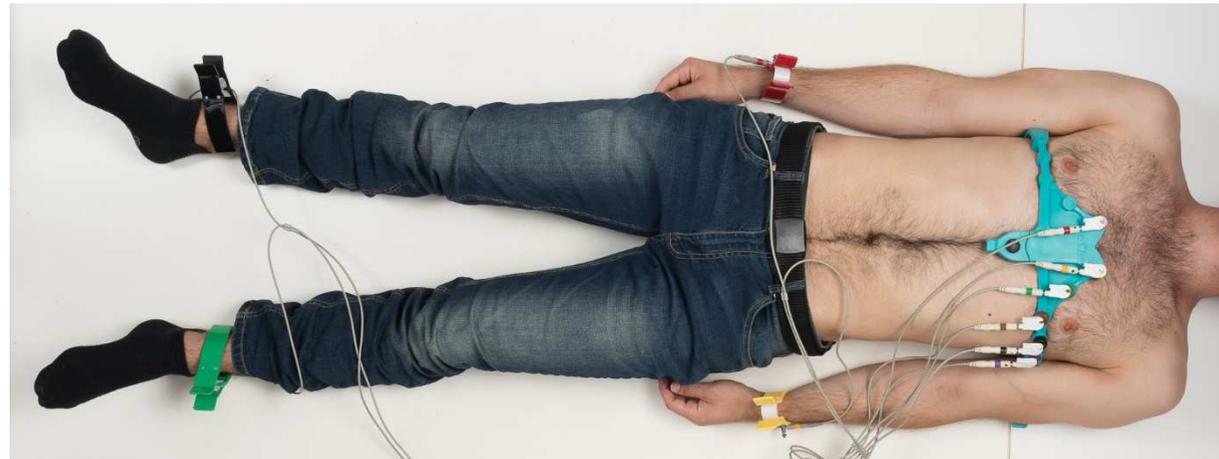


**Verificare che il paziente sia rilassato e non abbia i muscoli contratti.**


**Invitare il paziente a restare immobile e a non parlare durante l'esame.**

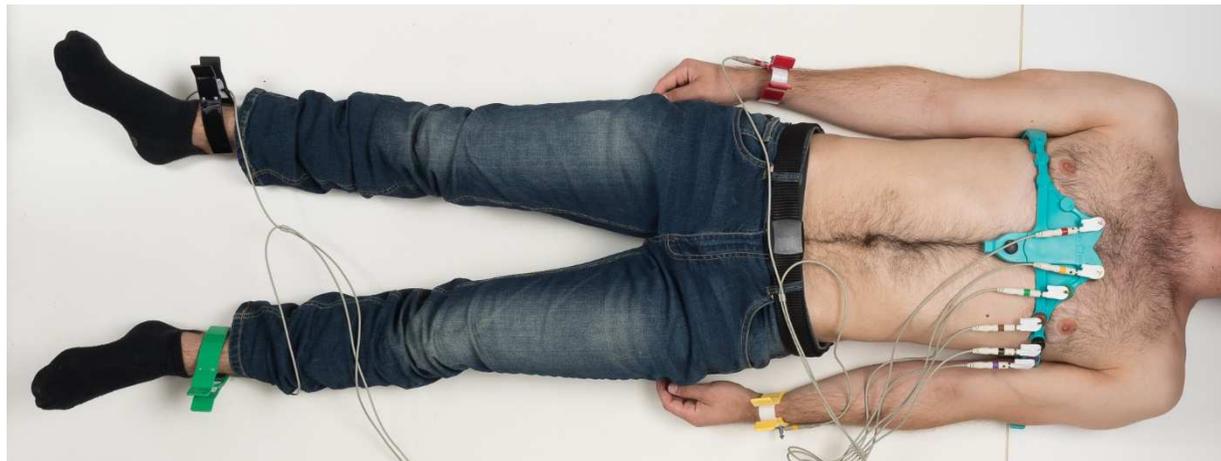

**Nota: in alcuni casi, è possibile eseguire la valutazione tenendo il paziente in posizione seduta:**

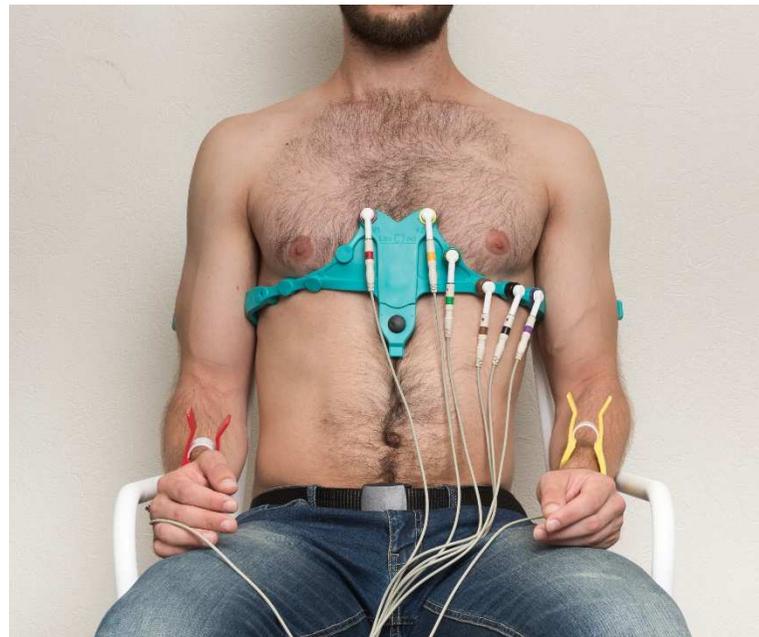

Premere il tasto **"Start"** sul dispositivo ECG per iniziare il rilevamento.

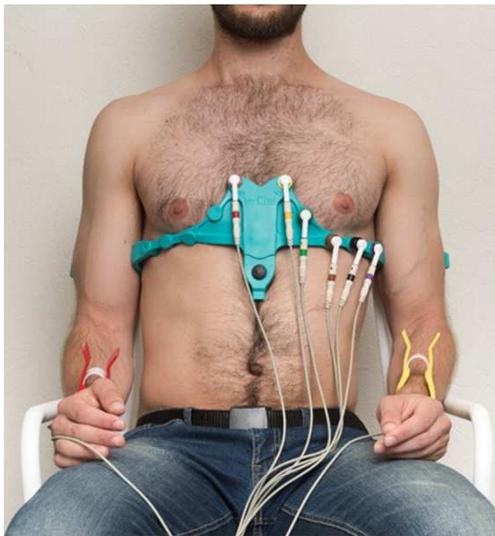

## Risoluzione dei problemi

**Se vengono visualizzati disturbi sul segnale ECG, verificare che:**

1. Tutti gli elettrodi siano stati inumiditi con acqua.
2. Tutti gli elettrodi aderiscano perfettamente alla pelle del paziente.
3. Il paziente sia rilassato e i muscoli non siano contratti.





**Grazie per aver utilizzato la fascia  
per ECG LevMed AllBrand™.**

Per ulteriori informazioni, scrivere all'indirizzo:

[info@levmed.net](mailto:info@levmed.net)

[www.levmed.net](http://www.levmed.net)