


**Attenersi alle istruzioni dettagliate
indicate di seguito:**

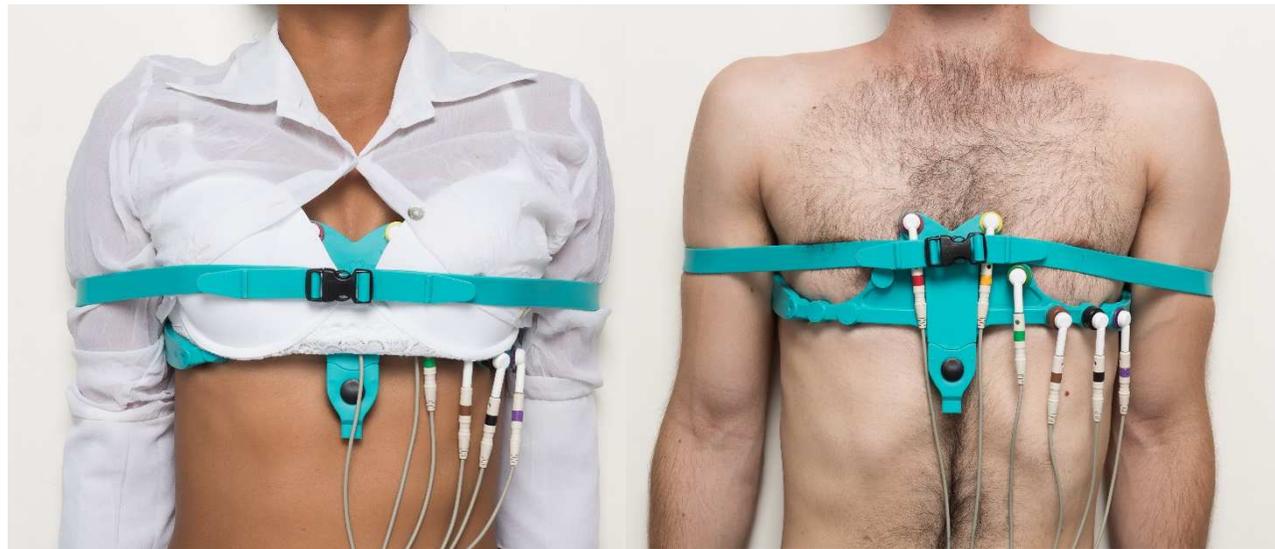

Fascia ECG LevMed AllBrand™ con cinghie

**Verificare che il cavo paziente ECG sia
collegato al dispositivo ECG.**

Verificare che le viti sulla fascia ECG siano correttamente serrate:



Collegare il cavo paziente ECG alle viti utilizzando il connettore a snap/coccodrillo:

Adattatore da banana a snap



Adattatore da banana a coccodrillo



*Se il cavo paziente ECG è dotato di connettori a banana, utilizzare gli adattatori da banana a snap o da banana a coccodrillo.


Collegare il cavo paziente ECG a ciascuno dei 4 morsetti:

Cavo paziente con connettore a banana:




1. Svitare la vite.
2. Inserire il connettore a banana.
3. Riavvitare la vite.

Cavo paziente snap/cocodrillo:


1. Riavvitare la vite.
2. Collegare lo snap/cocodrillo.

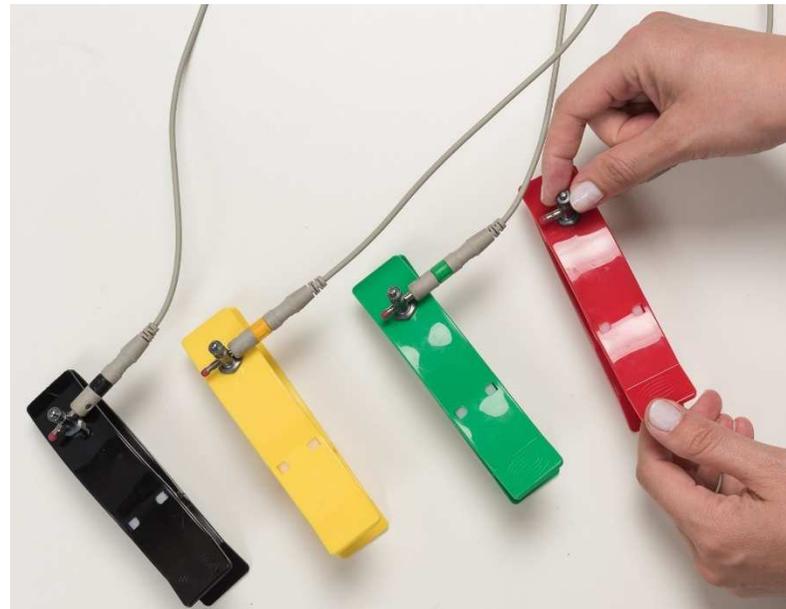

Aprire o rimuovere la maglia del paziente: (Nota: le fibbie della fascia ECG verranno serrate nella parte ANTERIORE del torace)

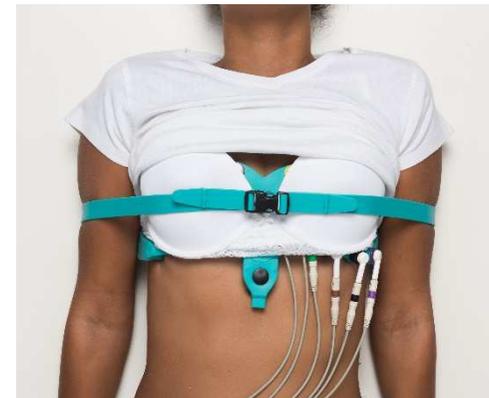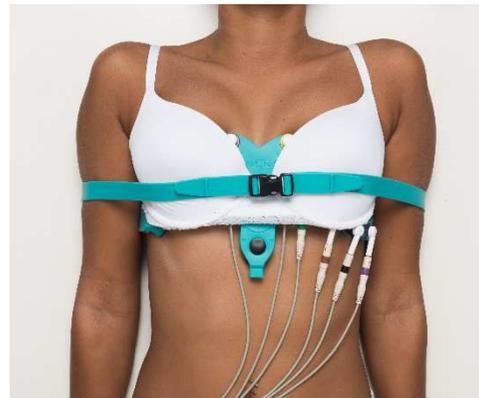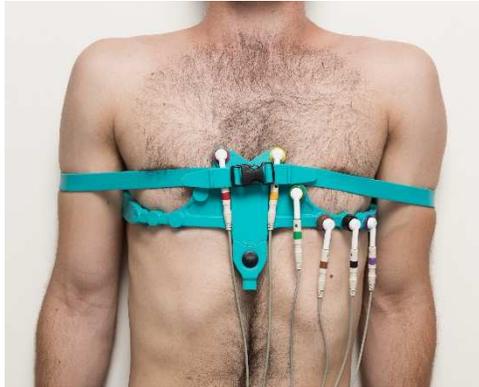


Inumidire i 6 elettrodi (V1-V6) con acqua corrente:

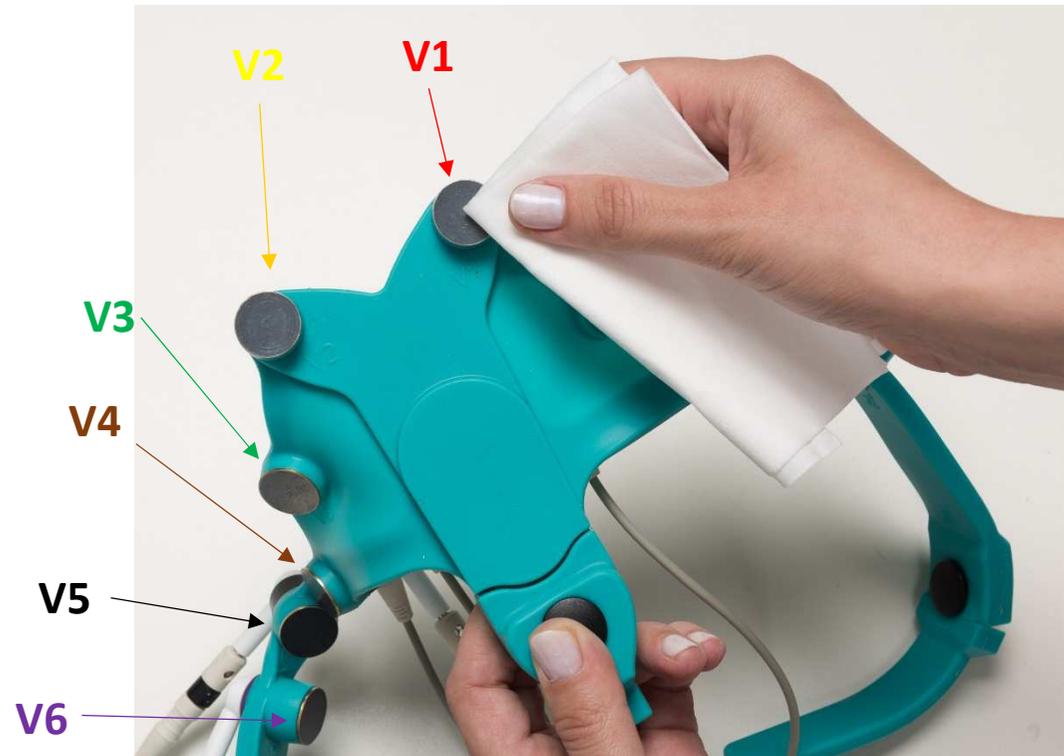


Se necessario, piegare V1 e V2 per garantire che l'elettrodo sia a contatto con il torace del paziente:




Una volta adagiato il paziente in posizione distesa, applicare la fascia sul torace in modo che V1 e V2 si trovino in posizione simmetrica sui due lati dello sterno:

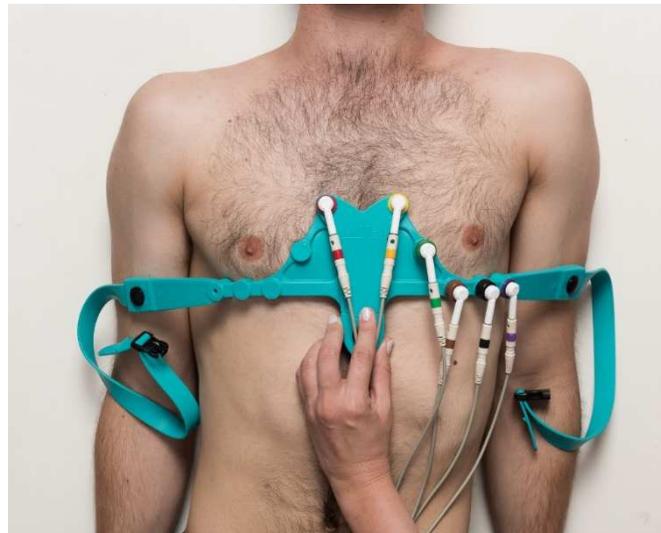


Nota: per i pazienti di sesso femminile, applicare la fascia sotto il reggiseno:

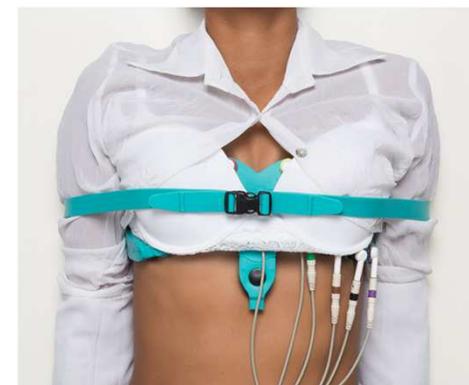


**Applicare una cinghia a metà braccio,
tra il gomito e la spalla,
quindi passarla al di sopra del braccio:**

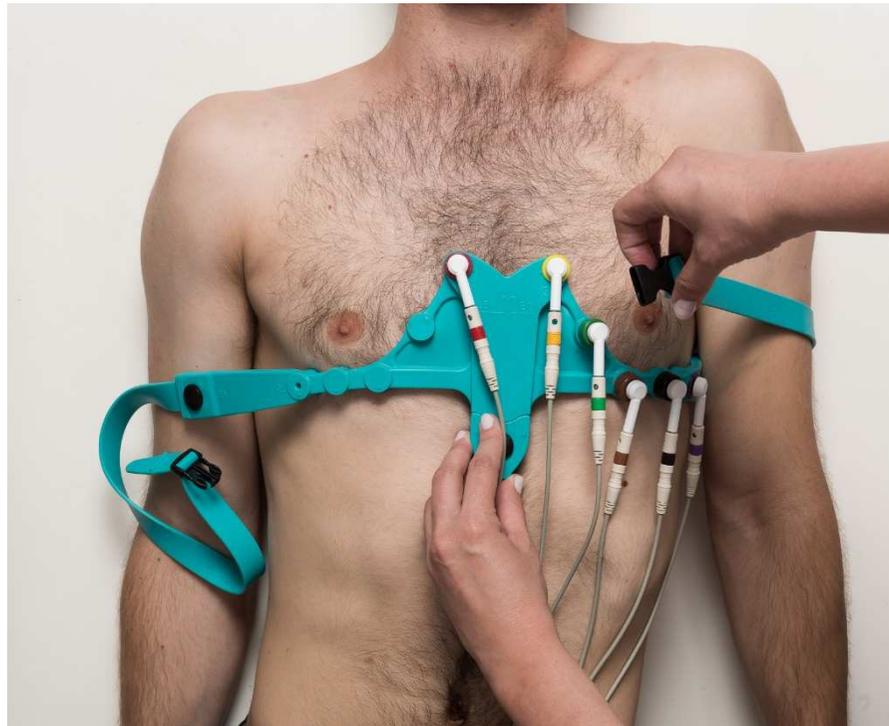


Applicare la seconda cinghia al di sotto e quindi al di sopra del secondo braccio:

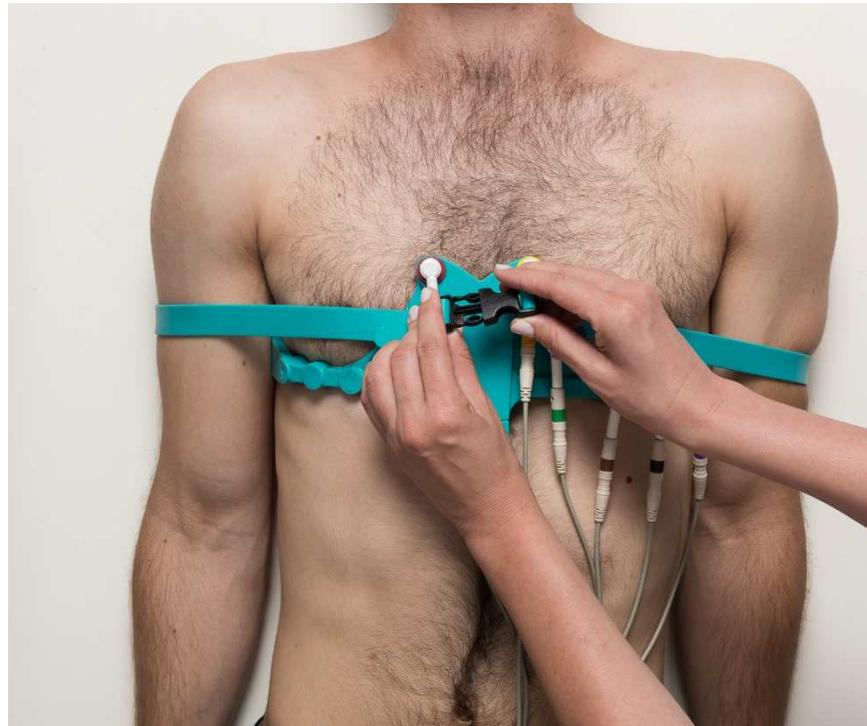


Chiudere le fibbie su V1 e V2:

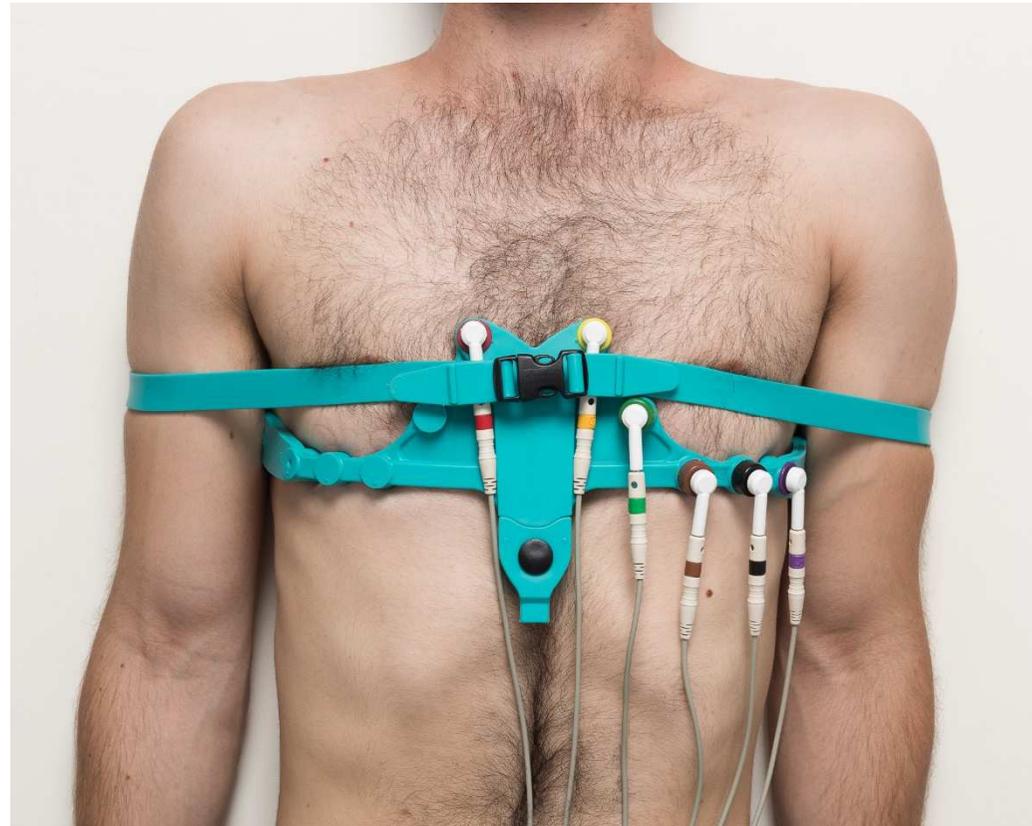

Se necessario, modificare la posizione delle fibbie sulle cinghie in modo da adattarsi alle dimensioni del torace del paziente:

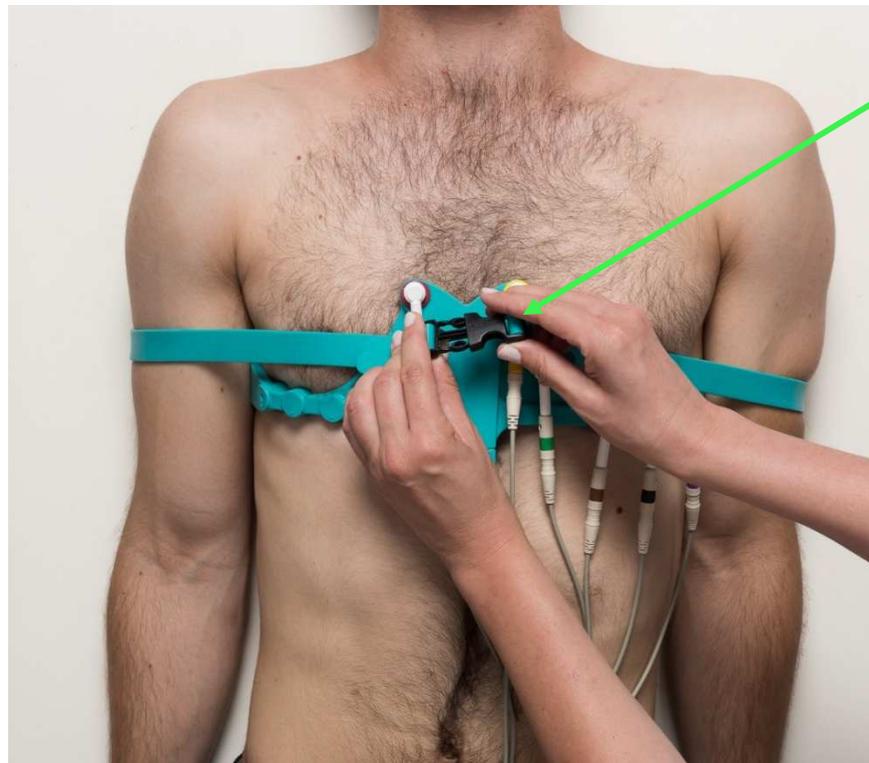


**Verificare che gli elettrodi V4, V5 e V6
si trovino sotto il petto:**

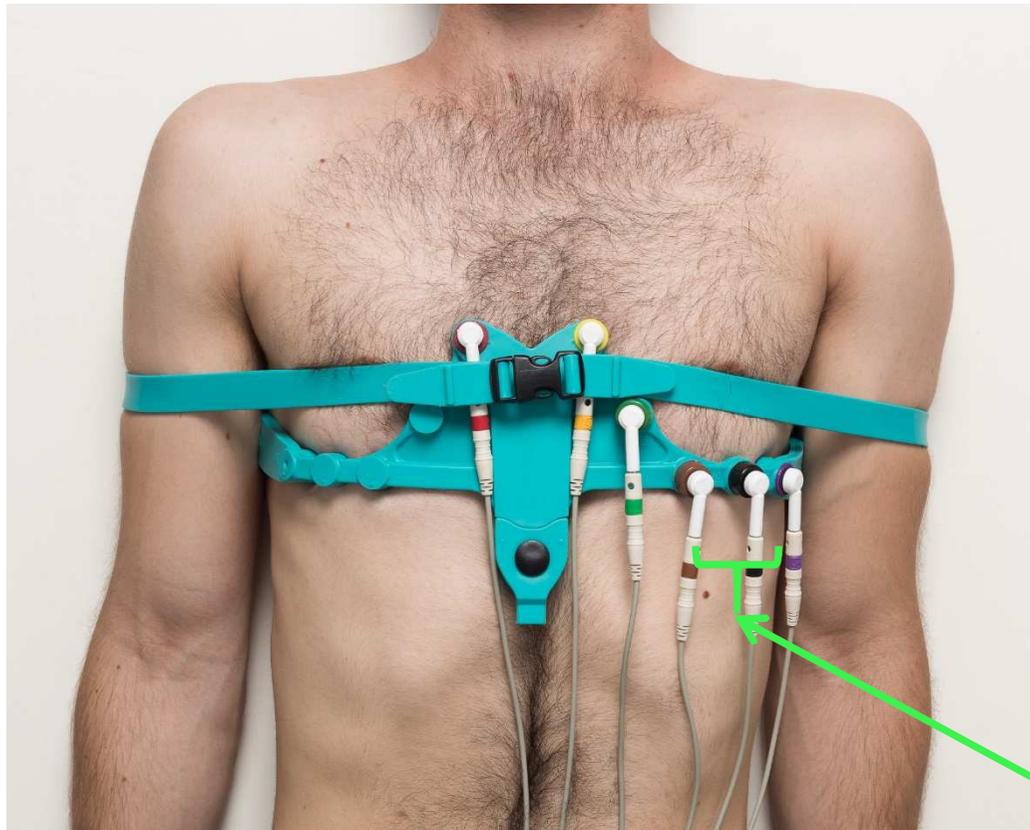


V4, V5, V6

Verificare che tutti i 6 elettrodi siano a contatto con la pelle del paziente:

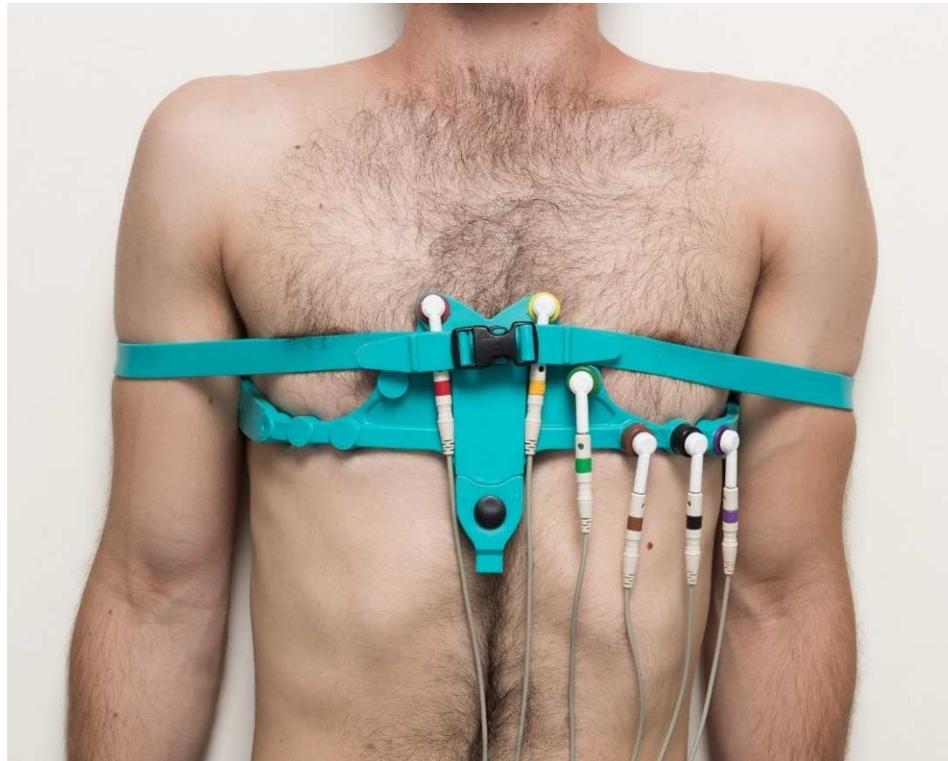

**Inumidire l'elettrodo su ciascuno dei 4 morsetti
con acqua corrente:**

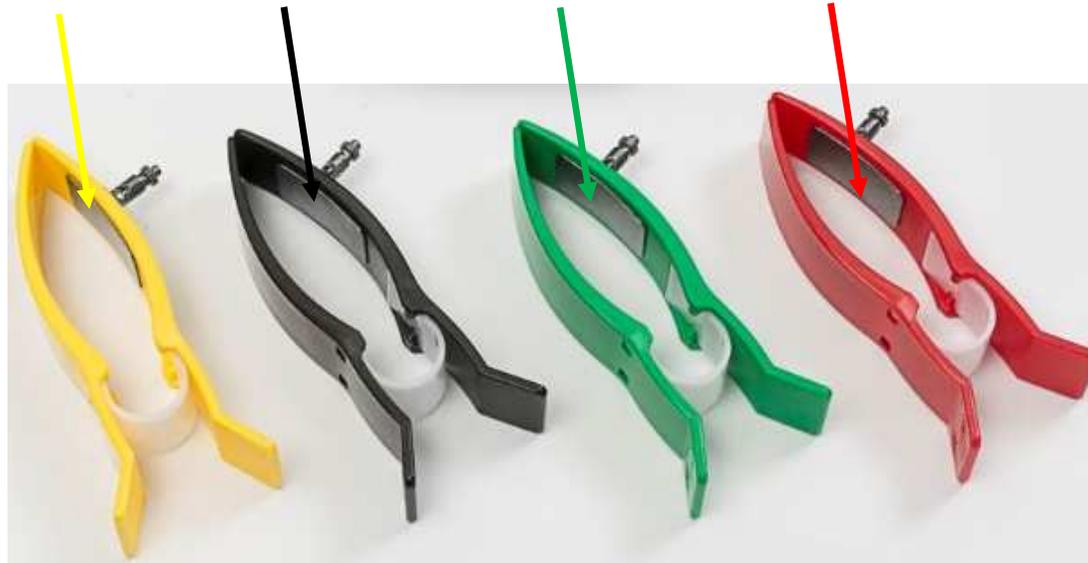

Applicare i morsetti sugli arti:

Rosso = braccio destro

Giallo = braccio sinistro

Verde = gamba sinistra

Nero = gamba destra




Verificare che il paziente sia rilassato e non abbia i muscoli contratti.



Invitare il paziente a restare immobile e a non parlare durante l'esame.



Nota: in alcuni casi, è possibile eseguire la valutazione tenendo il paziente in posizione seduta:

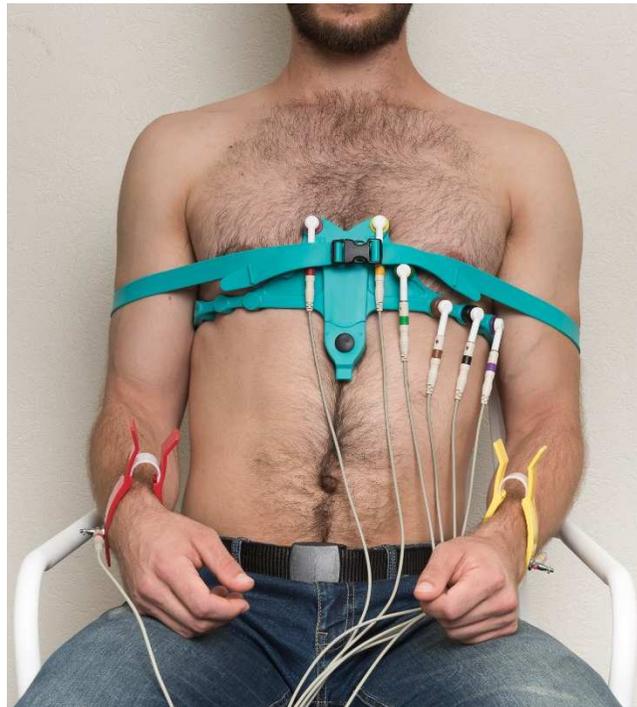

Premere il tasto **"Start"** sul dispositivo ECG per iniziare il rilevamento.

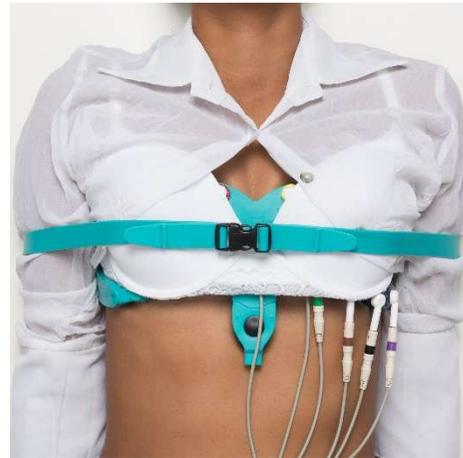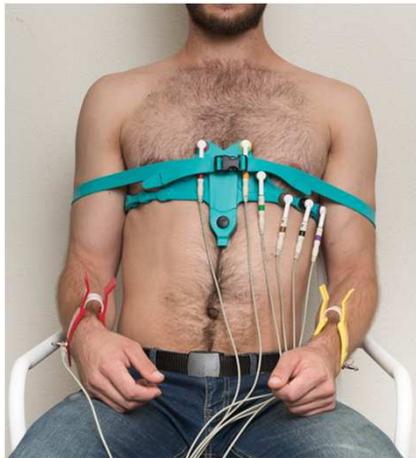

Risoluzione dei problemi

Se vengono visualizzati disturbi sul segnale ECG, verificare che:

1. Tutti gli elettrodi siano stati inumiditi con acqua.
2. Tutti gli elettrodi aderiscano perfettamente alla pelle del paziente.
3. Il paziente sia rilassato e i muscoli non siano contratti.





**Grazie per aver utilizzato la fascia
per ECG LevMed AllBrand™.**

Per ulteriori informazioni, scrivere all'indirizzo:

info@levmed.net

www.levmed.net