


Procedura del test

1 Preparazione del test

A. Materiale necessario:


Nota: per 1T e 5T il foro si trova sulla scatola del kit.

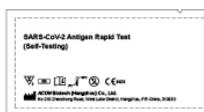

Cassetta del test



Provetta per la soluzione di estrazione

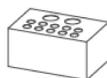


Supporto provetta (Solo per il pacchetto da 25T o BAG)



Foglietto illustrativo



Sacchetto rifiuti

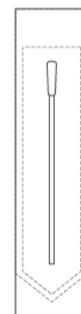


Tampone monouso

B. Lavare o sanificare le mani.



C. Leggere le istruzioni.

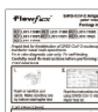

D. Verificare la data di scadenza.




E. Aprire la busta.




F. Controllare la cassetta.




2 Prelievo del campione

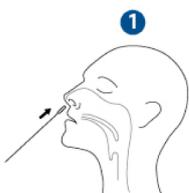

Inserire l'intera punta assorbente del tampone in una narice. Con una leggera rotazione, spingere il tampone a meno di 2,5 cm dal bordo della narice.

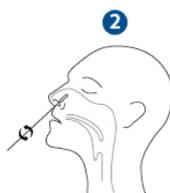

Ruotare il tampone 5 volte sfregando l'interno della narice.

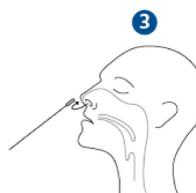


Estrarre il tampone e inserirlo nell'altra narice. Ripetere il passaggio 2.



Estrarre il tampone dalla narice.


3 Preparazione del campione

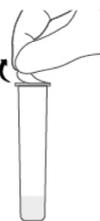


Rimuovere il foglio di alluminio.



Inserire il tampone nella provetta, ruotandolo per 30 secondi.

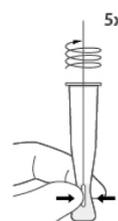

Ruotare 5 volte il tampone, premendo al tempo stesso i lati della provetta.

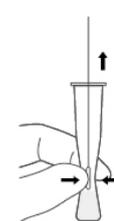

Estrarre il tampone tenendo premuta la provetta.

4 Esecuzione del test



4 gocce di campione trattato



Pozzetto per il campione



15-30 minuti



Negativo



Positivo



Non valido