

# THE GOLD STANDARD FOR RAPID TESTING OF MALARIA



# MALARIA ICT MALARIA P.f./P.v.




Vital Answers For  
Better Health... NOW™




FOR FURTHER INFORMATION: 207-772-3988

WEB ADDRESS: WWW.BINAX.COM

## Test Procedure

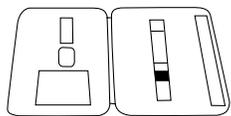


1. Estrarre la card dalla busta e disporla sul piano di lavoro.

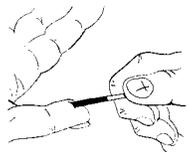

2. Prelevare il campione di sangue dal polpastrello o dal lobo dell'orecchio usando l'apposito capillare con EDTA.


NOTA: Può essere usato anche sangue venoso.

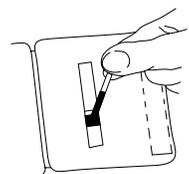


3. Applicare il sangue nella zona **VIOLA della striscia**.




4. Applicare due gocce di Reagente A nella zona bianca della striscia sotto dove è stato applicato il campione.

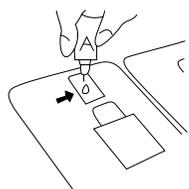

5. Applicare quattro gocce di Reagente A nella zona bianca posta nella parte sinistra della test card.

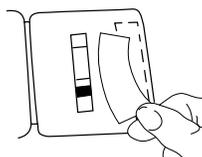

6. Togliere la protezione della zona adesiva.

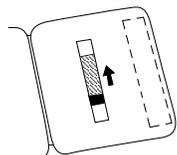

7. Lasciare migrare il sangue lisato fino alla fine della striscia.



8. Chiudere la Card. Attendere 15 minuti.



9. Leggere il risultato nell'apposita finestra.

**Per le istruzioni dettagliate consultare sempre la metodica inserita nel kit.**

**PROMESAN srl.**

Via B. Eustachi, 36 - 20129 MILANO

tel. 02.2774131 - fax. 02.27741323 • Email: [info@promesan.it](mailto:info@promesan.it) - [www.binax.com](http://www.binax.com)

*Easy-To-Use*

*Rapid*

*Accurate*

*Convenient*

*Cost-Effective*

### Informazioni per l'ordine:

Binax NOW® ICT Malaria P.f./P.v.  
è disponibile in confezioni da 25 tests. Distributore esclusivo per l'Italia:

**Promesan srl**

Via B. Eustachi, 36

20129 Milano

tel.: 02.2774131 - fax: 02.27741323

# malaria

**binax™**

*Vital Answers For  
Better Health...NOW™*