



GIMA

ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
Italia: tel 199 400 401 - fax 199 400 403 - gima@gimaitaly.com
Export: phone + 39 02 953854209/221/225 - fax + 39 02 95380056
- export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

MANUALE UTENTE

NOME PRODOTTO:

Catetere monouso in silicone 100%.











DESTINAZIONE D'USO:

Drenaggio urinario.

INDICAZIONI D'USO:

Aprire la confezione, estrarre il catetere Foley e connettere il tubo di raccordo alla sacca di raccolta, in seguito lubrificare il catetere, introdurlo lentamente nel meato uretrale e proseguire l'introduzione fino alla fuoriuscita dell'urina. Gonfiare il palloncino di ancoraggio con soluzione fisiologica, fino a percepire resistenza in modo che il palloncino si ancori al collo della vescica. Fissare il catetere, sostituirlo dopo sette giorni.

SIMBOLI:

Simbolo	Definizione del simbolo
	Leggere attentamente le istruzioni per l'uso
	Il prodotto è conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici
	Numero di lotto
	Indirizzo fabbricante
	Codice prodotto
	Non esporre ai raggi solari
	Teme l'umidità
	Monouso
	Non utilizzare nel caso la confezione sia danneggiata
	Sterilizzato a ossido di etilene

SMALTIMENTO

Il prodotto deve essere smaltito in base alle leggi nazionali. In caso di smaltimento errato potrebbero venire applicate delle sanzioni.



Jiangsu Suyun Medical Materials co., Ltd.
No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, 222002 Lianyungang, P.R.C.



Shanghai International Trading Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse, 80, D-20537, Hamburg, Germany

Rev. 0.02.16