



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## STAMPELLE - CRUTCHES - BÉQUILLES - KRÜCKEN MULETAS - MULETAS - ΔΕΚΑΝΙΚΙΑ - الميزات

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

### AVVERTENZE

Le stampelle devono essere utilizzate impugnandole correttamente e solo per sostenere il corpo (per un carico massimo di 100 Kg) sotto prescrizione medica. Le stampelle devono essere regolate in modo adeguato all'uso e alla fisionomia del paziente seguendo le indicazioni del medico curante.

Prima dell'uso controllare che le stampelle non siano danneggiate, che le regolazioni siano correttamente fissate e che i puntali in gomma antiscivolo non siano consumati e in caso contrario sostituirli immediatamente. Prestare la massima attenzione quando le stampelle vengono utilizzate su superfici bagnate o inclinate.

### REGOLAZIONE

#### Stampelle ad avambraccio Cod. 27793

L'altezza può essere regolata tra 96 e 119 cm premendo il fermo e avendo cura di farlo scattare nel foro desiderato. La vite di giunzione serve per evitare giochi tra i due tubi e deve essere avvitata solo a fermo inserito.

#### Stampelle ascellari Cod. 27798

L'altezza può essere regolata tra 112 e 132 cm premendo il fermo e avendo cura di farlo scattare nel foro desiderato. È inoltre possibile regolare la distanza tra l'appoggio ascellare e l'impugnatura: svitare il dado a farfalla e sfilare la vite dall'impugnatura, inserire la vite nel foro desiderato e fissare riavvitando il dado a farfalla.

#### Stampelle ascellari Cod. 27792

L'altezza può essere regolata tra 95 e 115 cm premendo il fermo e avendo cura di farlo scattare nel foro desiderato. È inoltre possibile regolare la distanza tra l'appoggio ascellare e l'impugnatura: svitare il dado a farfalla e sfilare la vite dall'impugnatura, inserire la vite nel foro desiderato e fissare riavvitando il dado a farfalla.

#### Stampelle ascellari Cod. 27799

L'altezza può essere regolata tra 119 e 139 cm premendo il fermo e avendo cura di farlo scattare nel foro desiderato. È inoltre possibile regolare la distanza tra l'appoggio ascellare e l'impugnatura: svitare il dado a farfalla e sfilare la vite dall'impugnatura, inserire la vite nel foro desiderato e fissare riavvitando il dado a farfalla.

#### Stampelle ascellari Cod. 27770

L'altezza può essere regolata tra 100 e 130 cm premendo il fermo e avendo cura di farlo scattare nel foro desiderato. È inoltre possibile regolare la distanza tra l'appoggio ascellare e l'impugnatura: svitare il dado a farfalla e sfilare la vite dall'impugnatura, inserire la vite nel foro desiderato e fissare riavvitando il dado a farfalla.

	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Fabbricante	<b>REF</b>	Codice prodotto
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Conservare al riparo dalla luce solare	<b>LOT</b>	Numero di lotto
	Leggere le istruzioni per l'uso		Conservare in luogo fresco ed asciutto	<b>MD</b>	Dispositivo medico



### يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زدونا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها

#### العكازات

اقرأ هذا النليل بعناية قبل استخدام العكازات.

يجب استخدام العكازات من خلال إمساكها بشكل صحيح ولدعم الجسم فقط (الحمولة قصوى قدرها 100 كجم) بموجب وصفة طبية. لا بد من ضبط العكازات بطريقة مناسبة للاستخدام والمواصفات الجسدية للمريض مع اتباع تعليمات الطبيب المعالج.

قبل الاستخدام تأكد من أن العكازات ليست تالفة، وأن الضوابط لم تم تثبيتها بشكل صحيح، وأن أطراف العماط المقاومة للانزلاق ليست مستهلكة وإلا فيجب استبدالها على الفور. توخي أقصى الحرص عند استخدام العكازات على الأسطح المبللة أو المنحدرة.

#### الضبط:

#### عكازات المساعد، كود 27793

يمكن ضبط الارتفاع بين 96 و 119 سم بالضبط على المزلاج والحرص على جعله بلج في الثقب المرغوب. يتم استخدام برغي الوصلة لمنع التفريق بين الأنبوبين ويجب إحكام ربطه فقط عند تشغيل المزلاج.

#### عكازات الإبطين، كود 27798

يمكن ضبط الارتفاع بين 112 و 132 سم بالضبط على المزلاج والحرص على جعله بلج في الثقب المرغوب. ومن الممكن أيضاً ضبط المسافة بين دعامة الإبطين والمقبض: فك الصامولة للفراشة وأزل البرغي من المقبض ثم أدخل البرغي في الثقب المطلوب وثبته عن طريق ربط الصامولة.

#### عكازات الإبطين، كود 27792

يمكن ضبط الارتفاع بين 95 و 115 سم بالضبط على المزلاج والحرص على جعله بلج في الثقب المرغوب. ومن الممكن أيضاً ضبط المسافة بين دعامة الإبطين والمقبض: فك الصامولة للفراشة وأزل البرغي من المقبض ثم أدخل البرغي في الثقب المطلوب وثبته عن طريق ربط الصامولة.

#### عكازات الإبطين، كود 27799

يمكن ضبط الارتفاع بين 119 و 139 سم بالضبط على المزلاج والحرص على جعله بلج في الثقب المرغوب. ومن الممكن أيضاً ضبط المسافة بين دعامة الإبطين والمقبض: فك الصامولة للفراشة وأزل البرغي من المقبض ثم أدخل البرغي في الثقب المطلوب وثبته عن طريق ربط الصامولة.

#### عكازات الإبطين، كود 27700

يمكن ضبط الارتفاع بين 100 و 130 سم بالضبط على المزلاج والحرص على جعله بلج في الثقب المرغوب. ومن الممكن أيضاً ضبط المسافة بين دعامة الإبطين والمقبض: فك الصامولة للفراشة وأزل البرغي من المقبض ثم أدخل البرغي في الثقب المطلوب وثبته عن طريق ربط الصامولة.

يحتفظ بعيداً عن أشعة الشمس		جهاز طبي يتوافق مع التوجيه (UE) 2017/745	
يحتفظ في مكان بارد وجاف		الحدري: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية	
كود المنتج		اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام	
رقم الدفعة		الشركة المصنعة	
		جهاز طبي	

**REF** 27793 - 27798 - 27792  
27799 - 27770

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)  
Made in China

