



**PAPEIS DE REGISTO PARA
DISPOSITIVOS MÉDICOS -
INSTRUÇÕES**

Aplicação: papel para uso médico destina-se a imprimir traçados de parâmetros fisiológicos de equipamentos médicos durante a análise de diagnóstico.

ação está reservada apenas aos operadores médicos e paramédicos autorizados e com competências em equipamentos médicos. Identificação do Produto: código do dispositivo, LOTE e marca estão na etiqueta de identificação, na embalagem externa

Uso e instalação:

- ✓ Antes de utilizar este dispositivo médico, verificar sempre o tamanho do papel e da grelha do papel (se houver) são as correctas para o instrumento.
- ✓ Evitar o uso de ferramentas de corte na abertura de embalagens
- ✓ Consultar sempre as instruções sobre a utilização do instrumento antes de utilizar este dispositivo médico
- ✓ Papel (rolo ou forma de Z) tem que ser colocado à vontade no suporte do papel dos instrumentos para não dificultar o desenrolar do papel. Nunca forçar a introdução do papel no instrumento!
- ✓ A grelha, se houver, e salvo qualquer indicação em contrário, use a unidade mm e precisão $\pm 1\%$.

Condições de armazenamento:

- ✓ **Antes do uso,** guarde o papel em um lugar fresco e seco.

Exposições longas em condensação e temperatura mais altas ou mais baixas que as indicadas no rótulo podem causar efeitos adversos ao papel.

Evitar a exposição à luz solar directa, luzes brilhantes (UV)

- ✓ **Após o registo,** para garantir a preservação de gravação a longo prazo:

Armazene o papel em um lugar fresco e seco após o uso.

Evitar a exposição à luz solar directa, luzes brilhantes (UV).

Evitar qualquer contacto com líquidos e solventes, como álcool, acetona ou similar.

Evitar qualquer contacto com outro tipo de químicos e papel térmico.

Não colocar o papel em envelopes em PVC, mas usar envelopes apropriados.

Eliminação de Resíduos

A utilização, armazenamento e eliminação do papel não causam poluição ambiental.

A eliminação dos papéis pode ser feita nos contentores apropriados para reciclagem.

A inflamabilidade deste produto é similar à do papel normal não revestido. Para extinguir os incêndios acidentais deste produto utilize água ou um extintor normal de incêndio.

Contra indicações: Com base em experiências anteriores e diversos resultados de análises, a utilização correcta do produto não pode causar qualquer efeito nocivo.

RELATÓRIOS:

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

- ✓ **Преди употреба,** съхранявайте хартията в проветриви и

