

Informação sobre o produto

Perfuradores de biópsia descartáveis Kai



Perfuradores de biópsia descartáveis

- Lâminas tubulares de aço inoxidável sem costura com pega em polipropileno, com e sem êmbolo.
- Pega com nervuras para manuseamento e controle seguros
- Identificação do tamanho em cada perfurador
- Usado maioritariamente para corte, dissecação e/ou enchimento de tecido.
- Os perfuradores estão esterilizados e são de uso único.
- Áreas clínicas: dermatologia, ginecologia e podologia.

Tamanhos:

BP-10F	1.0mm	◦	BP-35F	3.5mm	○
BP-15F	1.5mm	◦	BP-40F	4.0mm	○
BP-20F	2.0mm	○	BP-50F	5.0mm	○
BP-25F	2.5mm	○	BP-60F	6.0mm	○
BP-30F	3.0mm	○	BP-80F	8.0mm	○

Comprimento da lâmina: 7mm

Embalagem: cada perfurador encontra-se numa embalagem alveolar, 20 unidades estão numa caixa distribuidora e estão disponíveis 50 caixas por cada caixote de exportação.

Manuseamento seguro

- Armazene quaisquer novos produtos num local seco, limpo e seguro.
- Evite temperaturas altas, humidade elevada, luz solar direta e imersão em água, conservando à temperatura ambiente.
- Não conserve num local com produtos químicos ou com gás.
- É necessário confirmar o prazo de validade em cada embalagem e caixa (5 anos de período de armazenamento).
- Após confirmar o prazo de validade em cada pacote e a caixa, descarte os produtos cujo prazo já tenha sido ultrapassado.
- Antes de cada utilização, verifique se o produto possui: componentes soltos, tortos, quebrados, rachados, desgastados ou fraturados.
- Não utilize o produto se estiver danificado ou defeituoso. Ponha de lado o produto se estiver danificado.
- Reutilização proibida
- Reesterilização proibida
- Não use após a data limite de validade
- Não use se considerar que a condição assética dos produtos está comprometida pela embalagem quebrada.
- Verifique se a embalagem está intacta ou perfurada antes de a abrir.



kai industries co.ltd, 1110 Oyana, Seki City, Gifu Pref., 501-3992, Japan



kai Europe GmbH, Kottendorfer Straße 5, 42697 Solingen, Germany

CE 0197

O produto respeita os requisitos da diretiva 93/42CEE