



PINZAS DE ASTILLA

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

Dispositivos

Pinzas para garrapatas (no estériles, de acero inoxidable).

Descripción

El producto está fabricado con acero inoxidabl. El producto debe utilizarse únicamente para el fin previsto mencionado en la ficha técnica.

Advertencias

Nunca:

- Utilice incorrectamente los instrumentos ni fuerce en exceso las articulaciones ni los bastidores.
- El uso de abrasivos en los instrumentos estropeará el acabado de la superficie. Esto puede causar posteriormente decoloración, oxidación o picaduras.
- Maneje los instrumentos por las puntas. Estas solo deben ser limpiadas por personal capacitado, que se asegurará de que las puntas de trabajo delicadas estén adecuadamente protegidas durante el almacenamiento o la esterilización.
- Embale los instrumentos con otros más pesados. Acuérdese siempre de poner los instrumentos pesados en el fondo y los ligeros en la parte superior.
- Utilice aceites de uso general para los instrumentos; solo deben utilizarse lubricantes solubles en agua.
- Deje los instrumentos en remojo más tiempo del necesario en las soluciones químicas de esterilización. Una vez esterilizados, deben lavarse a fondo en agua tibia para eliminar todos los restos de los productos químicos y evitar que se decoloren o queden marcados.
- Almacene los instrumentos húmedos. Antes deben secarse a fondo.

Instrucciones

Siempre:

- Compruebe todas las instrucciones de uso y esterilización de los instrumentos nuevos. A menos que se indique lo contrario, deben ser inspeccionados, limpiados, enjuagados y lubricados antes de ser utilizados.
- Lubrique después de la limpieza con un lubricante para instrumentos soluble en agua patentado.
- Siga el procedimiento de limpieza aprobado por el hospital.
- No utilice productos de limpieza corrosivos. Recomendamos el uso de soluciones de limpieza y enjuagues con ph 7,0.
- No utilice limpiadores abrasivos ni cepillos de cerdas duras.
- Utilice solo agua destilada para el enjuague. El agua que contiene cloruro puede dañar o incluso destruir los instrumentos.
- No deje los instrumentos en las soluciones de limpieza o desinfección durante mucho tiempo (durante la noche o el fin de semana), ya que de hacerlo puede destruirlos.
- Asegúrese de que los instrumentos se utilicen únicamente para el fin para el que fueron diseñados.
- Maneje todos los instrumentos con cuidado. No los fuerce en exceso ni los deje caer, ni los utilice de forma incorrecta.
- Compruebe si los instrumentos se han dañado con el uso.
- Asegúrese de que todos los instrumentos estén bien secos antes de guardarlos.
- Embale los instrumentos con cuidado, colocando los más pesados sobre un trozo de tela o toalla y en el fondo.
- Compruebe la dureza del agua utilizada en el autoclave. El agua demasiado dura dejará un depósito en los instrumentos.
- Si se utiliza un ablandador de agua, asegúrese de que está en el nivel recomendado por el fabricante. Un exceso de ablandador puede causar decoloración o marcas.

Limpieza y desinfección

Antes de la limpieza preliminar, elimine toda la suciedad (restos de material biológico como huesos, tejidos o polvo, etc.) utilizando toallitas higiénicas desechables, toallas de papel o cepillos con fibras plásticas no naturales (por ejemplo, níquel).

Esterilización













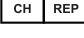
Los instrumentos deben ser esterilizados por el método de esterilización mediante calor húmedo, aplicando una temperatura de 274°F (134°C) durante 3 minutos máximo 50 ciclos.

Eliminación

No se requiere ninguna descomposición ni eliminación especial para los instrumentos quirúrgicos, ya que no contienen ningún material tóxico o peligroso; el material de acero inoxidable se puede reciclar en unidades ordinarias de fabricación de acero.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

	<b>IT</b> Codice prodotto <b>GB</b> Product code <b>FR</b> Code produit <b>ES</b> Código producto		<b>IT</b> Fabbricante <b>GB</b> Manufacturer <b>FR</b> Fabricant <b>ES</b> Fabricante		<b>IT</b> Non sterile <b>GB</b> Non-sterile <b>FR</b> Pas stérile <b>ES</b> No estéril		<b>IT</b> Dispositivo medico <b>GB</b> Medical Device <b>FR</b> Dispositif médical <b>ES</b> Producto sanitario
	<b>IT</b> Leggere le istruzioni per l'uso <b>GB</b> Consult instructions for use <b>FR</b> Consulter les instructions d'utilisation <b>ES</b> Consultar las instrucciones de uso		<b>IT</b> Conservare al riparo dalla luce solare <b>GB</b> Keep away from sunlight <b>FR</b> À conserver à l'abri de la lumière du soleil <b>ES</b> Conservar al amparo de la luz solar		<b>IT</b> Conservare in luogo fresco ed asciutto <b>GB</b> Keep in a cool, dry place <b>FR</b> À conserver dans un endroit frais et sec <b>ES</b> Conservar en un lugar fresco y seco		<b>IT</b> Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso <b>GB</b> Caution: read instructions (warnings) carefully <b>FR</b> Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) <b>ES</b> Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	<b>IT</b> Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 <b>GB</b> Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 <b>FR</b> Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 <b>ES</b> Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745				<b>IT</b> Numero di lotto <b>GB</b> Lot number <b>FR</b> Numéro de lot <b>ES</b> Número de lote		<b>IT</b> Data di fabbricazione <b>GB</b> Date of manufacture <b>FR</b> Date de fabrication <b>ES</b> Fecha de fabricación
	<b>IT</b> - Identificatore univoco del dispositivo <b>GB</b> - Unique device identifier <b>FR</b> - Identifiant unique de l'appareil <b>ES</b> - Identificador de dispositivo único				<b>IT</b> - Rappresentante autorizzato in Svizzera <b>GB</b> - Authorized Representative in Swiss <b>FR</b> - Représentant autorisé au Suisse <b>ES</b> - Representante autorizado en Suizo		

REF 24390

CH REP Medicare AG, Hauptstr. 51  
5024 Küttigen, Schweiz  
CHRN-AR-20002506

 **Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
**www.gimaitaly.com**  
Made in Pakistan

