


1. Leva per la regolazione della testiera.

1. Lever for adjustment head section.

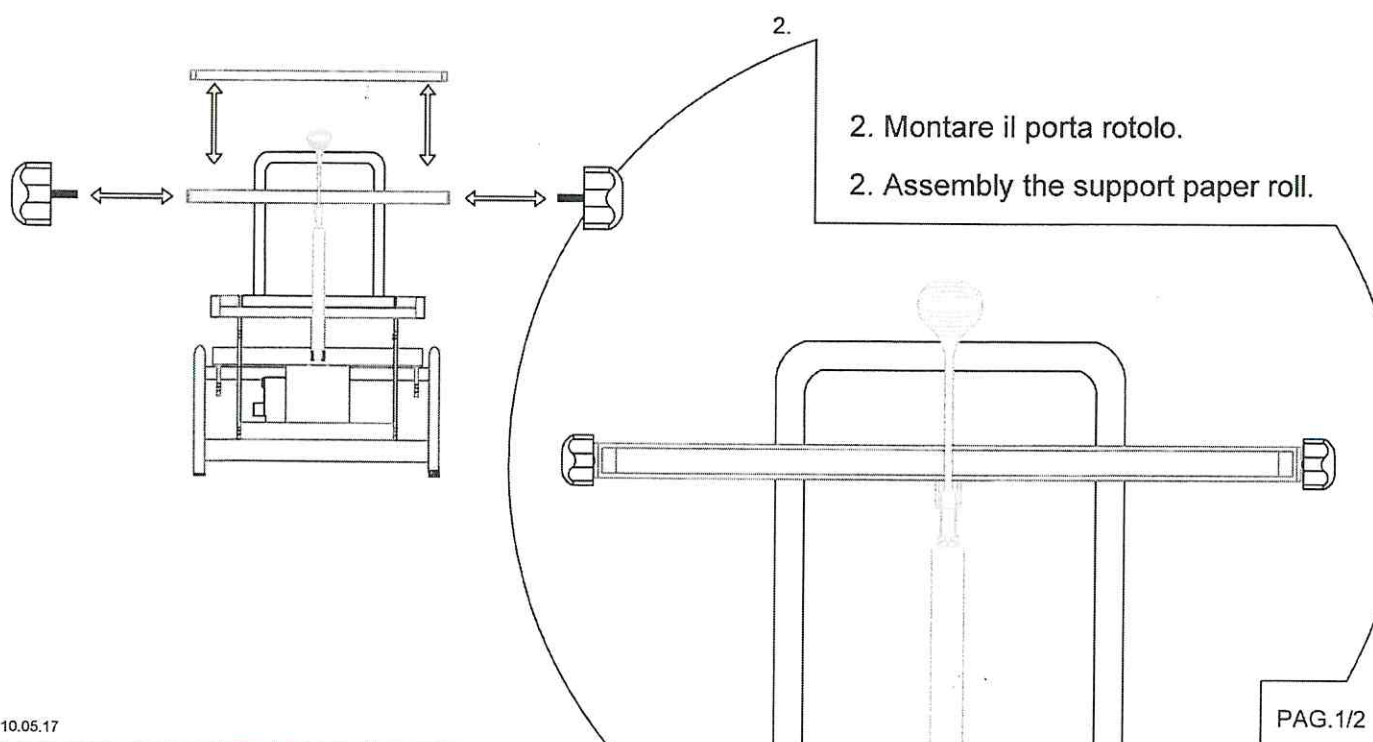

2. Montare il porta rotolo.

2. Assembly the support paper roll.





1. PZ.



2. PZ.



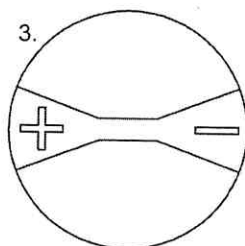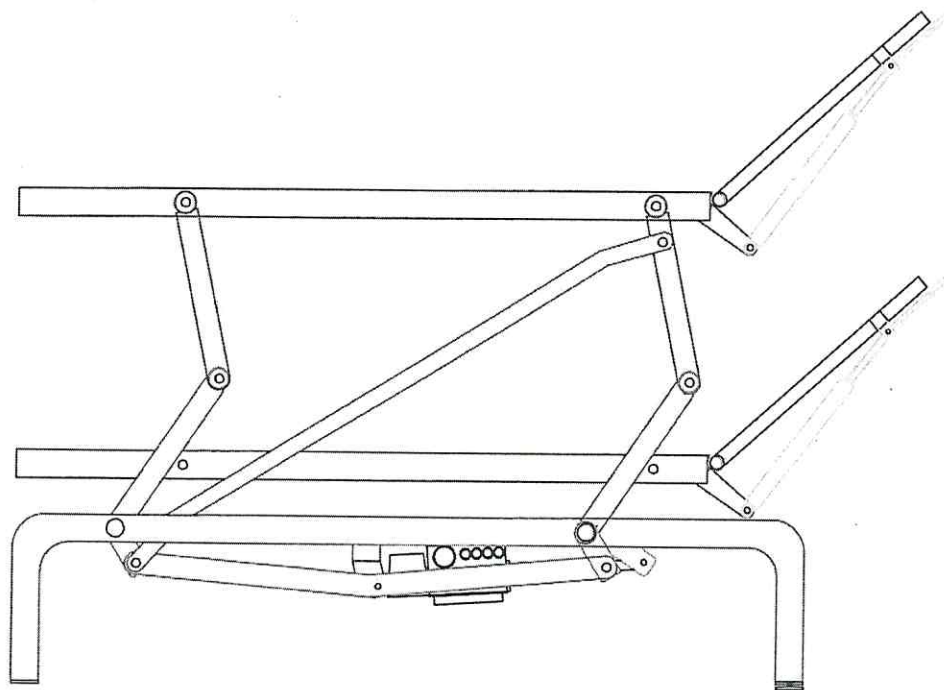

3. Pedaliera per la regolazione in altezza.


3. Pedal for the height adjustment.

MANUTENZIONE:

per la pulizia utilizzare i comuni detergenti neutri presenti in commercio.


MAINTENANCE:

clean with mild detergents.

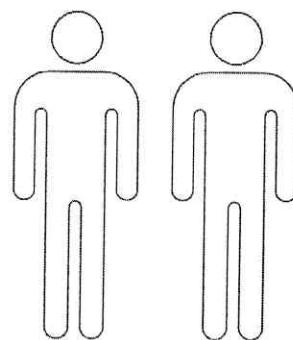

MANUALE UTENTE USER MANUAL


CALDARA

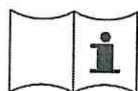

LIMITAZIONI D'USO E AVVERTENZE PARTICOLARI:

la struttura NON deve essere utilizzata :

- in atmosfera a rischio d'incendio, esplosiva o corrosiva
- esposto alle intemperie
- con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale
- non inserire parti del corpo nelle parti soggette a movimento e/o regolazione
- la struttura deve essere utilizzata in situazione di buona stabilità su di una superficie piana
- mantenere saldamente ferma la struttura durante il carico e scarico del paziente per evitare ogni tipo di rischio
- lampade irradianti terapeutiche possono danneggiare il piano imbottito
- prodotti detergenti corrosivi possono danneggiare l'imbottitura

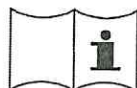


SPECIAL WARNINGS AND LIMITATIONS OF USE:

the structure must NOT be used:

- used in environment with risk of fire, explosive or corrosive area
- exposed to severe weather conditions
- tampered with and/or modifications must be made to original product
- do not put parts of the body in areas subject to movement and/or adjustments

the structure must be used in conditions of stability and on flat surface

- keep bed still while moving patient on and of bed to avoid any risk
- the lamps used for therapeutic irradiation can damage the upholstery imitation leather
- corrosive and/or abrasive detergents can damage upholstery imitation leather

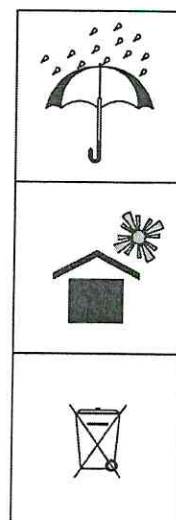

CALDARA SRL NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER INCIDENTI DERIVATI DA UN USO IMPROPRIO DELL'ATTREZZATURA IN OGGETTO.
CALDARA SRL DISCLAIMS ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF ACCIDENTS DUE TO WRONG USE.

rev. 27.05.17

PAG. 1/1



MADE IN ITALY

CALDARA SRL VIA TRIESTE 31.B 22036 ERBA (COMO) ITALIA

WWW.CALDARASRL.IT

CALDARA