

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. CONSULTARE IL MEDICO PRIMA DELL'USO.**

**CONTROINDICAZIONI:** Non adatto a persone di peso superiore alle 242 libbre (110 kg). Non utilizzare in presenza di ghiaccio o in condizioni scivolose. - Non adatto a persone con allergie al lattice.

**ISTRUZIONI PER L'USO:** Per dispiegare il bastone, afferrare il manico e lasciare che i segmenti ripiegabili dell'asta del bastone si dispieghino verso il basso. Per prevenire il rischio di cadute, è necessario verificare sempre che i singoli segmenti dell'asta del bastone (Fig. 1) siano inseriti saldamente in posizione.

**AVVERTENZA** NON smontare il corpo del bastone. Il bastone contiene al suo interno una corda elastica; se questa viene rilasciata in modo incontrollato può causare gravi lesioni alle parti del corpo esposte, in particolare agli occhi. Se la corda elastica risulta tagliata, sfilacciata o danneggiata, interrompere l'utilizzo.

**COME REGOLARE L'ALTEZZA DEL BASTONE:** Allentare il meccanismo di bloccaggio a rotazione effettuando alcuni giri in senso orario.

Premere il pulsante di blocco e tirare il manico verso l'alto per allungarlo o verso il basso per accorciarlo. Dopo aver regolato il bastone all'altezza desiderata, ricordarsi di riavvitare il meccanismo di bloccaggio a rotazione.

**AVVERTENZA** Per evitare cadute, assicurarsi sempre che i singoli segmenti dell'asta del bastone siano saldamente bloccati in posizione e che il pulsante di blocco sia completamente emerso. Assicurarsi sempre che il piede girevole del bastone sia saldamente avvitato al bastone per evitare cadute.

**COME RPIEGARE IL BASTONE:** Il bastone può essere ripiegato in un comodo formato da viaggio separando i 4 segmenti dell'asta del bastone l'uno dall'altro. Impugnare ogni coppia di segmenti dell'asta del bastone vicino al punto di giunzione e separarli. I singoli segmenti dell'asta del bastone si ripiegheranno in modo ordinato.

**COME UTILIZZARE LE LUCI DEL BASTONE:** Il pulsante sulla parte superiore del manico del bastone accende le luci. Premendo il pulsante una volta si accenderà la luce frontale del bastone, premendolo di nuovo si accenderà anche la luce rossa alla base del manico, premendolo una terza volta tutte le luci si spegneranno. La luce frontale è orientabile in modo da indirizzare la luce dove è necessario.



**SEGNALE DI SOS:** Per attivare il segnale SOS, premere il pulsante presente sul lato del manico; la luce alla base lampeggerà e il bastone emetterà un suono di allarme.

**SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE:** Aprire il vano batterie sul retro del manico. Rimuovere le batterie scariche e smaltirle correttamente.

Sostituire con 2 batterie AAA, inserendole con la polarità corretta (polo positivo verso l'esterno, dove si trova la molla). Chiudere il coperchio del vano batterie. Ispezionare regolarmente il bastone per verificare la presenza di eventuali segni di usura, tra cui lo sfilacciamento della corda elastica o l'usura dei piedini in gomma. Se si riscontrano segni di usura, interrompere immediatamente l'utilizzo.

**AVVERTENZA** Non mischiare batterie nuove con quelle vecchie. Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichel-cadmio).

**TERMINI DI GARANZIA DI GIMA:** Si applica la garanzia Gima B2B standard di 12 mesi.

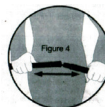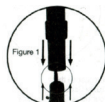

Gima 43050 - 43052

REF GB-806(1FOOT) GB-806(SKID PROOF)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/  
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/  
Tootja/Vaimistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/  
Geïfabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/  
Tilbered av/تصنيع بواسطة  
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd  
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County  
Ningbo 315514, China  
Made in China

Importato da/Imported by/importé par/importado por/importiert von/  
Importado por/Εισαγυγί από/Довезено от/Dovezeno od/Importat de/  
af/Importija/ Tuoja:/Uvezeno od strane/Importálta:/importēja/importavo/  
Importert av/Geïmporteerde door/importowane przez/importat de/Dovážal/  
Uvozi/importerad av/توريد بواسطة  
Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com

