

Mission®

Foglietto illustrativo della stampante

REF	C121-1021	Italiano
-----	-----------	----------

USO PREVISTO

La stampante *Mission®* è una stampante termica che può essere collegata ai misuratori di colesterolo *Mission®* e *Mission®* Ultra nonché ai misuratori PT/INR *Mission®* per stampare i risultati dei test. Il suo utilizzo è esclusivamente professionale.

PRECAUZIONI

- Non toccare il tagliacarta.
- Non toccare la testina della stampante né i relativi componenti onde evitare di ustionarsi o di danneggiare la stampante a causa dell'elettricità statica.
- Spegnere immediatamente l'apparecchio in presenza di fumo, di uno strano odore o di un rumore insolito. In caso contrario potrebbe divampare un incendio. Scollegare immediatamente l'apparecchio e rivolgersi immediatamente al proprio distributore di zona per ulteriore assistenza.
- Non smontare la stampante. Lo smontaggio della stampante potrebbe essere pericoloso e invalidare la garanzia.
- Accertarsi di utilizzare la fonte di alimentazione specificata. Il collegamento della stampante ad una fonte di alimentazione impropria potrebbe distruggere l'apparecchio e causare un incendio.
- Prestare attenzione ad evitare l'infiltrazione di liquidi o di altri residui all'interno della stampante. In caso di infiltrazione di acqua o di altri liquidi all'interno di questo apparecchio scollegare immediatamente il cavo di alimentazione. In caso contrario potrebbe divampare un incendio.
- Non collegare i cavi diversamente da come indicato nel presente manuale. Collegamenti diversi potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- Posizionare il presente apparecchio su una superficie orizzontale, stabile e solida. In caso di caduta il prodotto potrebbe rompersi o ferire qualcuno.
- Non utilizzare in luoghi soggetti ad alti tassi di umidità o alti livelli di polvere. L'eccessiva umidità o polvere potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- Non esporre il presente apparecchio alla luce solare diretta, ad una fiammata di calore o altre fonti di calore che potrebbero compromettere la qualità di stampa.
- Scollegare l'apparecchio qualora non si intenda utilizzarlo per un periodo prolungato di tempo.
- Accertarsi che sia la stampante che il misuratore siano spenti al momento della loro connessione con il cavo.

COMPONENTI DELLA STAMPANTE

Stampante *Mission®*

- Interruttore di alimentazione
- Pulsante apri coperchio
- Alloggiamento inferiore
- Coperchio dell'alloggiamento della carta
- Tagliacarta
- Pannello operativo
- Alloggiamento superiore
- Presa per adattatore
- Porta RS232

Pannello operativo

- Pulsante SET
- Spia POWER
- Spia ERROR
- Pulsante FEED

SPECIFICHE

Caratteristiche	Specifiche tecniche
Tipo di stampante	Stampante termica diretta
Compatibile con	Sistemi di monitoraggio del colesterolo <i>Mission®</i> e <i>Mission®</i> Ultra, sistema di monitoraggio PT/INR <i>Mission®</i>
Dimensioni	150 (L) x 120 (P) x 95 (H) mm
Larghezza carta di stampa	58 mm
Velocità di stampa	60 mm/s
Caratteri per riga	40
Risoluzione	8/mm (203 dpi)
Alimentazione	CC 7,5 V/2 A
Temperatura d'esercizio	5~40 °C (41~104 °F)
Umidità di funzionamento	10~80 %
Temperatura di stoccaggio	-20~60 °C (-4~140 °F)
Umidità di stoccaggio	10~90 %
Porta	RS232

MATERIALI

Materiali forniti

- Stampante
- Foglietto illustrativo
- Rotolo di carta
- Cavo
- Adattatore
- Certificato di garanzia


Materiali richiesti ma non forniti

- Misuratore

ISTRUZIONI PER L'USO

Caricamento della carta

- Accertarsi che la stampante sia **SPENTA** al momento del caricamento o della sostituzione della carta.
- Premere il **Pulsante apri coperchio** per aprire il coperchio dell'alloggiamento della carta. Ved. Figura (1) qui sotto.
 - Inserire un rullo di carta nel relativo alloggiamento. Estrarre la carta e lasciare la carta extra sul tagliacarta. Ved. Figura (2) qui sotto. Chiudere delicatamente il tagliacarta.

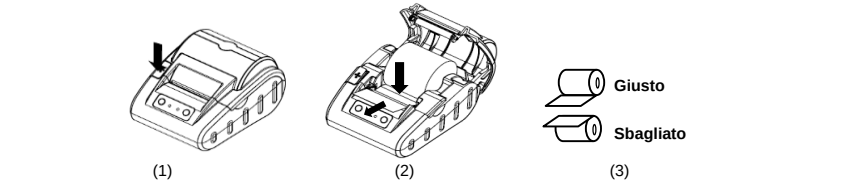

- Attenzione:**
- La stampante stamperà soltanto sulla superficie esterna del rullo. Se installato in modo errato, non ci sarà stampa. Per la giusta direzione del rullo di carta ved. figura (3) qui sotto.
 - Non forzare la chiusura del coperchio dell'alloggiamento della carta. Chiudere delicatamente il coperchio dell'alloggiamento della carta finché questo non va a toccare la testina della stampante, abbassare quindi il coperchio dell'alloggiamento della carta. Un clic ne indicherà la perfetta chiusura.
- Collegare la stampante all'uscita utilizzando l'adattatore in dotazione. Per accendere la stampante premere l'**interruttore di alimentazione** di colore rosso presente sul lato sinistro.
 - Per caricare la carta premere il **pulsante FEED**.
- Attenzione:**
- quando la stampante è accesa, non tirare avanti o indietro la carta a mano.
 - Non premere il **pulsante FEED** in assenza di carta all'interno della stampante.

Autotest della stampante

- La stampante *Mission®* è dotata della funzione Autotest che ne verifica il corretto funzionamento. Per eseguire un autotest:
- Accertarsi che il rullo di carta sia stato caricato.
 - Premere e tenere premuto il **pulsante FEED**, quindi accendere la stampante che avvierà l'autotest e stamperà una pagina di prova.
 - Dopo l'avvio della stampa rilasciare il **pulsante FEED**.
- Sulla pagina di prova sono indicati il numero di modello della stampante, il numero della versione software, le informazioni di configurazione della stampante, le lettere 128 ANK e così via. Se l'autotest non riesce, rivolgersi al proprio distributore di zona.

Preparazione per la stampa

- Collegare la stampante al misuratore di colesterolo *Mission®*, *Mission®* Ultra o al misuratore PT/INR *Mission®* utilizzando il cavo mini USB-RS232 fornito in dotazione con la stampante.
- Nota:**
- accertarsi che sia la stampante che il misuratore siano spenti al momento della loro connessione con il cavo.
 - I cavi mini USB-RS232 per i misuratori di colesterolo *Mission®* e *Mission®* Ultra e il misuratore PT/INR *Mission®* sono diversi e non vanno utilizzati in modo improprio. Il cavo del misuratore di colesterolo *Mission®* e quello del misuratore PT/INR *Mission®* sono di colore nero mentre il cavo del misuratore di colesterolo *Mission®* Ultra è di colore grigio. Non dimenticarsi di controllare l'etichetta sulla confezione del cavo e di utilizzare il cavo giusto prima della stampa.
 - Collegare la stampante all'uscita utilizzando l'adattatore.
 - Accertarsi che il rullo di carta sia stato caricato nella stampante *Mission®*.
 - Accendere la stampante premendo il pulsante di alimentazione di colore rosso presente sul lato sinistro della stampante.

Stampa

Una volta completata la procedura di preparazione per la stampa di cui sopra, attenersi alle istruzioni riportate di seguito per mettere in funzione i misuratori di colesterolo *Mission®*, *Mission®* Ultra o il misuratore PT/INR *Mission®*. La stampante stamperà automaticamente il risultato di prova:

- Per il sistema di monitoraggio del colesterolo *Mission®***
- Stampa di un risultato durante l'analisi:
 - Dopo aver aggiunto il campione i risultati verranno visualizzati entro 2 minuti. Premere ► per visualizzare i risultati.
 - Premere ⏏ per stampare i dati.
 - Stampare tutti i dati dalla memoria:

Nella videata di configurazione del misuratore di colesterolo *Mission®* premere ◀ o ► finché non verrà visualizzato **PC**.

 - Premere ⏏ per abilitare la modalità di comunicazione dati. **MEM** verrà visualizzato.
 - Premere ⏏ per stampare tutti i dati. Al termine della stampa il misuratore torna in modalità di configurazione.
 - Stampare un risultato selezionato dalla memoria:
 - Nella videata di prova iniziale del misuratore di colesterolo *Mission®* premere ◀ o ► per accedere alla memoria/al database.
 - Premere ◀ o ► per selezionare la memoria dai test corrispondenti: singolo o 3-1.
 - Premere ⏏ per accedere alla videata della memoria selezionata. La videata mostrerà i risultati più recenti. Premere ◀ o ► per scegliere il n. dei risultati e visualizzare ciascuna registrazione nella sequenza data/ora. Per visualizzare i risultati del test 3-1 premere ⏏ per accedere alla registrazione. Premere ⏏ per stampare i dati selezionati.

Per il sistema di monitoraggio del colesterolo *Mission®* Ultra

- Stampa dei dati durante l'analisi:

Il risultato verrà visualizzato entro 70 sec. dall'aggiunta del campione e verrà stampato automaticamente senza dover premere alcun pulsante.
- Stampa di tutti i dati dalla memoria:
 - Premere simultaneamente i pulsanti <S> e <M> e il misuratore entrerà in modalità di comunicazione PC.
 - Premere nuovamente il pulsante <M> e il misuratore visualizzerà sul display il simbolo **PC** e inizierà a trasferire i dati alla stampante. Poi la stampante inizierà a stampare tutti i dati uno alla volta. Durante la stampa sul display verrà visualizzata la dicitura "a".

- Nota:** il sistema di monitoraggio del colesterolo *Mission®* Ultra non supporta la stampa di un solo dato dalla memoria.
- Per il sistema di monitoraggio PT/INR *Mission®***
- Stampa di uno o dieci risultati dalla memoria:

Nella videata di configurazione del misuratore PT/INR *Mission®* premere **Next**► o ◀**Prev** fin quando non verrà visualizzato **Data Log**.

 - Premere **OK** per abilitare la modalità Registro dati. Vengono visualizzate le diciture INR o PT e INR.
 - Premere **Up** o **Down** per selezionare il registro da stampare.

- Premere **PRT/EX** per stampare i dati insieme alla videata che mostra le opzioni di stampa di uno o dieci registri. **One** indica la stampa del registro attualmente visualizzato mentre **Ten** indica la stampa di 10 registri consecutivi ad iniziare dal registro corrente. Al termine della stampa premere **Exit** per tornare al display del Registro dati.
- Premere **Up** o **Down** per selezionare un altro registro oppure premere e tenere premuto **PRT/EX** per uscire dalla modalità Registro dati e tornare alla videata di configurazione.

- Per l'Analizzatore di reagenti asciutti *Mission®* C100**
- Stampare i risultati durante le analisi:

I risultati sono mostrati entro 120 secondo dopo l'applicazione del campione, e vengono stampati automaticamente senza premere alcun tasto.
 - Stampare un risultato dalla memoria:

Accendere l'analizzatore. Premere Menu/Enter quando l'unità è accesa per aprire il menu principale.

 - Premere ▲ o ▼ per selezionare DATABASE, e premere Menu/Enter per aprire il menu DATABASE.
 - Premere ▲ o ▼ per selezionare SEARCH, e premere poi Menu/Enter per aprire il menu SEARCH (Ricerca).
 - Premere ▲ o ▼ per selezionare LIST, e premere poi Menu/Enter per leggere tutti i risultati memorizzati.
 - Premere ▲ o ▼ per selezionare l'ID, e premere poi Menu/Enter per stampare il risultato dell'ID selezionato.
- Per il Minianalizzatore di urine *Mission®* U60**
- Selezionare Printer (Stampante) nel campo **Output Mode** (Modalità output)
 - Stampare i risultati durante le analisi:

se la funzione **Auto output** (Output automatico) è attiva (ON), i risultati saranno stampati automaticamente al termine del test; se **Auto output** è disattivo (OFF), i risultati possono essere stampati premendo il tasto Print.
 - Stampare un risultato dalla memoria:

Selezionare un risultato dal database e premere il tasto Print. I risultati possono essere stampati con una stampante.

SPIE LUMINOSE

La stampante *Mission®* è dotata di due spie luminose (per maggiori dettagli ved. la figura nella sezione "Componenti della stampante"). Una **spia POWER** di colore verde e una **spia ERROR** di colore rosso. La **spia POWER** si accende al momento dell'accensione della stampante. La **spia ERROR** è spenta quando la stampante funziona correttamente. La **spia ERROR** di colore rosso lampeggia come segnale di avvertimento in presenza di una qualche situazione anomala tra quelle elencate nella tabella sottostante. La diversa frequenza di lampeggiamento della **spia ERROR** di colore rosso indica situazioni anomale diverse.

Stato della spia ERRORE	Cause	Soluzione
La spia ERROR di colore rosso lampeggia in modo continuo.	La testina della stampante si è surriscaldata.	Spegnere la stampante e cercare di recuperare automaticamente l'errore una volta che la testina della stampante si è raffreddata.
	Carta esaurita	Caricare il nuovo rotolo di carta.
La spia ERROR di colore rosso lampeggia una o più volte, dopo di che resta accesa in modo fisso e poi ripete il ciclo di lampeggiamento.	La stampante si trova in una condizione anomala e non è possibile recuperare l'errore automaticamente.	Spegnere la stampante e rivolgersi al proprio distributore di zona.

GARANZIA

Compilare la scheda della garanzia presente all'interno della confezione. Inviarla per posta al proprio distributore di zona per registrare il proprio acquisto entro 30 giorni dall'acquisto. Per promemoria personale, scrivere qui la data dell'acquisto del kit stampante:

Nota: la presente garanzia si applica esclusivamente alla stampante conservata all'interno dell'imballo di acquisto originale.

ACON Laboratories, Inc. garantisce all'acquirente originale che il presente analizzatore non presenta difetti in termini di materiali e manodopera per un periodo di 1 anno (12 mesi). L'anno inizia dalla data di acquisto originale o di installazione ad eccezione di quanto riportato di seguito. Durante il periodo stabilito di 1 anno, **ACON** sostituirà la stampante in garanzia con una ricondizionata o, a propria discrezione, riparerà l'apparecchio difettoso senza aggravio di costi. **ACON** non si farà carico delle spese di trasporto per la riparazione di una stampante. La presente garanzia è soggetta alle seguenti eccezioni e limitazioni: La presente garanzia è limitata a riparazioni o sostituzioni dovute a difetti dei materiali o di fabbricazione. I componenti non difettosi verranno sostituiti ad un costo aggiuntivo. **ACON** non sarà responsabile di alcuna riparazione o sostituzione di componenti danneggiati a causa di abuso, incidenti, modifica, uso improprio, negligenza, mancato utilizzo della stampante in base a quanto specificato nel foglietto illustrativo o manutenzione non da parte di **ACON**. **ACON** si riserva il diritto di apportare modifiche al progetto di questo misuratore senza l'obbligo di dover applicare tali modifiche alle stampanti prodotte in precedenza.

Indice dei simboli			
	Produttore		N. catalogo
	Numero di serie		Rappresentante autorizzato
	Consultare le istruzioni per l'uso		Non smaltire insieme ai rifiuti domestici

ACON Laboratories, Inc.
5850 Oberlin Drive, #340
San Diego, CA 92121, USA

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Mission®

Folheto informativo de impressora

REF	C121-1021	Português
-----	-----------	-----------

Utilização Prevista

A Impressora *Mission®* é uma impressora térmica. Pode ser ligada ao medidor *Mission®* e Medidor Ultra de Colesterol da *Mission®* e aos Medidores TP/IIN *Mission®* para imprimir o resultado do teste. Apenas para uso profissional.


PRECAUÇÕES

- Não toque no cortador de papel.
- Não toque na cabeça de impressão ou nos seus respetivos componentes. Poderá provocar queimaduras ou a impressora poderá danificar-se devido a electricidade estática.
- Desligue imediatamente o equipamento se este produzir fumo, um odor estranho ou ruído fora do comum. O uso continuado poderá provocar um incêndio. Desligue imediatamente o equipamento da tomada e contacte o distribuidor local para obter mais assistência.
- Não desmonte a impressora. Desmontar a impressora poderá ser perigoso e anulará a garantia.
- Certifique-se de que usa a fonte de alimentação específica. Ligar a impressora a uma fonte de alimentação inadequada poderá danificar o equipamento e provocar um incêndio.
- Evite os líquidos ou resíduos no interior da impressora. Se derramar água ou outro líquido sobre o equipamento, desligue imediatamente o cabo de alimentação. O uso continuado poderá provocar um incêndio.
- Não ligue os cabos de outra forma que não a mencionada neste manual. Ligações diferentes poderão danificar o equipamento.
- Certifique-se de que coloca este equipamento numa superfície firme, estável e horizontal. O produto poderá quebrar-se ou causar ferimentos se cair.
- Não utilizar em locais sujeitos a altos níveis de humidade e poeira. A humidade e poeira excessivas poderão danificar o equipamento.
- Não exponha este equipamento à luz solar direta, a um incêndio ou outras fontes de calor. Fazê-lo poderá afetar a qualidade da impressão.
- Desligue o equipamento se o mesmo não for utilizado durante um período prolongado.
- Certifique-se de que a impressora e o medidor estão desligados quando os ligar usando o cabo.

COMPONENTES DA IMPRESSORA


Impressora *Mission®*

- Interruptor
- Botão de abertura da tampa
- Estrutura Inferior
- Tampa de Compartimento do Papel
- Cortador de Papel
- Painel de Operações
- Estrutura Superior
- Adaptador de Tomada
- Porta RS232

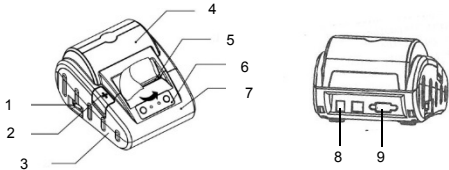

Painel de Operações

- Botão SET
- Luz POWER
- Luz ERROR
- Botão FEED

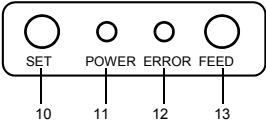

ESPECIFICAÇÃO

Caraterística	Especificação Técnica
Tipo de Impressora	Impressão Térmica Direta
Compatível com	sistemas de monitoramento de colesterol <i>Mission®</i> e Ultra <i>Mission®</i> e com o sistema de monitoramento TP/IIN <i>Mission®</i>
Dimensões	150 (C) x 120 (L) x 95 (A) mm
Largura do Papel de Impressão	58 mm
Velocidade de Impressão	60 mm/s
Caracteres por Linha	40
Resolução	8/mm (203dpi)
Potência	DC 7,5V/2A
Temperatura de Funcionamento	5~40 °C (41~104 °F)
Humidade de Funcionamento	10~80 %
Temperatura de Armazenamento	-20~60 °C (-4~140 °F)
Humidade de Armazenamento	10~90 %
Porta	RS232

MATERIAIS

Materiais Fornecidos

- Da Impressora
- Instruções
- Rolo de Papel
- Cabo
- Adaptador
- Cartão de Garantia

Materiais necessários mas não Fornecidos


- Medidor

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

Inserir o Papel

Certifique-se de que a impressora está DESLIGADA quando estiver a colocar ou mudar o papel.

- Prima o Botão de Abertura da Tampa para abrir a Tampa do Compartimento do Papel. Ver Figura (1) abaixo.
- Coloque o rolo de papel no compartimento do papel. Puxe o papel para fora e deixe algumas folhas extra por cima do Cortador de Papel. Ver Figura (2) abaixo. Feche cuidadosamente a Tampa do Compartimento do Papel.

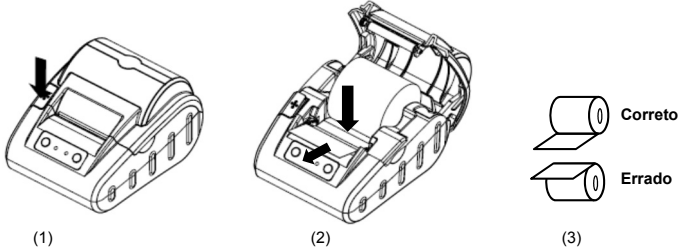

Cuidado:

- A impressora só imprime a superfície exterior do rolo. Se não for colocado corretamente, não haverá impressão. Ver figura (3) acima para instruções corretas sobre o rolo de papel.
 - Não force o fechamento da tampa do compartimento do papel. Feche cuidadosamente a tampa do compartimento do papel até que esta toque na toca a cabeça de impressão, empurre para baixo a tampa do compartimento do papel, ouvirá um "Clique" quando estiver bem fechada.
- Ligue a impressora à tomada utilizado o adaptador fornecido. Prima o Interruptor vermelho no lado esquerdo para ligar a impressora.
 - Prima o Botão FEED para inserir o papel.

Cuidado:

- Quando a impressora estiver ligada, não puxe nem empurre manualmente o papel.
- Não prima o Botão FEED quando a impressora não tiver papel.

Impressão de Teste

A Impressora *Mission®* tem a função de impressão de teste para garantir que a impressora funciona corretamente. Para fazer a impressão de teste:

- Certifique-se de que o rolo de papel foi carregado.
- Mantenha o Botão FEED pressionado, depois ligue a impressora, esta iniciará a impressão de teste e imprimirá o mesmo.
- Liberte o Botão FEED depois da impressão iniciar. A página de teste conterá o número do modelo da impressora, o número da versão de software, as informações sobre as definições da impressora as letras 128 ANK e assim por diante. Se a impressão de teste falhar, contacte o seu distribuidor local e peça ajuda.

Preparação para Impressão

- Ligue a Impressora ao medidor de colesterol *Mission®* ou *Mission®* Ultra ou *Mission®* TP/IIN com o mini cabo USB-RS232 incluído na impressora.

Nota:

- Certifique-se que a impressora e o medidor estão desligados quando os ligar utilizando o cabo.
- Os mini cabos USB-RS232 para os medidores de colesterol *Mission®* e Ultra *Mission®* e para o medidor TP/IIN *Mission®* são diferentes e não podem ser utilizados de forma errada. O cabo para o medidor de colesterol *Mission®* e Medidor TP/IIN *Mission®* é preto e o cabo para o medidor de colesterol Ultra *Mission®* é cinzento. Certifique-se de que verifica a etiqueta saco do cabo e usa o cabo correto antes de imprimir.

- Ligue a impressora à tomada, utilizado o adaptador.
- Certifique-se de que o rolo de papel está carregado na Impressora *Mission®*.
- Ligue a impressora ao premir o Botão de Alimentação vermelho no lado esquerdo da impressora.

Impressão

Assim que a preparação da impressão acima descrita esteja concluída, siga as instruções abaixo para trabalhar com o seu medidor de colesterol *Mission®*, Ultra *Mission®* ou Medidor TP/IIN *Mission®*, a impressora imprimirá o resultado do teste automaticamente:

Para o sistema de monitoramento de colesterol *Mission®*

- Imprima um resultado quando testar:
 - Depois de adicionar a amostra, os resultados serão apresentados em 2 minutos. Prima ► para ver os resultados.
 - Prima ⏏ para imprimir os dados.
- Imprima todos os resultados da memória:

No ecrã de Definições do Medidor de Colesterol *Mission®*, prima ◀ ou ► até que **PC** apareça.

 - Prima ⏏ para ativar o modo de Comunicação de Dados. **Aparecerá MEM.**
 - Prima ⏏ para imprimir todos os dados. Assim que a impressão estiver concluída, o medidor regressará ao Menu de Definições.
- Imprima um resultado selecionado da memória:
 - No ecrã de teste inicial do medidor de Colesterol *Mission®*, prima ◀ ou ► para introduzir a memória/base de dados.
 - Prima ◀ ou ► para selecionar a memória dos respetivos testes: Individual ou 3-1.
 - Prima ⏏ para aceder ao ecrã de memória selecionada. O ecrã apresentará os resultados mais recentes. Prima ◀ ou ► ou seleccione o Nº. De resultados e aceda a cada registo na sequência dia/hora. Para ver os resultados do teste 3-1, prima ⏏ para inserir o registo. Prima ⏏ para imprimir os dados selecionados.

Para o sistema de monitoramento de colesterol Ultra *Mission®*

- Imprimir os dados ao testar:

O resultado será apresentado em 70s após adicionar a amostra e será impresso automaticamente sem premir qualquer botão.

- Imprimir todos os dados da memória:
 - Prima os botões-**S**> e <**M**> em simultâneo e o medidor irá ativar o modo de Comunicação de PC.
 - Prima novamente o botão <**M**> e o medidor apresentará o símbolo **PC** no ecrã e iniciará a transferência dos dados para a impressora. Em seguida, a impressora imprimirá todos os dados um a um. Durante a impressão, "to" será apresentado no ecrã.

Nota: A impressão de um dado da memória não pode ser executada pelo sistema de monitoramento de colesterol Ultra *Mission®*.

Para o sistema de monitoramento TP/IIN *Mission®*

- Imprimir um ou dez resultados da memória:

No ecrã de Definições do medidor TP/IIN *Mission®*, prima **Next►** ou **◄Prev** até que apareça **Data Log**.

 - Prima **OK** para ativar o Modo de Registo de Dados. Irá surgir a opção IIN ou PT IIN.
 - Prima **Up** ou **Down** para selecionar o registo a imprimir.
 - Prima **PRT/EX** para imprimir os dados no ecrã apresentado as opções de impressão de um ou dez registos. **One** significa que o registo indicado será impresso, enquanto que **Ten** significa que 10 registos consecutivos irão ser impressos, começando pelo registo atual. Assim que a impressão estiver concluída, prima **Exit** para voltar ao ecrã de Registo de Dados.
 - Prima **Up** ou **Down** para selecionar outro registo, ou mantenha pressionado **PRT/EX** para sair do modo de Registo de Dados e voltar ao ecrã de definições.

INDICADORES DE LUZ

A Impressora *Mission®* tem dois indicadores de luz (Ver ilustração na secção "Componentes da Impressora", para mais detalhes). Uma **Luz POWER** verde, a outra **Luz ERROR** vermelha. A **Luz POWER** liga-se após a impressora ser ligada. A **Luz ERROR** desliga-se após a impressora funcionar corretamente. A **Luz ERROR** vermelha pisca como um aviso para quando existir alguma situação anormal como mencionada na tabela abaixo. A frequência com que pisca a **Luz ERROR** vermelha é diferente, indicando diferentes situações anormais.

Estado da Luz ERROR	Causas	Solução
A luz ERROR vermelha pisca continuamente.	A cabeça de impressão está em sobreaquecimento.	Desligue a impressora e o erro poderá ser resolvido automaticamente assim que a cabeça de impressão arrefeça.
	Sem papel	Carregar o novo rolo de papel.
A luz ERROR vermelha pisca uma ou várias vezes e, depois disso, está sempre acesa e depois repete o mesmo ciclo de intermitência.	A impressora encontra-se numa situação anormal e o erro não poderá ser resolvido automaticamente.	Desligue a impressora e entre em contato com o distribuidor local para obter mais ajuda.

GARANTIA

Preencha o cartão de garantia incluído na embalagem. Envie-o para o seu distribuidor local para registar a sua compra, no prazo de 30 dias após a mesma.

Para os seus registos, escreva a data da compra do seu kit de impressora aqui:

Nota: Esta garantia aplica-se apenas à impressora na sua compra original.

ACON Laboratories, Inc. garante ao comprador original que esta impressora se encontra livre de defeitos nos materiais e defeitos de fabrico durante um período de um ano (12 meses). O período de um ano começa a partir da data da compra ou instalação original, exceto como observado abaixo. Durante o período tido como ano 1, a **ACON** compromete-se a substituir a impressora sob garantia por uma impressora reparada ou, opcionalmente, reparar gratuitamente a impressora avariada. **A ACON** não se responsabiliza por despesas de envio relacionadas com a reparação da impressora.

Esta garantia está sujeita às exceções e limitações seguintes:

Esta garantia limita-se à reparação ou substituição devido a defeitos nas peças ou no fabrico. Peças necessárias mas que não estejam avariadas poderão ser substituídas mediante um custo adicional. **ACON** não deverá ser obrigada a fazer quaisquer reparações ou substituir quaisquer peças que sejam necessárias em virtude de abuso, acidentes, alteração, má utilização, negligência, mau funcionamento da impressora de acordo com as Instruções, ou manutenção por alguém que não a **ACON**. **A ACON** reserva-se o direito de fazer alterações no design deste medidor sem a obrigação de incorporar tais mudanças em impressoras anteriormente fabricadas.

Índice de Símbolos			
	Fabricante		Catálogo #
	Número de Série		Representante Autorizado
	Consulte as instruções de utilização		Não coloque no lixo doméstico



Número: 1150893601
Data efetiva: 2016-09-09