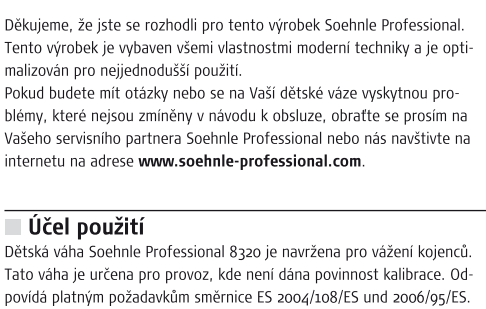
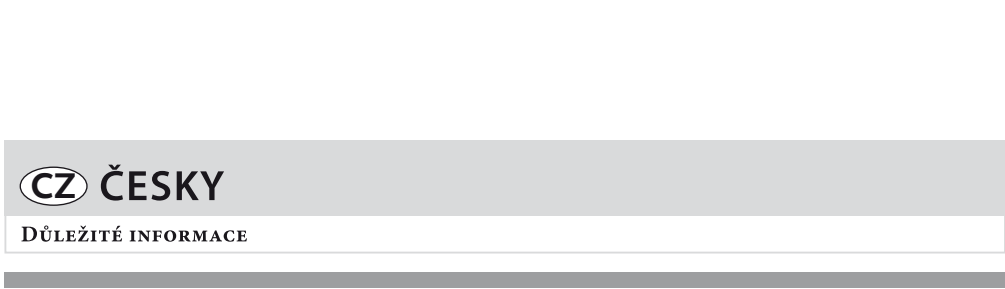
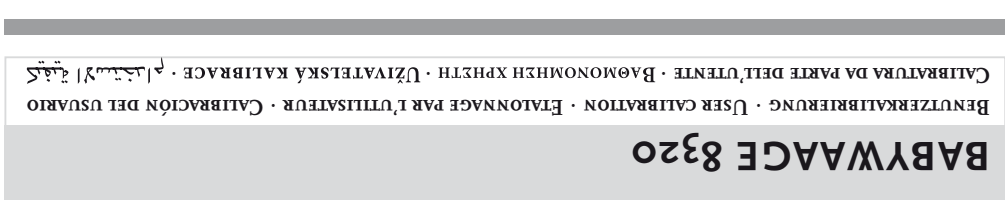
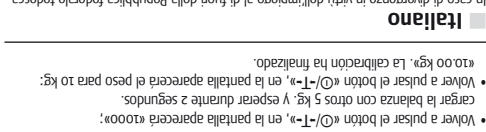
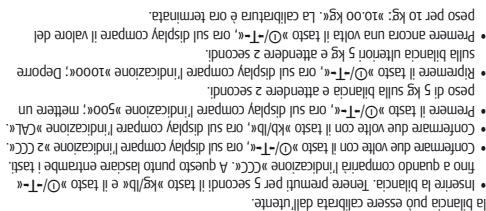
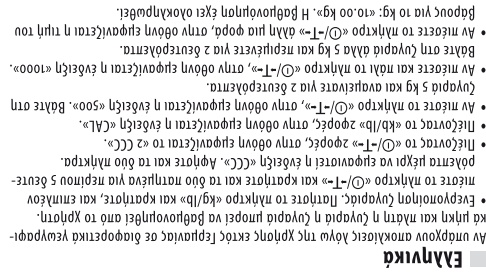
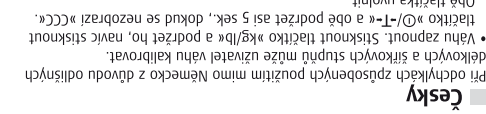
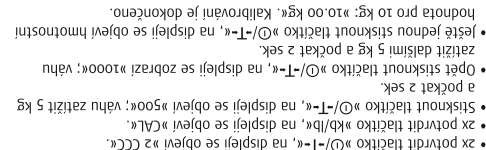
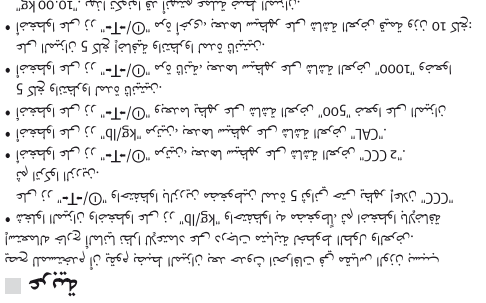
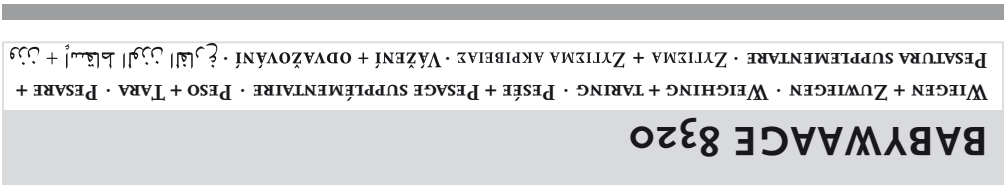
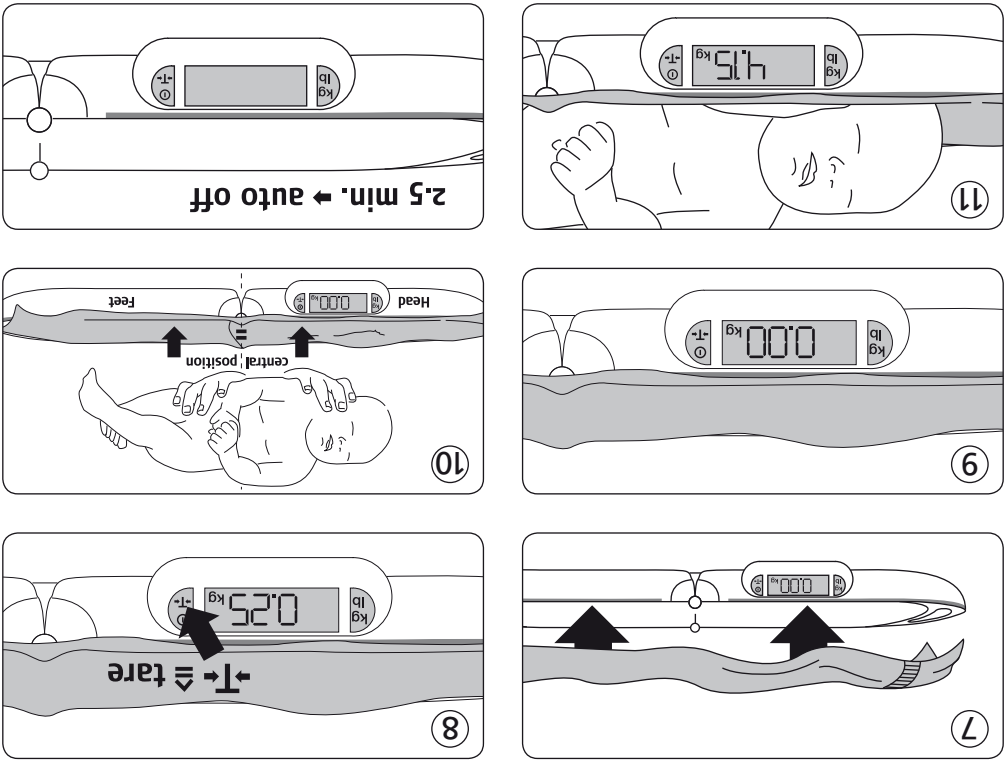
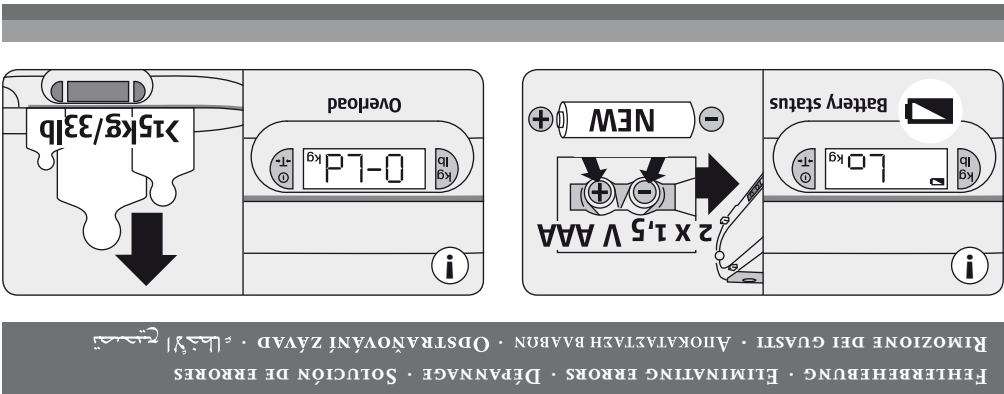
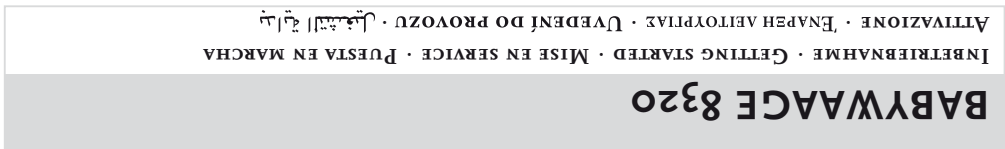
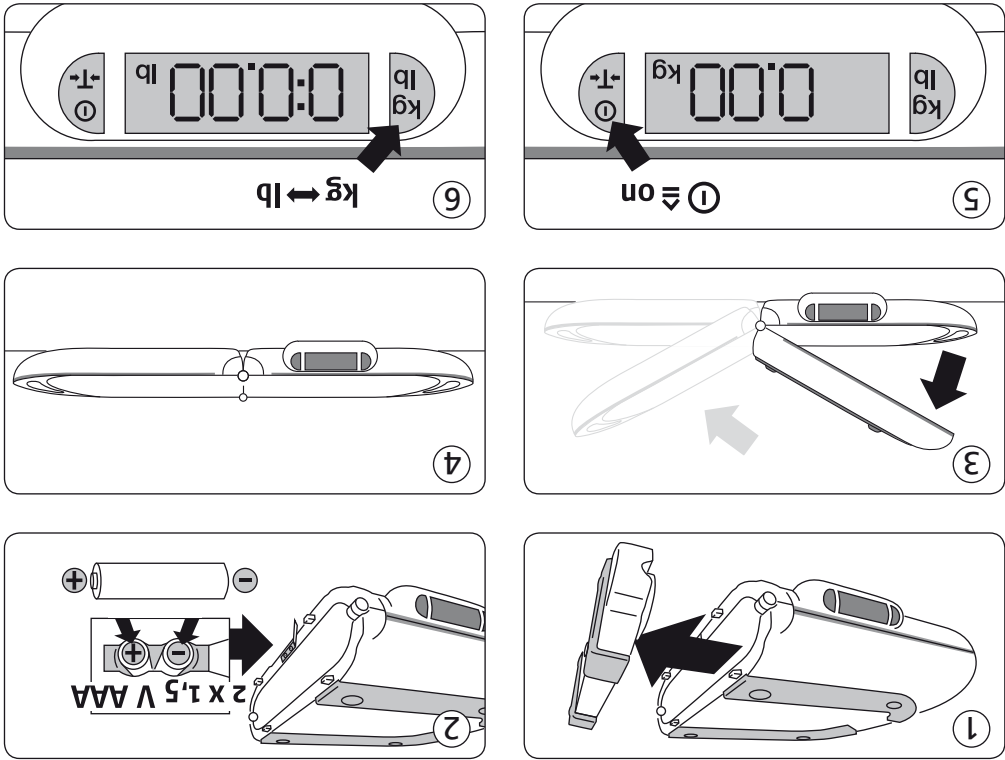
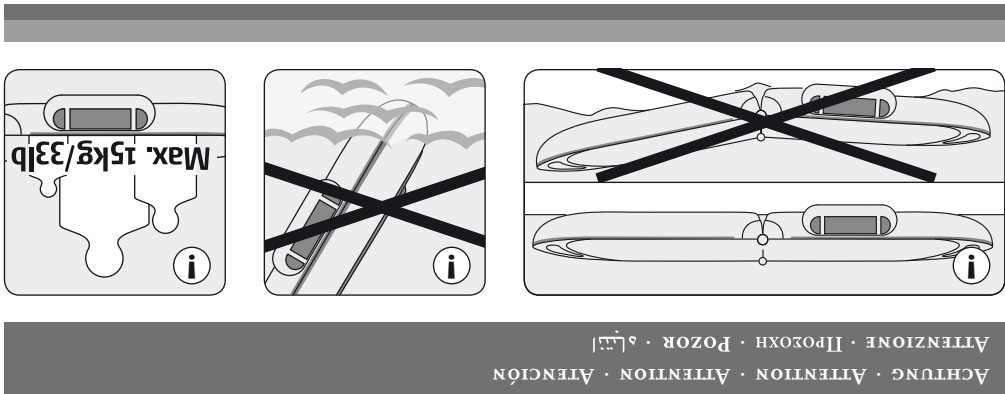


عربية

معلومات مهمة

نشكركم على افتتاحكم هذا المنتج المصنوع من قبل شركة Soehnle Professional الألمانية. لقد اعتمدت الشركة في تجهيز هذا المنتج على كافة الخصائص المميزة ذات التفتيات الحديثة كما تم إعداده بكيفية مثالية لتسهيل عملية الإستخدام. إذا كانت لديكم بعض الأسئلة أو الاستفسارات أو ظهرت في ميزان قياس وزن الأطفال الرضع بعض المشكلات التي لم تنتظرق لها ونعالجها في دليل كيفية الإستخدام. فالتصلاوا من فضلكم بقسم خدمات الزبائن التابع لشركة Soehnle Professional أو قوموا بزيارة موقعنا الإلكتروني تحت عنوان: **www.soehnle-professional.com**

مجال الاستخدام

صممت شركة Soehnle Professional ميزان الأطفال 8320 خصيصا لوزن الأطفال الرضع. كما أنه موجه للإستعمال في المجالات التي لا تستوجب ضرورة العيار. وإنه يوافق متطلبات تعليمات المجموعة الأوروبية السارية المفعول رقم 2004/108/EC و 2006/95/EC.

إرشادات أمنية

الرجاء قراءة المعلومات المشار إليها في دليل كيفية الإستخدام بعناية كبيرة قبل بداية تشغيل الجهاز. لأنها تحتوي على إرشادات مهمة حول التثبيت والإستخدام الموافق لأحكام المشطرة فضلا عن صيانة الجهاز. لا تحمل المُنْتِج أية مسؤولية إذا لم يتم احترام الإرشادات التالية: تم تصميم هذا الجهاز للإستخدام داخل البنايات. كما أنه يحقق متطلبات التحمل المغنطيسي الكهربائي. ويجب تجنب تجاوز القيم العالية المحددة في المعايير. واتصلاوا من فضلكم بقسم خدمات الزبائن التابع لشركة Soehnle Professional عند ظهور أية مشاكل.

التنظيف

تنظيف الجهاز الرجاء استعمال منديل مبلل ومواد تنظيف حسب العرف التجاري. لا يجب استعمال أية مواد مخصصة للفرش.

الصيانة

قام المُنْتِج بتفشيذ بعض تقني لعملية القياس وليس هذا الميزان في حاجة إلى صيانة منتظمة وروتينية، لكنه من المفيد مراقبة دقة الميزان في القياس خلال فترات زمنية متوالية. ويتوقف مدى تكرار المعايرة والفحص على كثرة استخدام الميزان ووضعية حالته. عند حدوث الحرفاظات أو بفهم خدمات الزبائن التابع لشركة Soehnle Professional يمكنكم التجاري أو بفهم خدمات الزبائن التابع لشركة Soehnle Professional في المعاير. واتصلاوا من فضلكم بقسم خدمات التأكيد على ضرورة استخدام قطع غيار أصلية فقط.

إرشادات

يوافق هذا الجهاز متطلبات تعليمات المجموعة الأوروبية السارية المفعول رقم 2004/108/EC وذلك بغضه من توشيفات المحطات الإذاعية. يمكن للتأثيرات الإلكترونيةوالمغنطيسية الكهربائية القوية مثلاً عند تشغيل جهاز إذاعي أو استخدام هاتف محمول بالقرب الشديد من الميزان أن تسبب في تغيير نتيجة القياس الظاهرية على شاشة العرض. يمكن بعد توقف التأثيرات التثويشية استخدام الجهاز حسب التعليمات المتضمن عليها مرة أخرى. وإذا اقضى الأمر يجب إعادة تشغيل الجهاز من جديد.

يعد الميزان جهازاً للقياس فقط فمن الممكن أن يؤدي هبوب الريح، الاحترازات، التغير المفاجئ في درجات الحرارة أو أشعة الشمس إلى تأثير وتغيير في نتائج القياس. يتوفر الميزان على درجة حماية تقدر بنسبة 54 IP لذا يجب تجنب الرطوبة العالية، البخار، السوائل الدوائية والاساخات القوية.

الضمان

إذا تم إثبات نقائص وعيوب موزكة في البضاعة المرسلة يكون لشركة Soehnle Professional الحق إما بتصليح الجهاز ورفع العيوب أو توفير جهاز جديد غيره. إن القطع المغيرة تبقى ملكاً لشركة Soehnle Professional. إذا باتت عملية تصليح العيب أو إجراءات إرسال جهاز جديد بالفشل يتم تطبيق الشروط القانونية سارية المفعول. تمتد مدة الضمان عامين وتبدأ منذ يوم شراء الجهاز. لذلك الرجاء الاحتفاظ بالفاتورة كدليل واضح عند الحاجة. اتصلاوا من فضلكم في هذه الحالة بمحللكم التجاري أو بعمدة الزبائن التابعة لشركة Soehnle Professional. لا تتحمل الشركة أية ضمانات بخصوص الأضرار التي قد تنتج وخاصة عن الأسباب التالية: التخزين أو الإستخدام غير الصحيح والمناسب، التركيب الخاطئ أو التشغيل المختل من قبل المشتري أو شخص ثالث، الأتاكل الطبيعي، التغيير أو الإنتداء، التعامل الخاطئ أو الملامعة، وبالأخص الإفراط والتحميل فوق العبد، التأثيرات الكيميائية والكيميائية الكهربائية والرطوبة إذا لم تكن شركة Soehnle Professional هي المتسببة في ذلك. إذا أدت التأثيرات التشغيلية والصناعية أو ما شابه ذلك إلى تغيير كبير في الظروف أو حالة المواد المكونة للجهاز يسقط الإلتزام الذي تتحملة الشركة لضمان الرجاء الإشغال الكلي والسليم للجهاز. عندما تتحمل الشركة الضمان في الحالات الخاصة يعني ذلك سلامة الجهاز من كل العيوب والنواقص خلال مدة الضمان. احتفظوا من فضلكم بالعالية الأصلية للجهاز ربما تحتاجونها لإرساله للشركة.

كيفية التخلص من الميزان

لا يحتوي ميزان قياس الأطفال الرضع حسب المعلومات الحالية على أية مواد خاصة مضررة بالبيئة، ولا يجب اعتبار هذا المنتج بمثابة قمامة عادية بل يجب التخلص منه في موضع خاص بإعادة تصنيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. للمزيد من المعلومات الرجاء الإلتصال بالمحافظة التابعة لمحل إقامتكم أو محطات التخلص من النفايات ببلدكم وإلى الشركة التي يتعاملكم الجهاز.

كيفية التخلص من البطاريات: لا ترموا هذه البطاريات مع القمامة المنزلية، لكن يستوجب عليكم قانوناً كمستهلكين إرجاع البطاريات المستهلكة تماماً إلى الأماكن المخصصة لذلك. يمكنكم تسليمها أيضاً لدى الأماكن العمومية لتجميع البطاريات القديمة القريبة من محل إقامتكم أو إرجاعها إلى المحلات التجارية التي تبيع مثل تلك الأصناف. تجدون على البطاريات المخصصة على الحلات الخطرة والمضرة للاقتصاد الآتية:
Pb = تحتوي البطارية على الرصاص
Cd = تحتوي البطارية على الكاديوم،
Hg = تحتوي البطارية على الزئبق.

