



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

PAD ESERCITAZIONE SUTURA - SUTURE TRAINING PAD COUSSIN D'ENTRAÎNEMENT AUX SUTURES ALMOHADILLA DE ENTRENAMIENTO DE SUTURA


Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de Uso

Material: Silicone	Size: 17.2x12x1.2cm	Weight: 240g
Materiale: Silicone	Dimensioni: 17,2x12x1,2 cm	Peso: 240 g
Matériau: Silicone	Dimensions: 17,2x12x1,2 cm	Poids: 240 g
Material: Silicona	Dimensiones: 17,2x12x1,2 cm	Peso: 240 g

Tecniche di sutura

Il pad esercitazione sutura prevede vari tipi di ferite. È possibile esercitarsi con le seguenti tecniche di sutura:


- 1. Sutura interrotta a punti semplici:** semplice e applicata nella maggior parte dei casi; ciascun punto è chiuso con un singolo nodo; utilizzata nella cute, nel tessuto sottocutaneo, nei muscoli, nell'aponeurosi, specialmente per ferite che presentano infezioni.

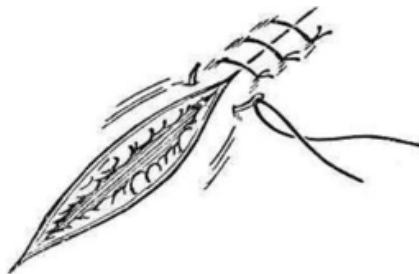


- 1. Sutura continua a soprappiglio:** dopo il primo punto, il capo lungo del filo non viene tagliato ma utilizzato per formare una serie continua di successive anse fino all'estremità opposta della ferita, dove viene interrotto con un nodo finale spesso.




3. **Sutura continua a punti incavigliati:** questo metodo, che consente di risparmiare tempo e offre un buon effetto emostatico, consiste nell'allacciare il filo all'ansa precedente durante il processo di sutura ed è utilizzato prevalentemente per chiudere il tratto gastrointestinale e per la sutura durante i trapianti di cute.

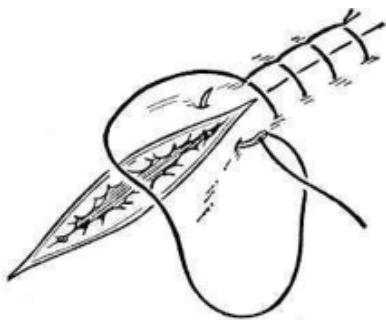

3. **Sutura a 8:** consiste in due suture intermittenti, sicure e rapide, quali le suture della fascia.

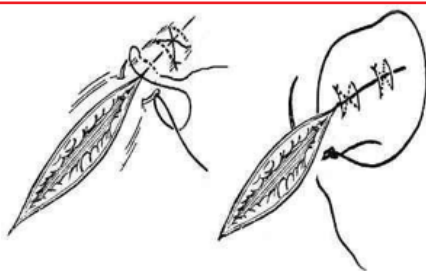

5. **Sutura sottocuticolare:** l'ago viene inserito da un'estremità dell'incisione e quindi passa alternativamente attraverso il bordo interno dell'incisione su entrambi i lati fino all'estremità opposta dell'incisione; infine il filo viene serrato con un nodo. Utilizzata comunemente per suturare le incisioni cutanee esposte, per esempio in caso di tiroidectomia cervicale.

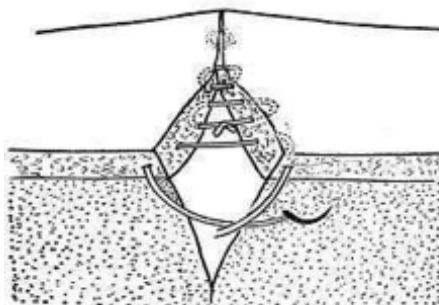

REF 23020 / B3361

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de:
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

