



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

du dispositif. Si le produit présente des anomalies, contactez immédiatement le point de vente où vous avez effectué l'achat.

Erregi sas n'assume aucune responsabilité concernant le mauvais usage du dispositif.

En cas d'accident grave lié à l'utilisation du dispositif, veuillez signaler l'événement au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

DESCRIPTION ET COMPOSITION

Art 27637 : Protection de barrière de lit à velcro réalisée en tissu imperméable 100% polyester, support acrylique/pu ignifuge classe 1. Rapport PE 75% ; résine 25%. Garnissage en polyuréthane expansé.

INDICATIONS

Dispositif utilisé pour éviter les chocs accidentels contre les barrières rigides du lit et pour garantir la sécurité chez les sujets ayant des problèmes de mobilité et de contrôle, fourni en plusieurs types de tissu et de forme.

CONTRE-INDICATIONS

Aucune contre-indication n'a été détectée sauf en cas de sensibilité avérée aux matériaux qui composent le produit.

MODE DE LAVAGE

ART 27637

LAVER À 40° MAXI	NE PAS BLANCHIR	NE PAS REPASSER	NE PAS UTILISER LE SÈCHE-LINGE
	UTILISER N'IMPORTE QUEL SOLVANT SAUF LE PERCHLOROÉTHYLÈNE		

GARNISSAGE :
LAVER AVEC UN CHIFFON DOUX HUMIDIFIÉ

DÉSINFECTION

Utilisez des produits à usage médico-chirurgical.

CONSERVATION

Conservez à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Évitez l'exposition directe aux rayons du soleil.

ÉLIMINATION

Éliminez le dispositif en respectant les normes en vigueur en matière de pro-

	Code produit		Dispositif médical
	Numéro de lot		Fabricant
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		Consulter les instructions d'utilisation
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil		À conserver dans un endroit frais et sec
	Date de fabrication		Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel
	Identifiant unique de l'appareil		

tection de l'environnement et de tri sélectif

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

FRANÇAIS

PROTECTION POUR BARRIÈRE DE LIT AVEC VELCRO

Avant de réaliser une quelconque opération, contrôlez visuellement l'état

Gima 27637



Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

REF 18/12/I



M27637-Rev.2-09.25