

BARELLA PIEGHEVOLE IN 2 STRETCHER - FOLDABLE IN 2

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

I. Caratteristiche tecniche

1. Dimensioni prodotto (L x W x H): 189 x 48 x 4 cm
2. Dimensioni prodotto piegato (L x W x H): 95 x 48 x 9 cm
3. Dimensioni imballaggio (2 pz / cartone): 96 x 50 x 18 cm
4. Peso Netto: 4 kg Peso Lordo: 9 kg
5. Capacità di carico: meno di 159 kg

II. Modalità di utilizzo

Questa barella pieghevole per il primo soccorso, divisibile, è utilizzata principalmente per trasportare pazienti con fratture. Entrambe le estremità della barella hanno cerniere che permettono di separarla in una parte destra e una sinistra. Questo permette di adagiare rapidamente e delicatamente il paziente sulla barella, sul tavolo operatorio o sul letto. La barella può successivamente essere estratta da sotto il paziente.

III. Applicazioni

Questo prodotto, clinicamente testato, è utilizzabile per il trasporto di feriti e pazienti in ambulanze, ospedali, campi di battaglia e palestre; può inoltre essere utilizzato in operazioni generali.

IV. Attenzione











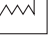
1. Per ragioni di sicurezza, assicurarsi, quando si trasportano pazienti con questa barella, di bloccare ermeticamente il dispositivo di fissaggio paraurti e di allacciare le cinture di sicurezza.
2. Nelle operazioni generali, fare attenzione a non lacerare la superficie della barella.

V. Manutenzione

1. Pulite regolarmente il prodotto (incl. sterilizzazione).
2. Verificate spesso la presenza di parti allentate.

VI. Conservazione e trasporto

1. Conservare il prodotto in un luogo al riparo da umidità e corrosione.
2. Il prodotto può essere trasportato con normali mezzi di trasporto.

	Fabbricante		Conservare in luogo fresco ed asciutto		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Codice prodotto		Conservare al riparo dalla luce solare		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Numero di lotto		Dispositivo medico		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Leggere le istruzioni per l'uso		Data di fabbricazione		

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

REF TD01011 (GIMA 34076)



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherland

Importato da / Imported by:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

