



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ITALIANO

PARASPONDE VELCRATO

AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi operazione controllare visivamente integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Erregi sas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo. In caso di incidente grave verificatosi in relazione all'utilizzo del dispositivo, si prega di segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito

DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE

Art 27637: Parasponde velcrato realizzato con tessuto idrorepellente composizione 100% poliestere supporto acrilica\pu ignifuga in classe 1. Rapporto PE 75% ; resina 25%. Imbottitura in poliuretano espanso.

INDICAZIONI

Dispositivo utilizzato per evitare gli urti accidentali contro le spondine rigide del letto e garantire la sicurezza in soggetti con difficoltà motorie e di controllo, fornito in diverse tipologie di tessuto e forma.

CONTROINDICAZIONI

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti

MODALITÀ DI LAVAGGIO

ART 27637

LAVARE MAX 40°	NON CANDEGGIARE	NON STIRARE	NON UTILIZZARE L'ASCIUGATRICE
	UTILIZZARE QUALSIASI SOLVENTE ECCETTO TETRACLORETILENE		

IMBOTTITURA:

LAVARE CON UN PANNO MORBIDO UMIDIFICATO

DISINFEZIONE

Utilizzare prodotti con presidio medico chirurgico.

CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

	Codice prodotto		Dispositivo medico
	Numero di lotto		Fabbricante
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Leggere le istruzioni per l'uso
	Conservare al riparo dalla luce solare		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Data di fabbricazione		Non prodotto con lattice di gomma naturale
	Identificatore univoco del dispositivo		

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

Gima 27637



Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Veduggio Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

REF

18/12/I



M27637-Rev.2-09.25