

**CODICE 34072****MANUALE UTENTE - BARELLA MULTIPOSIZIONE AUTOMATICA****SIMBOLI:**

Simbolo	Definizione del simbolo
	Leggere attentamente le istruzioni per l'uso
	Conservare lontano da luce solare
	Conservare in luogo asciutto
	Prodotto conforme alla Direttiva Europea 93/42
	Numero di lotto
	Indirizzo fabbricante
	Codice prodotto

**I. Caratteristiche tecniche:**

1. Dimensioni prodotto (L x W x H):  
Posizione alta: 198 x 55 x 93 cm  
Posizione bassa: 198 x 55 x 30 cm
2. Dimensioni imballaggio (1 pz): 200 x 60 x 35 cm
3. Peso Netto: 39 kg Peso Lordo: 45 kg
4. Angolo massimo del Bach: 85°
5. Capacità di carico: meno di 159 kg

**II. Modalità di utilizzo:**

Questa barella con carrello può essere utilizzata da una sola persona che la spinga all'interno dell'ambulanza: è completamente automatica, quindi non occorre premere alcun bottone, è sufficiente spingere abbastanza: l'altezza può essere regolata a seconda delle necessità. La barella è estremamente adatta al trasferimento dei pazienti in posti ristretti, quali l'ascensore di un ospedale, un'ambulanza, una strada urbana, ecc. È fatta con materiali in acciaio inossidabile; è antiruggine, utilizzabile in sicurezza e facile da sterilizzare e pulire.

### **III. Applicazioni:**

Questo prodotto, clinicamente testato, è utilizzabile per il trasporto di feriti e pazienti in ambulanze, ospedali, campi di battaglia e palestre; può inoltre essere utilizzato in operazioni generali.

### **IV. Attenzione:**

1. Per ragioni di sicurezza, assicurarsi, quando si trasportano pazienti con questa barella, di bloccare ermeticamente il dispositivo di fissaggio paraurti e di allacciare le cinture di sicurezza.
2. Nelle operazioni generali, fare attenzione a non lacerare la superficie della barella.

### **V. Manutenzione:**

1. Pulite regolarmente il prodotto (incl. sterilizzazione).
2. Verificate spesso la presenza di parti allentate.

### **VI. Conservazione e trasporto:**

1. Conservare il prodotto in un luogo al riparo da umidità e corrosione.
  2. Il prodotto può essere trasportato con normali mezzi di trasporto.
  3. È vietato capovolgere il prodotto durante il trasporto o nel luogo di deposito. Sovrapporre la merce come da istruzioni riportate sull'imballo.
-

---

## CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.

Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione.

La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA.

Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura.

La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia.

La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio.

La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulti asportato, cancellato o alterato.

I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.



 GIMA S.p.A. – Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI)  
Made in P.R.C.

Rev. 0.10.14