

CODICE 34076**MANUALE UTENTE - BARELLA PIEGHEVOLE IN 2****SIMBOLI:**

| Simbolo | Definizione del simbolo |
|---|--|
|  | Leggere attentamente le istruzioni per l'uso |
|  | Conservare lontano da luce solare |
|  | Conservare in luogo asciutto |
|  | Prodotto conforme alla Direttiva Europea 93/42 |
|  | Numero di lotto |
|  | Indirizzo fabbricante |
|  | Codice prodotto |

I. Caratteristiche tecniche:

1. Dimensioni prodotto (L x W x H): 188 x 50 x 3 cm
2. Dimensioni prodotto piegato (L x W x H): 99 x 50 x 7 cm
3. Dimensioni imballaggio (2 pz / cartone): 96 x 54 x 16 cm
4. Peso Netto: 4 kg Peso Lordo: 9 kg
5. Capacità di carico: meno di 159 kg

II. Modalità di utilizzo:

Questa barella pieghevole per il primo soccorso, divisibile, è utilizzata principalmente per trasportare pazienti con fratture. Entrambe le estremità della barella hanno cerniere che permettono di separarla in una parte destra e una sinistra. Questo permette di adagiare rapidamente e delicatamente il paziente sulla barella, sul tavolo operatorio o sul letto. La barella può successivamente essere estratta da sotto il paziente.

III. Applicazioni:

Questo prodotto, clinicamente testato, è utilizzabile per il trasporto di feriti e pazienti in ambulanze, ospedali, campi di battaglia e palestre; può inoltre essere utilizzato in operazioni generali.

IV. Attenzione:

1. Per ragioni di sicurezza, assicurarsi, quando si trasportano pazienti con questa barella, di bloccare ermeticamente il dispositivo di fissaggio paraurti e di allacciare le cinture di sicurezza.
2. Nelle operazioni generali, fare attenzione a non lacerare la superficie della barella.

V. Manutenzione:

1. Pulite regolarmente il prodotto (incl. sterilizzazione).
2. Verificate spesso la presenza di parti allentate.

VI. Conservazione e trasporto:

1. Conservare il prodotto in un luogo al riparo da umidità e corrosione.
2. Il prodotto può essere trasportato con normali mezzi di trasporto.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.

Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione.

La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA.

Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura.

La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia.

La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio.

La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulti asportato, cancellato o alterato.

I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.



GIMA S.p.A. – Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI)
Made in P.R.C.

Rev. 0.10.14