



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

SUPPORTO A ROTELLE ROLLING STAND

Manuale d'uso - User manual



ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

REF 35148

Importato e distribuito da/Imported and distributed by:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
Made in China



Istruzioni per l'Utente

Si prega di leggere attentamente le istruzioni del supporto a rotelle prima dell'uso per assicurarne il corretto e ideale funzionamento. Il presente manuale descrive le operazioni di installazione, il funzionamento, la manutenzione, il trasporto e lo stoccaggio. Conservare questo manuale per consultazione futura.



1 Caratteristiche



Rotelle silenziose con freni



Cesto con manico e gancio



Sedi di Installazione del Cesto



Altezza regolabile



Fermo della piastra di montaggio

2 Utilizzo designato

Questo prodotto è progettato per il trasporto di dispositivi come i Monitor paziente, Monitor ECG, ecc., e per rendere più facile ed efficiente il lavoro del personale sanitario.

3 Fotografie



4 Pulizia e Disinfezione

1. Rimuovere il monitor prima di effettuare la pulizia del supporto a rotelle.
2. Si consiglia di pulire periodicamente il supporto. Utilizzare esclusivamente detergenti non corrosivi. Diluire i prodotti detergenti seguendo le istruzioni del produttore.
3. Pulire la superficie del supporto con un panno imbevuto di alcool o detergente, quindi asciugare con un panno asciutto o lasciare asciugare all'aria.

5 Dimensioni e peso:

Dimensioni: 503*461*H 1050 mm

Peso (imballaggio compreso): 10 KG

Dimensioni dell'imballaggio: 780*470*H 185 mm

6 Trasporto e stoccaggio:

1. Trasporto

Trasportare o spostare il supporto a rotelle all'interno del suo imballaggio originale, mantenere asciutto ed evitare urti e buche.

2. Condizioni di stoccaggio:

Conservare il supporto a rotelle in un ambiente asciutto e ben ventilato, privo di polvere e di gas corrosivi.

Quando il supporto è all'interno nel suo imballaggio originale, non appoggiarvi sopra altri prodotti oltre quattro strati. La stanza di stoccaggio deve essere a temperatura ambiente.

7 Elenco d'imballaggio

Kit di base *1

Piastra di montaggio *1

Asta di supporto *1

Rotella *4


Utensile per l'installazione *1

8 Risoluzione dei problemi

Problema	Analisi	Soluzione
L'asta di supporto vibra	Le viti di fissaggio alla base potrebbero essere allentate	Controllare le viti e stringerle se necessario
L'altezza del supporto non può essere regolata	Le viti di regolazione sul manico sono troppo strette / allentate	Effettuarne la regolazione come desiderato

9 Installazione


Elenco dei componenti

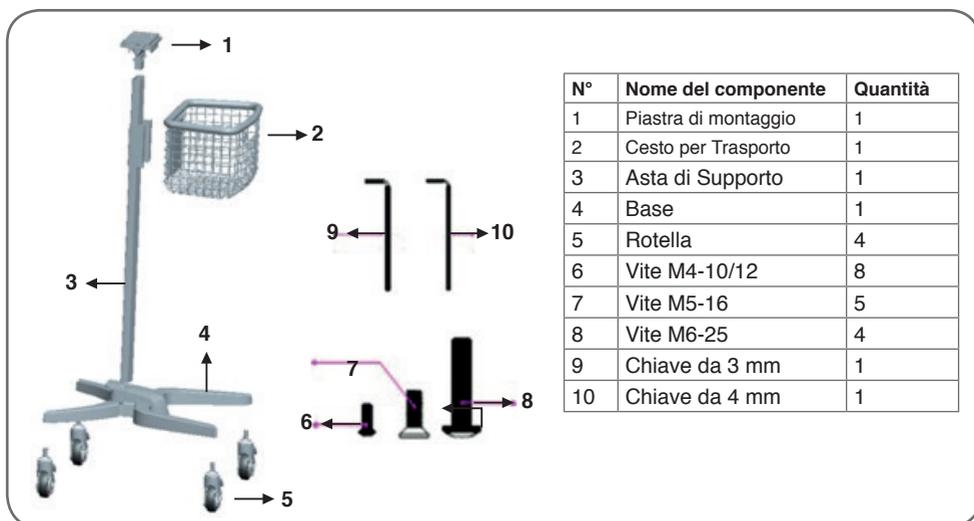

N°	Nome del componente	Quantità
1	Piastra di montaggio	1
2	Cesto per Trasporto	1
3	Asta di Supporto	1
4	Base	1
5	Rotella	4
6	Vite M4-10/12	8
7	Vite M5-16	5
8	Vite M6-25	4
9	Chiave da 3 mm	1
10	Chiave da 4 mm	1


Fase 1:

Fissare le rotelle nelle relative sedi sulla base.

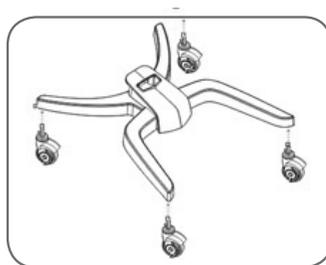


Fase 2:

Inserire l'asta di supporto nella base e fissarla con viti M6-25.

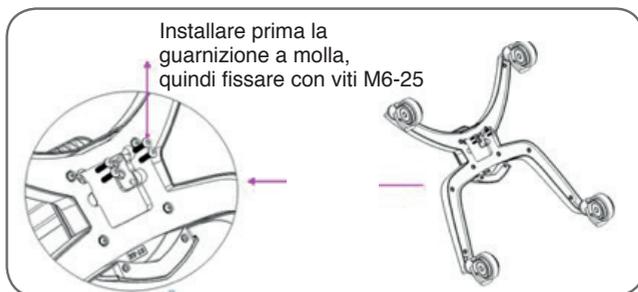

Fase 3:

Installare il cesto di trasporto e fissarlo con viti M4-10 e M4-12 seguendo le immagini seguenti

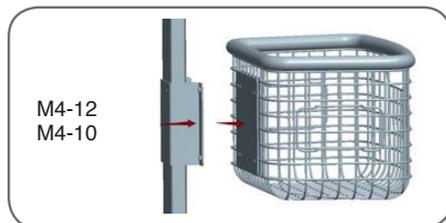

Fase 4:

Inserire la piastra di montaggio nell'asta di supporto e fissarlo con viti M5-16.



Simboli

<p>REF</p>	<p>Codice prodotto</p>		<p>Conservare al riparo dalla luce solare</p>		<p>Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso</p>
<p>LOT</p>	<p>Numero di lotto</p>		<p>Conservare in luogo fresco ed asciutto</p>		

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.

Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA. Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura. La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia. La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio. GIMA non risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc. La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulta asportato, cancellato o alterato. I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.