

ALZAWATER


RAISED TOILET SEAT

REHAUSSEUR WC




ALZAWATER

TOILETTENSITZERHÖHUNG

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ

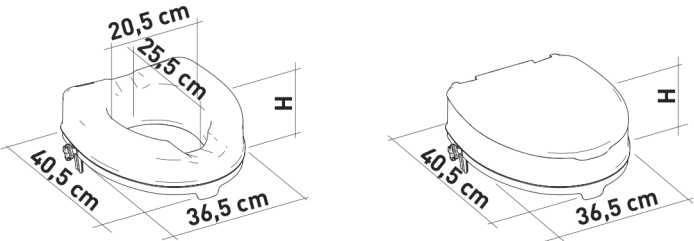

COD.	H	CON COPERCHIO - WITH LID AVEC COUVERCLE - CON TAPA MIT DECKEL - ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
27735	10CM/4"	✓
27737	15CM/6"	✓
27740	15CM/6"	
27741	10CM/4"	

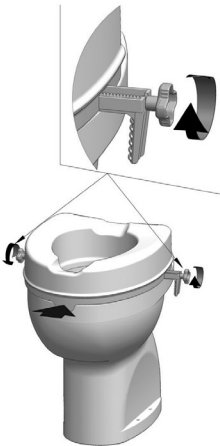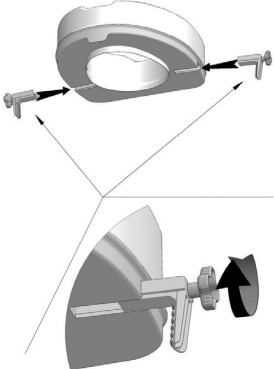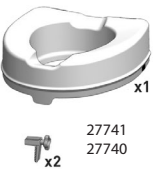

Carico massimo
Max load
Charge maximale
Carga máxima:
550 lb/250Kg



27735	ALZAWATER 10 CM CON COPERCHIO	RAISED TOILET SEAT 10 CM WITH LID	REHAUSSEUR WC 10 CM AVEC COUVERCLE	ALZAWATER 10 CM CON TAPA	TOILETTENSITZERHÖHUNG 10 CM MIT DECKEL	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 10 CM ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
27737	ALZAWATER 15 CM CON COPERCHIO	RAISED TOILET SEAT 15 CM WITH LID	REHAUSSEUR WC 15 CM AVEC COUVERCLE	ALZAWATER 15 CM CON TAPA	TOILETTENSITZERHÖHUNG 15 CM MIT DECKEL	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 15 CM ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
27740	ALZAWATER 15 CM	RAISED TOILET SEAT 15 CM	REHAUSSEUR WC 15 CM	ALZAWATER 15 CM	TOILETTENSITZERHÖHUNG 15 CM	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 15 CM
27741	ALZAWATER 10 CM	RAISED TOILET SEAT 10 CM	REHAUSSEUR WC 10 CM	ALZAWATER 10 CM	TOILETTENSITZERHÖHUNG 10 CM	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 10 CM

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

USO PREVISTO:

Los productos están diseñados para aumentar la altura total del inodoro, facilitando el levantarse y sentarse y promoviendo el uso independiente. La versión con tapa garantiza mejores condiciones de higiene al tirar de la cadena. La tapa puede utilizarse como silla cuando está cerrada.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES:

El asiento elevado para inodoro está concebido para personas mayores, usuarios de sillas de ruedas, personas con movilidad reducida de la región lumbar, caderas o rodillas y cualquier persona que pueda tener dificultades para sentarse o levantarse del inodoro. Se requiere una capacidad adecuada para sentarse de forma independiente durante el uso. No se recomienda el uso del alzawater en casos de trastornos de la percepción o problemas de equilibrio.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

- El usuario no debe superar el peso máximo indicado en las instrucciones.
- Antes de cada uso, asegúrese de que el alzawater está colocado firmemente en el inodoro y fijado a él mediante el sistema de fijación suministrado.
- No apriete demasiado el sistema de fijación.
- Durante el montaje, siga atentamente las instrucciones del manual.
- No modifique el alzawater y sus componentes de ninguna manera.
- No use el alzawater si está dañado. Las grietas y las deformaciones pueden afectar seriamente al uso seguro del aparato.
- Asegúrese de que la altura del asiento sea lo suficientemente alta para que al usuario el resulte fácil y seguro de usar.
- Cuando utilice el dispositivo, evite posiciones que pongan el peso de su cuerpo demasiado adelante. Las posturas incorrectas pueden provocar condiciones inestables y el riesgo de que el alzawater se vuelque.
- El alzawater no debe colocarse en el exterior.

INFORMAIONES SOBRE EL MANTENIMIENTO:

El mantenimiento del producto consiste en su limpieza e higienización. Para garantizar un nivel de higiene adecuado, el usuario debe repetir estas operaciones antes de cada uso. El usuario debe garantizar la integridad estructural del dispositivo y sus componentes. Siga las siguientes instrucciones para la limpieza e higienización:

1. Use guantes.
2. Elimine la suciedad más evidente antes de proceder a una desinfección más exhaustiva.
3. Utilice agua o un detergente no agresivo para la limpieza.
4. Seque con un paño limpio y seco.










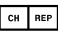
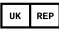
Como alternativa, el alzawater se puede higienizar en un lavavajillas doméstico a la máxima temperatura.

CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN:

El producto es apto para ser reutilizado por otros usuarios. Antes de ser reutilizado por otras personas, el producto debe limpiarse e higienizarse adecuadamente. Antes de entregar el producto a otras personas, debe ser revisado por distribuidores cualificados.

PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN:

No tire el producto a la basura doméstica normal. Póngase en contacto con las autoridades locales para conocer el procedimiento correcto de eliminación.

	Código producto		Número de lote
	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Fabricante
	Número de serie		Fecha de fabricación
	Producto sanitario		Consultar las instrucciones de uso
	Identificador de dispositivo único		Representante autorizado en Suiza
	Representante autorizado en el Reino Unido		

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.



27735 - 27737 - 27740 - 27741

M27735-M-Rev.3-10.25



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



Medicare Ag
Hauptstrasse, 51 5024 Kuttigen, Schweiz
CHRN-AR-20002506



Maclin Power Ltd
20 Wenlock Road London N1 7GU
England, United Kingdom

