



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**TEST PER LA VISIONE STEREOSCOPICA – TEST FOR  
STEREOSCOPIIC VISION – EXAMEN DE LA VISION  
STÉRÉOSCOPIQUE – TEST FÜR STEREOSKOPISCHES SEHEN –  
TEST PARA LA VISIÓN ESTEREOSCÓPICA – TESTE PARA A VISÃO  
ESTEREOSCÓPICA – ΤΕΣΤ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ –**

**إختبار للرؤية المجسّمة**

---

Distribuito da:  
GIMA S.p.A.  
Via Marconi, 1  
20060 Cessate (MI) - Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com  
Made in Italy

**REF** 31293



M31293-M-Rev.1.05.21

Permite a avaliação da cooperação entre os dois olhos em formar uma única imagem a partir das duas imagens que cada um dos dois olhos fornece ao cérebro.

Pode ser usado em crianças a partir de um ano de idade e nos adultos.

Método e modo de uso:

O teste é constituído de um cartão que mostra 4 figuras:

uma bola, um peixe, uma estrela e uma árvore.

Foram escolhidas imagens comuns que podem ser reconhecidas e chamadas pelo nome seja pelo adulto que pela criança.

Ao paciente submetido ao teste é pedido de indicar o que vê no cartão observando os seus movimentos oculares.

A bola é o único elemento visível só com um olho, os outros (cada um destes encontra-se em níveis diferentes de profundidade) podem ser vistos só por quem possui visão binocular e tem um visus superior a 2-3/10. Nos testes que envolvem crianças que cooperam e adultos, o cartão é apresentado a 30-40 cm de distância e é pedido de indicar as figuras: se o paciente vê só a bola, o teste indica uma patologia.

O teste é normal se o paciente vê e identifica todas as figuras.

Resumindo:

Resultado positivo:

todas as figuras são reconhecidas e chamadas com o nome certo.

Resultado incerto:

Só uma das figuras é reconhecida.

Resultado negativo:

Nenhum dos objetos tridimensionais é reconhecido.

Indicações para a avaliação do teste:

suspeito de strabismo, de ambliopia, de redução visiva em um ou em ambos os olhos, ou como teste de screening para a visão estereoscópica.

É possível submeter as crianças que não cooperam ao teste apresentando o cartão e observando o comportamento. Se a criança tenta pegar um dos objetos representados além da bola (o peixe, a estrela ou a árvore), significa que o teste é normal.

Se isto não acontece o teste não pode ser considerado certamente patológico e poderá ser repetido depois de algum tempo.

Importante: em caso de resultado negativo ou incerto, é aconselhável submeter o paciente a um exame oculístico completo.

#### **CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA**

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.