



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA ELETTRONICA PER NEONATI E BAMBINI
ELECTRONIC BABY AND CHILD SCALE
PÈSE-BÉBÉ ET PÈSE-PERSONNE POUR ENFANT ÉLECTRONIQUE
BALANZA ELECTRÓNICA PARA NIÑOS Y BEBÉS
ELEKTRONISCHE BABY- UND KINDERWAAGE
BALANÇA ELECTRÓNICA PARA PESAR BEBÉS E CRIANÇAS
WAGA ELEKTRONICZNA DLA NIEMOWŁĄT I MAŁYCH DZIECI
CÂNTAR ELECTRONIC PENTRU BABY ȘI COPII
ELEKTRONSKA BEBI I DJEČJA VAGA
ELEKTRONSKA DIGITALNA TEHTNICA ZA DOJENČKE IN OTROKE
ELEKTRONICKÁ DĚTSKÁ A KOJENECKÁ VÁHA
ELEKTRONIKUS BÉBI- ÉS GYERMEKMÉRLEG
ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА ЗА НОВОРОДЕНИ И ДЕЦА
VASTASYNTYNEIDEN JA LASTEN ELEKTRONINEN VAAKA
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
ELEKTRONISK VÅG FÖR NYFÖDDA OCH BARN

Manuale utente - User manual - Notice d'utilisation - Manual de uso - Gebrauchsanweisung Guia para utilização
- Instrukcja obsługi - Instrucțiuni de utilizare - Uputstvo za uporabu Navodilo za uporabo - Návod k obsluze -
Használati utasítás - Ръководство на потребителя - Käyttöopas Εγχειρίδιο χρήσης - Användarmanual

Gima 27312

Manufacturer / Fabbricante / Fabricant / Fabricante / Producent /
Hersteller / Producător / Výrobce / Proizvođač / Gyártó / Valmistaja:

Momert Zrt.

2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14

info@momert.hu - www.momert.hu

Made in Hungary



REF 6477


Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por /
Distribuído por / Dystrybuowane przez / Vertrieben von / Distribuit
de / Distribuovaný / Distribuirao / Forgalmazza / Jakelija:

Gima S.p.A

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy

gima@gimaitaly.com - expotr@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

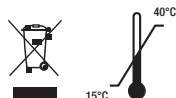

Gracias por elegir nuestro producto. Su balanza electrónica para bebés es un instrumento de medición sensible, por lo tanto, debe protegerlo contra sobrecarga y grandes cargas dinámicas. Nunca deje a su bebé solo en el platillo de pesaje. Por favor, lea las instrucciones de uso antes de utilizar la balanza. Su nueva balanza electrónica para bebés ha sido diseñada para medir el peso del bebé y mostrar su diferencia de peso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Función de retención automática
- Sistema de medición de precisión
- Función de visualización de diferencia de peso
- Función de tara
- Indicador de batería baja ("Lo")
- Apagado automático

Parámetros técnicos	
Voltaje	2 piezas de baterías de litio de 3 V CR2032
Rango de peso	20 kg.
Incrementos de peso	5 g.
Unidades de peso	Kg, oz, lb:oz
Temperatura de funcionamiento/	20-25 °C/ 15-40 °C almacenamiento
Tamaño de pantalla	Diámetro de pantalla LCD = 8 cm, 3.15 pulgadas

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de respetar la polaridad indicada de la batería cuando la inserta y la reemplaza.
- Si el aparato estará fuera de uso por un tiempo prolongado, quite la batería.
- No deje la unidad desatendida cuando está en uso.
- Este aparato no está diseñado para su uso por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato.
- Utilice el producto únicamente para la finalidad especificada en el Manual de Funcionamiento.
- Utilice la unidad únicamente sobre una superficie horizontal estable.
- Antes de iniciar la limpieza, el montaje o desmontaje de la tapa, apague la unidad y retire la batería.
- No utilice sustancias químicamente agresivas o abrasivas para la limpieza de la unidad.
- No utilice la unidad si no funciona correctamente, o si se ha caído o dañado, o ha sido expuesta a cualquier clase de líquidos. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado para probar y reparar.
- La unidad es apta para uso doméstico solamente. No está diseñada para la operación comercial.
- Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor como radiadores, hornos, etc. No exponga la unidad a la luz solar directa ni a la humedad.
- No toque la unidad con las manos mojadas o húmedas.
- El producto es un dispositivo de medición frágil. Evite que se caiga accidentalmente o que se golpee.
- No repare el aparato usted mismo. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

EN CASO DE NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, PUEDE RESULTAR EN LA DENEGACIÓN DE LA REPARACIÓN DE GARANTÍA.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- 1 Superficie de pesaje (bandeja de bebés)
- 2 Botón de ENCENDIDO/APAGADO
- 3 Botón de TARA
- 4 Botón de UNIT
- 5 Pantalla



- La balanza se puede encender y apagar con el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO). (Pulsar el botón una vez.)
- Con el botón de TARA se puede utilizar la función de tara. "0.00" aparece en la pantalla durante 2 segundos después de pulsar el botón. Si no necesita que la diferencia de peso se muestre en pantalla, entonces al pulsar el botón de TARA durante 3 segundos se puede borrar la memoria. "M" desaparecerá de la pantalla.
- El botón de UNIT es apto para elegir la unidad de medida requerida, se puede observar la unidad de medición real en el lado derecho de la pantalla.

USO DE LA BALANZA

- 1 Estas balanzas funcionan con dos baterías de litio reemplazables. Retirar la película protectora antes de su uso (Fig. 1).
- 2 Antes de pesar al bebé, ajuste el platillo a la superficie de medición para que el platillo quede estable (Fig. 2).
- 3 No hay necesidad de instalar el platillo si desea pesar a un niño.
- 4 Pulsando una vez el botón de ENCENDIDO/APAGADO, el mensaje "0.00" aparece en la pantalla (Fig.3).
- 5 Coloque el bebé sobre la balanza o ponga al niño de pie sobre la misma. El peso medido aparecerá en la pantalla en unos segundos, y se almacenará en la memoria automáticamente. Aparece una "M" en pantalla que indica la presencia de datos en memoria. Después de realizar la siguiente medición del peso, la pantalla muestra el peso medido y la diferencia entre el peso actual y el peso anterior por espacio de 2 segundos. El último peso registrado se almacena automáticamente en la memoria tanto en apagado manual como automático.
- 6 Pulsando una vez el botón de ENCENDIDO/APAGADO, la balanza se apaga. En caso de no usar la balanza por 30 segundos, la misma se apagará automáticamente.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

FUNCIÓN DE MEMORIA

Después de encender la balanza, aparece una "M" lo que indica que la última medición de peso se ha almacenado en la memoria, de modo que se pueda mostrar la diferencia de peso. Si no necesita que la diferencia de peso se muestre en pantalla, entonces al pulsar el botón de TARA durante 3 segundos, se puede borrar la memoria. El mensaje de "M" desaparecerá de la pantalla. Si extrae las baterías, entonces la memoria también se eliminará.

SOBRE LA TARA

Si utiliza el platillo y el peso agregado (manta, almohada, etc.) es más ligero que 5 kg, después de pulsar el botón de TARA la pantalla muestra "0.00" y el máximo peso a medir será de 20 kg.

Si el peso agregado es superior a 5 kg, después de pulsar el botón de TARA la pantalla muestra "0.00", pero el máximo peso a medir será de menos de 20 kg (más precisamente: 20 kg menos el peso agregado).

OTRA INFORMACIÓN EN LA PANTALLA

Si el aviso de "LO" aparece después de encender (Fig. 4), o no hay nada en la pantalla, la batería está agotada y debe ser sustituida. Abra el soporte de las pilas en la parte posterior de la báscula y saque las pilas con cuidado presionando la pequeña placa de sujeción plateada para sacar las pilas del soporte. Reemplace las baterías bajas por baterías nuevas. Las baterías bajas se deben tirar al lugar adecuado. **LAS BATERÍAS NO ESTÁN INCLUIDAS EN LA GARANTÍA**



Fig. 4

Si el signo "Err" aparece en la pantalla (Fig. 5), significa que la balanza está sobrecargada, en este caso el peso debe reducirse (una sobrecarga puede causar fallos del sensor). Si aparece el mensaje "OUT2" en la pantalla (Fig. 6), significa que el sensor ha experimentado una falla (después de sobrecarga o tras una carga dinámica importante y súbita). En este caso, no tenemos ninguna responsabilidad de garantía por el producto.



Fig. 5



Fig. 6

LIMPIEZA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

La superficie de la unidad sólo puede limpiarse con un paño húmedo. No utilice ningún detergente o objetos duros, ya que pueden dañar la superficie de la unidad. Nunca limpie la unidad bajo el grifo de agua, no la enjuague y no la sumerja en agua. Cualquier mantenimiento o reparación extensa que requiera el acceso a las partes internas del producto debe ser realizada por un experto del centro de servicios.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL











- Los materiales de embalaje y aparatos obsoletos deben ser reciclados.
- La caja de transporte podrá ser eliminada como residuo seleccionado.
- Las bolsas de polietileno serán entregadas para su reciclaje.



Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolas al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

Simboli - Symbols - Symboles - Símbolos - Symbole - Símbolos - Symbolika - Simboluri Simboli - Symboly - Szimbólumok - Символы - Symbolit - Σύμβολα - Symboler	
	IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto DE Erzeugniscode PT Código produto PL Numer katalogowy RO Cod produs HR Sifra proizvoda SI Koda izdelka CZ Kód výrobku HU Termékkód BG Код на продукта FI Tuotekoodi GR Κωδικός προϊόντος SV Produktkod
	IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote DE Chargennummer PT Número de lote PL Kod partii RO Număr de lot HR Broj serije SI Številka partije CZ Číslo šarže HU Tételszám BG Номер на партида FI Eränumero GR Αριθμός παρτίδας SV Satsnummer
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern PT Armazenar em local fresco e seco PL Przechowywać w suchym miejscu RO A se păstra într-un loc răcoros și uscat HR Čuvati na hladnom i suhom mjestu SI Hraniti na suhem in hladnem mestu CZ Skladujte na větraném a suchém místě HU Száraz, hűvös helyen tárolandó BG Да се съхранява на хладно и сухо място FI Säilytä kuivassa ja viileässä GR Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον SV Förvara på svalt och torrt ställe
	IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern PT Guardar ao abrigo da luz solar PL Przechowywać z dala od światła słonecznego RO A se păstra ferit de razele soarelui HR Čuvati zaštićeno od sunčeve svjetlosti SI Hraniti zaščiten pred sončno svetlobo CZ Skladujte mimo sluneční světlo HU Napfénytől védve tárolandó BG Да се съхранява на място, защитено от слънчева светлина FI Säilytä auringonvalolta suojassa GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία SV Skyddas från solljus
	IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso DE Gebrauchsanweisung beachten PT Consulte as instruções de uso PL Przeczytaj instrukcję użytkowania RO Citiți instrucțiunile de utilizare HR Pročitajte upute za uporabu SI Preberite navodila za uporabo CZ Přečtěte si návod k použití HU Olvassa el a használati utasításokat BG Прочетете инструкциите за употреба FI Lue käyttöohjeet GR Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης SV Läs bruksanvisningen
	IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación DE Herstellungsdatum PT Data de fabrico PL Data produkcji RO Data fabricației HR Datum proizvodnje SI Datum proizvodnje CZ Datum výroby HU Gyártás dátuma BG Дата на производство FI Valmistuspäivämäärä GR Ημερομηνία παραγωγής SV
	IT Prodotto conforme alla Direttiva Europea GB Product complies with European Directive FR Ce produit est conforme à la directive européenne ES Producto conforme a la Directiva Europea DE Produkt gemäß EU-Richtlinie PT Produto em conformidade com a Diretiva Europeia PL Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej RO Produs conform cu Directiva Europeană HR Proizvod sukladan Europskoj direktivi SI Produkt som överensstämmer med EU-direktiv CZ Výrobek vyhovuje evropské směrnici HU A termék megfelel az európai irányelvnek BG Продукт, съвместим с Европейската директива FI Tuote on EU-direktiivin mukainen GR Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία SV Produkt som överensstämmer med EU-direktiv
	IT Limite di temperatura GB Temperature limit FR Limite de température ES Limite de temperatura DE Temperaturgrenzwert PT Limite de temperatura PL Granica temperatury RO Limită de temperatură HR Ograničenje temperature SI Hranite pri temperaturi med in °C CZ Omezení teploty HU Hőmérsékleti határérték BG Температурна граница FI Temperatuurin raja GR Όριο θερμοκρασίας SV Temperaturgräns
	IT - Attenzione - Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution - read instructions (warnings) carefully FR - Attention - lisez attentivement les instructions (avertissements) ES - Precaución - lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT - Cuidado - leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE - Achtung - Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen PL - Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi CZ - Pozor - Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny (varování) k použití FI - Huomio - Lue käyttöohjeet (varoitukset) ja noudata niitä huolellisesti SI - Pozor - Preberite in skrbno sledite navodilom (opozorilom) za uporabo RO - Atenție - Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare HU - Figyelem - Figyelmesen olvassa el és kövesse a használati utasításokat (figyelmeztetéseket) BG - Внимание: Прочетете внимателно и спазвайте стриктно инструкциите (предупрежденията) за употреба GR - Προσοχή - διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ειδοτήσεις) SE - Varsamhet - läs anvisningarna (varningar) noga
	IT Smaltimento RAEE GB WEEE disposal FR Disposition DEEE ES Disposición WEEE DE Beseitigung WEEE PT Disposição REEE PL Oddzielną zbiórką dla tego urządzenia RO Eliminare DEEE HR Zbrinjavanje OEEO-a SI Odstranjevanje OEEO CZ Likvidace OEEO HU RAEE szerinti ártalmatlanítás BG Изхвърляне на OEEO FI Sähkö- ja elektroniikkajätteen roppukäsittely GR Διάθεση WEEE SV Avfallsantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)