


**GINRAM®**

**PRODOTTI MONOUSO STERILI PER LA GINECOLOGIA**  
Gynaecological disposable, sterile devices

**AMNIORAM**

***Ago per amniocentesi transaddominale***  
***Transabdominal amniocentesis needle***

**COD.770212 – 770228 – 770222 – 770224 – 770201 – 770226 –  
770227 – 770223 – 770202 – 770229 – 770232 – 770233**

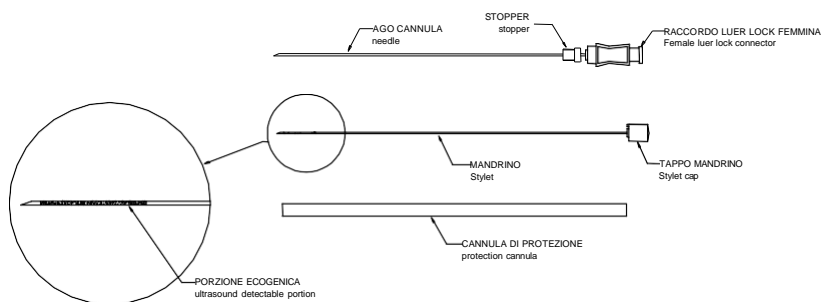

**F****Mode d'emploi**

Enlever l'aiguille du sachet. Avant de commencer l'examen, s'assurer que le cran pour l'accrochement du bouchon est parfaitement introduit dans le logement du raccord. Placer le mécanisme d'arrêt présent sur l'aiguille jusqu'au niveau requis. Enlever la protection de l'aiguille et tenir le mécanisme d'arrêt pour qu'il ne sorte pas. Insérer l'aiguille à travers l'abdomen perpendiculairement et sous contrôle échographique. Atteindre le sac amniotique. Retirer le mandrin et connecter une seringue (normalement de 20cc) au raccord de l'aiguille. Aspirer le liquide amniotique en exerçant une pression négative lente et modérée, afin de prélever la quantité de liquide voulue. Déconnecter la seringue, réinsérer le mandrin dans l'aiguille, puis retirer l'aiguille. Transvaser le liquide amniotique dans une éprouvette sèche et stérile, puis la conserver à une température de 37°.

**Avertissements:** Lire le mode d'emploi avant l'utilisation. Ne pas réutiliser. Utiliser si l'emballage est en parfait état. Conserver à une température comprise entre 0°C et 40°C. Utiliser immédiatement après l'ouverture du sachet. Après l'utilisation détruire le dispositif selon les règles en vigueur. Le dispositif doit être utilisé par personnel médical spécialisé.

***Peut contenir traces de nickel.***

<b>LOT</b> NUMERO DI LOTTO	<b>REF</b> CODICE PRODOTTO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE	 LATEX FREE	<b>STERILE EO</b> STERILIZZAZIONE CON OSSIDO DI ETILENE
 DATA ENTRO CUI IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE USATO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO	 FABBRICANTE	 DATA DI FABBRICAZIONE	 MONOUSO

<b>LOT</b> BATCH CODE	<b>REF</b> REFERENCE NUMBER	 ATTENTION. SEE INSTRUCTIONS FOR USE	 LATEX FREE	<b>STERILE EO</b> STERILIZED BY ETHYLENE OXIDE
 USE BY MM/YYYY	 CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE	 MANUFACTURER	 DATE OF MANUFACTURE	 DO NOT REUSE