


**GINRAM®**

**PRODOTTI MONOUSO STERILI PER LA GINECOLOGIA**  
Gynaecological disposable, sterile devices

**AMNIORAM**

***Ago per amniocentesi transaddominale***  
***Transabdominal amniocentesis needle***

**COD.770212 – 770228 – 770222 – 770224 – 770201 – 770226 –  
770227 – 770223 – 770202 – 770229 – 770232 – 770233**

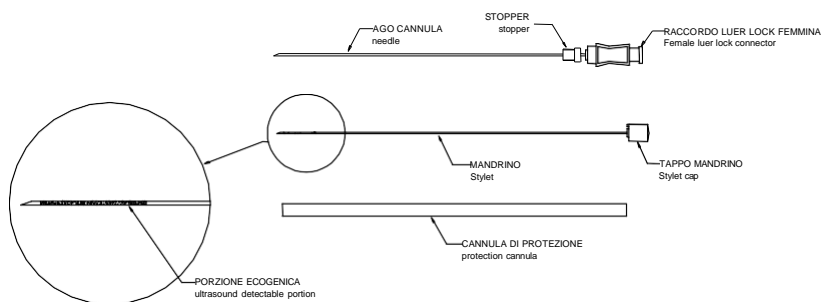

**P****Instruções para o uso**

Extrair a agulha da embalagem.

Antes de começar o exame assegurar-se de que a marca de encaixe da tampa está perfeitamente inserida no alojamento da conexão. Colocar o stopper na cânula, à la altura desejada, extrair a proteção da agulha e segurar o stopper com uma das mãos, para evitar que saia do sítio. A fim de seguir o traçado do ultra-som (identificado previamente), introduzir a agulha num eixo perpendicular, até ela chegar a uma cisterna amniótica.

Retirar o mandril e aplicar uma seringa com a capacidade desejada (normalmente 20 cc), à agulha.

Proceder à aspiração do líquido amniótico exercendo uma pressão negativa lenta e suave, até obter a quantidade de líquido desejada.

Retirar a seringa, inserir de novo o mandril na agulha e remover a agulha.

Transferir o líquido amniótico para uma proveta seca e estéril que deve ser conservada à temperatura de 37°.

**Recomendações:** assegure-se de que o mandril está perfeita e completamente inserido na agulha.

Conservar a uma temperatura entre 0°C e 40°C. Utilizar sob o controlo rigoroso do médico.

Utilizar imediatamente após a abertura do invólucro". ***Pode conter traços de níquel.***

<b>LOT</b> NUMERO DI LOTTO	<b>REF</b> CODICE PRODOTTO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE	 LATEX FREE	<b>STERILE EO</b> STERILIZZAZIONE CON OSSIDO DI ETILENE
 DATA ENTRO CUI IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE USATO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO	 FABBRICANTE	 DATA DI FABBRICAZIONE	 MONOUSO

<b>LOT</b> BATCH CODE	<b>REF</b> REFERENCE NUMBER	 ATTENTION. SEE INSTRUCTIONS FOR USE	 LATEX FREE	<b>STERILE EO</b> STERILIZED BY ETHYLENE OXIDE
 USE BY MM/YYYY	 CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE	 MANUFACTURER	 DATE OF MANUFACTURE	 DO NOT REUSE