


GINRAM®

PRODOTTI MONOUSO STERILI PER LA GINECOLOGIA
Gynaecological disposable, sterile devices

AMNIORAM

Ago per amniocentesi transaddominale
Transabdominal amniocentesis needle

**COD.770212 – 770228 – 770222 – 770224 – 770201 – 770226 –
770227 – 770223 – 770202 – 770229 – 770232 – 770233**

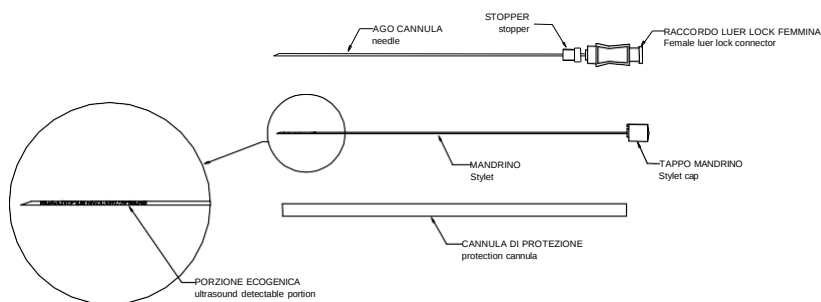

E**Instrucciones para el uso**

Quitar la aguja de su envase. Antes de empezar el examen, cerciorarse de que la marca de fijación de la tapa se encuentre perfectamente introducida en el alojamiento de la unión. Ubicar el tope a la altura deseada de la cánula. Extraer la protección de la aguja y tener con una mano el tope para que no salga de su posición.

Introducir la aguja según un eje perpendicular para poder seguir el trazado del ultrasonido (identificado precedentemente) hasta llegar al saco amniótico. Quitar el mandril y conectar una jeringa de la capacidad deseada (aproximadamente 20 cc) a la aguja. Aspirar el líquido amniótico creando una presión negativa lenta y moderada hasta extraer la cantidad de líquido deseada. Quitar la jeringa, volver a introducir el mandril en la aguja y quitar. Introducir el líquido amniótico en una probeta seca y estéril y conservar a una temperatura de 37°C.

Advertencias: controlar que el mandril esté perfecta y completamente insertado en la aguja.

Leer las instrucciones antes del uso. No reutilizar – utilizar sólo si el envase se encuentra íntegro. Conservar a una temperatura entre 0°C y 40°C. Utilizar inmediatamente después de la apertura del envase. Eliminar después de su uso en conformidad con la legislación vigente. El dispositivo tiene que ser utilizado exclusivamente por personal médico especializado.

Puede contener trazas de níquel.

Amnioram

Última revisión: Ottobre 2024

LOT NUMERO DI LOTTO	REF CODICE PRODOTTO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE	 LATEX FREE	STERILE EO STERILIZZAZIONE CON OSSIDO DI ETILENE
 DATA ENTRO CUI IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE USATO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO	 FABBRICANTE	 DATA DI FABBRICAZIONE	 MONOUSO

LOT BATCH CODE	REF REFERENCE NUMBER	 ATTENTION. SEE INSTRUCTIONS FOR USE	 LATEX FREE	STERILE EO STERILIZED BY ETHYLENE OXIDE
 USE BY MM/YYYY	 CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE	 MANUFACTURER	 DATE OF MANUFACTURE	 DO NOT REUSE