

**D:** Posso utilizzare il Tape senza la supervisione di personale esperto?

**R:** Certamente. Puoi procedere in maniera del tutto autonoma, non è necessario tu conosca il prodotto.

**D:** Come si utilizza il prodotto?


**R:** È sufficiente seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso: utilizza pezzi riporti, rimuovi la pellicola, quindi applica sulla parte interessata.

**D:** Cosa significa il simbolo a forma di pallone con la scritta "Tape Technology GIMA"?

**R:** È un indicatore dell'elasticità.

**D:** Per ottenere un'aderenza ottimale, tendere il Tape fino a raggiungere una forma circolare.

**R:** Per la massima estensibilità di sicurezza, tendere il Tape fino a raggiungere la forma esagonale.

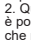

**D:** Per quanto tempo va mantenuto applicato sul corpo?

**R:** Si consiglia di applicarlo per 4-7 giorni. Rimuovere qualora si manifesti un'evidente irritazione o si avverta una sensazione di fastidio.

**D:** Quante applicazioni sono necessarie per ottenere un'aderenza ottimale?


**R:** Si consiglia normalmente 12 applicazioni, tuttavia il miglioramento effettivo dipende dalla risposta del proprio organismo.

**D:** In fase di applicazione, ci sono altri punti da considerare?

**R:**


- 1. Prima dell'applicazione, assicurarsi che la pelle sia ben asciutta.
- 2. Qu qualora si estenda eccessivamente il Tape, è possibile avvertire una sensazione di prurito, che dura solo 10 minuti.
- 3. Il Tape aderisce completamente dopo 30 minuti, diventando resistente al sudore.
- 4. Si consiglia di mantenere il Tape applicato dai 4 ai 7 giorni. Dopo la completa adesione alla cute, è possibile fare la doccia senza che il Tape subisca danni.

**5**



Pezzo 5: applicare 1 sulla sommità della spalla, stendere 2 leggermente verso il basso quindi applicare sul pezzo anteriore 1.

## REGIONE CERVICALE

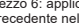


**Pezzo 6:** applicare 1 sopra la parte 1 precedente nel centro, tendere 2 verso entrambi i fianchi, quindi applicare.

POLSO

CAVIGLIA

**REGIONE DORSALE**

14

**POI PACCIO**

**1**

Pezzo 1: applicare sul tallone in prossimità della caviglia, tendere verso l'alto i due lembi a forma di "Y" lungo i lati del polpaccio, quindi applicare.

**REF** 34745 - 34746 - 34747 - 34749  
34750 - 34751 - 34752 - 34757












M34745-IT-FR-Rev.3.12.25