

MOPEDIA®

ESPAÑOL

MA RH150-RH720 02 A_ESP_09 2020

MULETILLA Y CUADRÍPODE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ÍNDICE

1. CÓDIGOS.....	PAG.3
2. INTRODUCCIÓN.....	PAG.3
3. FINALIDAD	PAG.3
4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD.....	PAG.3
5. ADVERTENCIAS GENERALES.....	PAG.4
6. SÍMBOLOS.....	PAG.4
7. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	PAG.4
8. ANTES DE CADA USO	PAG.4
9. ADVERTENCIAS PARA EL USO	PAG.5
10. INSTRUCCIONES DE USO.....	PAG.5
10.1 Regulación del altura por RH150	pag. 5
10.2 Regulación del altura por RH720	pag. 5
10.3 Regulación del cuadrípode según el lado de uso	pag. 6
11. MANTENIMIENTO	PAG.6
12. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PAG.6
12.1 Limpieza.....	pag. 6
12.2 Desinfección	pag. 6
13. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN	PAG.6
14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PAG.6
15. GARANTÍA	PAG.7
16. REPARACIONES.....	PAG.7
16.1 Reparaciones en garantía.....	pag. 7
16.2 Reparación de un producto no cubierto por garantía.....	pag. 7
16.3 Productos no defectuosos	pag. 7
17. REPUESTOS	PAG.8
18. CLÁUSULAS EXONERATIVAS	PAG.8

CE Dispositivo medico di classe I

REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici

1. CÓDIGOS

RH150 Muletila ajustable en altura - MULETILLAS

RH720 Cuadrípode con empuñadura abierta - TRÍPODES Y CUADRÍPODES

2. INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido una ayuda de la línea MOPEDIA fabricada por Moretti S.p.A. Su diseño y calidad garantizan el máximo confort, la máxima seguridad y fiabilidad. Las muletilas y cuadrípodes MOPEDIA de MORETTI S.p.A. han sido diseñadas y fabricadas para satisfacer todas sus exigencias de uso práctico y correcto de los mismos. Este manual de instrucciones contiene algunas sugerencias que le permitirán usar correctamente el equipo que Ud. ha elegido, así como valiosos consejos para su seguridad. Se aconseja leer atentamente todo el manual antes de utilizar las muletilas. En caso de dudas contacte con el distribuidor, que estará en condiciones de brindarle ayuda y consejos.

3. FINALIDAD

Las muletilas de la línea MOPEDIA by MORETTI S.p.A. son ayudas accionadas por un brazo adecuado para ayudar la movilidad de personas con dificultad de deambulación.

¡ATENCIÓN!



- Queda prohibido el uso del dispositivo por fines distintos de los indicados en este manual.
- Moretti S.p.A. declina toda responsabilidad por los daños provocados a causa de un uso incorrecto del dispositivo o por un uso diferente al indicado en el presente manual
- El productor se reserva el derecho de modificaciones al dispositivo o al manual sin aviso previo para mejorar sus características.

4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Moretti S.p.A. declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos fabricados e introducidos en el mercado por la misma MORETTI Spa que hacen parte de la familia MULETILLAS (RH150), TRÍPODES Y CUADRÍPODES son conformes con las disposiciones del reglamento 2017/745 sobre los PRODUCTOS SANITARIOS del 5 Abril 2017. Para ello, MORETTI Spa. declara bajo su exclusiva responsabilidad los siguientes puntos:

1. Los productos en cuestion satisfacen los requisitos generales de seguridad y prestacion como requerido por el anexo 1 del reglamento 2017/745 como prescrito por el anexo IV del mismo reglamento.
2. Los productos en cuestión NO SON INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.
3. Los productos en cuestión NO ESTÁN DESTINADOS A INVESTIGACIONES CLÍNICAS.
4. Los productos en cuestión se comercializan en presentación NO ESTÉRIL.
5. Los productos en cuestión deben considerarse de clase I en conformidad a lo establecido en el anexo VIII del mismo Reglamento.
6. MORETTI S.p.A. mantiene y pone a disposición de las Autoridades Competentes, por 10 anos desde la fecha de fabricación del ultimo lote, la documentación técnica que comprueba la conformidad con el Regl6.

Nota: Los códigos completos de los productos, el código de registraci3n del Fabricante (SRN), el código UDI-DI de base y eventuales referencias a normas utilizadas se encuentran en la Declaraci3n de Conformidad UE que MORETTI SPA emite y mete a disposici3n a trav3s de sus canales.

5. ADVERTENCIAS GENERALES

Para el uso correcto del dispositivo, consulte este manual:

- Consulte a su médico o terapeuta para un uso correcto del producto.
- La vida del producto depende del desgaste de partes que no se pueden reparar e/o sustituir.
- Verifique que el producto est intacto cuando lo entreguen, y mantener el producto embalado alejado de fuentes de calor
- Tener cuidado a la presencia de niños.
- El usuario y/o el paciente tendrá que señalar al fabricante y al Autoridad competente del Estado miembro en el cual el usuario/paciente está establecido cualquier incidencia grave que se verifique en relación al dispositivo.

6. SÍMBOLOS



Código producto



Identificación única de productos



Marcado CE



Fabricante



Lote de producción



Leer el manual de instrucciones



Producto sanitario



Condiciones de eliminación 2017/45

7. DESCRIPCIÓN GENERAL

RH150

La muletila BRIO HD es en acero y tiene una empuñadura abierta en PVC y una contera ancha en goma antideslizante. Ajustable en altura cada 2,5cm. Es útil para garantizar una seguridad de apoyo y de confianza. La muletila, además, facilita la permanencia en posición erguida y el camino. Favorece la descarga de los segmentos corporales inferiores, estabiliza a la persona en los problemas de equilibrio y la sostiene cuando están presentes problemas de fuerza.

RH720

El cuadrípode BRIO HD es en acero y tiene una empuñadura abierta en PVC y una contera ancha en goma antideslizante. Ajustable en altura cada 2,5cm. Es útil para facilitar la estación erecta del usuario y el camino. Favorece la descarga de los segmentos corporales inferiores, estabiliza a la persona en los problemas de equilibrio y la sostiene cuando están presentes problemas de fuerza.

8. ANTES DE CADA USO



¡ATENCIÓN!

- Siempre averiguar el desgaste de las partes, para garantizar el utilizzo en total seguridad para personas y cosas.
- Averiguar que el clip esté correctamente insertado en el agujero y que el producto esté bien montado.

9. ADVERTENCIAS PARA EL USO

- Usar con precaución en superficies mojadas y resbaladizas. Evite dejar el dispositivo afuera y en contacto con el agua durante un período prolongado de tiempo.
- Compruebe periódicamente la estabilidad y robustez del producto, así como el estado de las conteras de soporte.
- Sustitúyelas una vez que estén desgastadas.
- En caso de dudas sobre el utilizzo, la regulación, el mantenimiento del producto, contacte con el revendedor.
- Para evitar cualquier riesgo, mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.



¡ATENCIÓN!

- No exceda el peso máximo del paciente indicado en la etiqueta del producto y en el capítulo de características técnicas de este manual.

10. INSTRUCCIONES DE USO

Nota: Consulte las advertencias de seguridad en este manual de instrucciones.

El uso de la muletila o del cuadrípode varía de un caso a otro. Para esto, se requiere un mínimo de formación por parte de personal especializado con referencia a las indicaciones sobre el tipo de paso que hacer o sobre el tipo de apoyo. Durante la asistencia al paciente, el operador siempre se coloca en la parte más débil o enferma del cuerpo.

10.1 Regulación del altura por RH150

Para regular el altura de la muletila seguir las indicaciones:

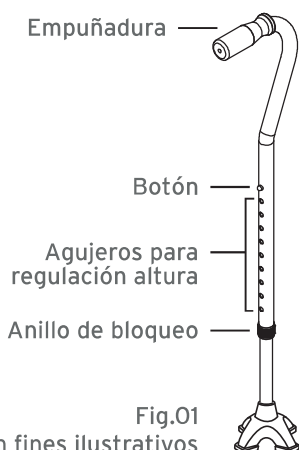


Fig.01

Imagen con fines ilustrativos

- Destornillar el anillo de bloqueo (Fig.01);
- Presionar al botón de regulación y ajustar la muletila hasta el altura deseada;
- Fijar la posición bloqueando el botón en uno de los agujeros (se oye un click en cuanto el botón esté posicionado correctamente en el agujero)
- Apretar el anillo de bloqueo.

10.2 Regulación del altura por RH720

Para regular el altura del cuadrípode seguir las indicaciones:

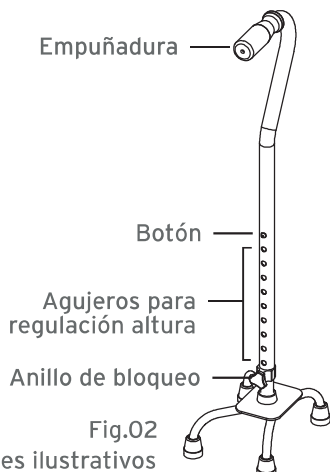


Fig.02

Imagen con fines ilustrativos

- Destornillar la perilla de bloqueo (Fig.02);
- Presionar al botón de regulación y ajustar la muletila hasta el altura deseada;
- Fijar la posición bloqueando el botón en uno de los agujeros (se oye un click en cuanto el botón esté posicionado correctamente en el agujero)
- Apretar el anillo de bloqueo.

10.3 Regulación del cuadrípode según el lado de uso

Para regular el lado de uso del cuadrípode a la derecha o a la izquierda es necesario:

- Destornillar la perilla de bloqueo;
- Presionar el botón de regulación y girar el empuñadura de 180° hasta que el botón no vuelva en el agujero a la misma altura al otro lado del cuadrípode;
- Apretar la perilla de bloqueo.

11. MANTENIMIENTO

Los accesorios de la línea MOPEDIA by Moretti son controlados cuidadosamente antes de ponerlos en el mercado y tienen marcado CE. Por la seguridad del paciente y del operador se recomienda hacer controlar el dispositivo por personal cualificado cada 2 años, para asegurarse la idoneidad al uso. Por inspección periódica se entenderá un examen de las siguientes partes:

- La estructura de la muletila;
- Las conteras.

En caso de reparación se recomienda utilizar recambios y accesorios originales solamente.

12. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

12.1 Limpieza

Utilizar exclusivamente un paño húmedo para quitar el polvo, y un paño húmedo con jabón neutro para eliminar la suciedad más dura. Secar bien antes del uso.



¡ATENCIÓN!

La temperatura del agua no tiene que ser superior a los 30°C. No utilice lavadoras con chorro de agua y/o vapor.

12.2 Desinfección

Si es necesario, desinfectar el producto con un detergente desinfectante suave.



¡ATENCIÓN!

Evite absolutamente el uso de productos ácidos, alcalinos o solventes como acetona o diluyentes.

13. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN

En caso de eliminación del dispositivo nunca utilizar los sistemas de eliminación de los desechos urbanos. Se recomienda entregar el dispositivo a los centros de recogida selectiva designados por las administraciones municipales.

14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RH150



ALTURA AJUSTABLE: DE 74 A 97 CM



CARGA MÁXIMA: 226 KG

Estructura en acero

Mango abierto con empuñadura en PVC

Contera base ancha en goma antideslizante

RH720

 ALTURA AJUSTABLE: DA 74 A 97 CMDIMENSIONES BASE:  L: 15,5 CM  P: 20,5 CM CARGA MÁXIMA: 226 KG

Estructura en acero

Mango abierto con empuñadura en PVC

15. GARANTÍA

Todos los productos MORETTI tienen una garantía de 2 años de la fecha de venta por defectos de fabricación o de material. La garantía no se aplica en caso de daños causados por uso inadecuado, abusos, alteraciones y en caso de que no se respeten las instrucciones de uso. La finalidad correcta del producto está indicada en el manual de instrucciones. Moretti no es responsable por los daños provocados de una instalación o uso del dispositivo no conforme con las instrucciones que se encuentran en el manual para la instalación, el montaje y el uso. Moretti no garantiza los productos Moretti por daños o defectos en las condiciones siguientes: calamidades, operaciones de mantenimiento o reparación no autorizadas, daños causados por el alimentación eléctrica (donde está), uso de piezas no suministradas por Moretti, por no respetar las instrucciones de uso, modificaciones no autorizadas, daños de expedición (distintas de las expediciones originales de Moretti), falta del mantenimiento indicado por el manual. No están cubiertas por la garantía piezas sujetas al deterioro si el daño es causado por normal uso del producto

16. REPARACIONES

16.1 Reparaciones en garantía

En caso de que un producto Moretti tenga defectos de material o fabricación durante del periodo de la garantía, Moretti evaluará con el cliente si el defecto del producto está cubierto por la garantía. Moretti, según su incontestable criterio, puede substituir o reparar el artículo en garantía a través de un distribuidor Moretti o en sus mismas oficinas. Los gastos de la mano de obra por la reparación del producto pueden ser a cargo de Moretti si el producto está cubierto por la garantía. Una reparación o substitución no renueva ni extiende la garantía

16.2 Reparación de un producto no cubierto por garantía

Prevía autorización de Moretti se puede devolver por reparación un producto que no esté más cubierto por la garantía. Los gastos de la mano de obra y de los portes relativos a una reparación que no esté cubierta por la garantía son completamente a cargo del cliente o distribuidor. Las reparaciones de productos no en garantía se garantizan por los 6 meses siguientes de la fecha de entrega del producto reparado.

16.3 Productos no defectuosos

Moretti avisará al cliente si después de probar el producto constatará que no es defectuoso. Moretti devolverá el producto al cliente que se cargará de los gastos de los portes para la devolución.

17. REPUESTOS

Los repuestos originales Moretti son garantizados por 6 meses a partir de la fecha de entrega del repuesto. Para las piezas de repuesto y accesorios referirse exclusivamente al catálogo general Moretti.

18. CLÁUSULAS EXONERATIVAS

Salvo indicación expresada en esta garantía y dentro de los límites de la ley, Moretti no ofrece ninguna declaración, garantía o condición, expresa o implícita, incluyendo todas las declaraciones, garantías o condiciones de comerciabilidad, adecuación para un propósito particular, no infracción y no interferencia. Moretti no garantiza que el uso del producto Moretti será sin interrupción o sin errores. La duración de cualquier garantía implícita que se puede imponer por ley se limita al período de garantía, dentro de los límites de la ley. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes relacionados con productos para consumidores finales. En esos estados o países, algunas exclusiones o limitaciones de esta garantía pueden no aplicarse al usuario.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

Producto _____

Fecha de compra _____

Distribuidor _____

Calle _____ Localidad _____

Vendido a _____

Calle _____ Localidad _____

ESPAÑOL



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriaga (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

ESPAÑOL

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a clean, solid white color.

NOTAS

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Caviglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com