

# ACCESSORI PER LETTINI

Accessori destinati ai Letti Chinesport per visita, trattamenti, terapia, manipolazione

## MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>AC0016</b><br/>KIT BARRE PER CINGHIE</p>          |  <p><b>AC0017</b><br/>BATTERIA AUSILIARIA</p>         |  <p><b>AC0018</b><br/>BRACCIOLI LATERALI</p>       |  <p><b>AC0021</b><br/>ASTA TESTATA</p>      |
|  <p><b>AC0023</b><br/>CUSCINO CERVICALE</p>            |  <p><b>AC0026</b><br/>DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO</p> |  <p><b>AC0030</b><br/>RIVESTIMENTO REGGICOSCE</p> |  <p><b>AC0031</b><br/>PORTA LENZUOLINO</p> |
|  <p><b>AC0032</b><br/>PORTA LENZUOLINO RIBLATABILE</p> |  <p><b>AC0041</b><br/>SUPPORTO PULSANTIERA</p>      |  <p><b>AC0042</b><br/>SUPPORTO TESTA TRONCO</p>  |                                                                                                                                |

## SOMMARIO

|                                                                                |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1. INFORMAZIONI GENERALI</b>                                                | <b>2</b>                                     |
| COSTRUTTORE                                                                    | 2                                            |
| DESTINAZIONE D'USO E DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA                          | 2                                            |
| IMMAGAZZINAGGIO                                                                | 2                                            |
| SIMBOLI                                                                        | 2                                            |
| <b>2. LIMITAZIONI D'USO E AVVERTENZE PARTICOLARI</b>                           | <b>3</b>                                     |
| <b>3. UTILIZZO</b>                                                             | <b>3</b>                                     |
| MESSA IN FUNZIONE E REGOLAZIONI                                                | 3                                            |
| <b>4. MANUTENZIONE</b>                                                         | <b>5</b>                                     |
| MANUTENZIONE ORDINARIA                                                         | 5                                            |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                                     | 5                                            |
| <b>5. RICERCA GUASTI</b>                                                       | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <b>6. PULIZIA</b>                                                              | <b>6</b>                                     |
| <b>7. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ</b>                                          | <b>6</b>                                     |
| DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ                                                    | 6                                            |
| <b>8. GARANZIA</b>                                                             | <b>6</b>                                     |
| <b>9. SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE -ELETTRONICHE E DEGLI IMBALLI</b> | <b>6</b>                                     |

## 1. INFORMAZIONI GENERALI

### COSTRUTTORE

CHINESPORT S.P.A , Via Croazia,2-33100 Udine, Italia-tel. +39 0432621621-fax+39 0432621620 – sito internet:www.chinesport.it

### DESTINAZIONE D'USO E DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA

Gli Accessori qui presenti sono allestibili sui letti Chinesport con modalità di abbinamento come previsto su relativo catalogo.

### IMMAGAZZINAGGIO

In caso di immagazzinamento si devono rispettare le seguenti condizioni:

1. Ambientali: umidità relativa 10% / 90 % - temperatura -10°C / +50°C

### SIMBOLI

Nel presente manuale, e sul libretto istruzioni del letto su cui è destinato l'accessorio, i simboli sono utilizzati per attirare l'attenzione dell'utente su avvisi di sicurezza importanti e informazioni . Osservare tutti i messaggi di avvertenza, attenzione e pericolo.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AVVERTENZA</b><br>I messaggi di avvertenza segnalano all'utente/utilizzatore il rischio di infortuni o pericoli qualora, durante operazioni di funzionamento o di manutenzione, non vengano osservate attentamente le procedure e le condizioni riportate. |
|  | <b>PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE</b><br>Questo simbolo segnala all'utente il rischio di scosse elettriche qualora, durante operazioni di funzionamento o di manutenzione, non vengano osservate attentamente le procedure e le condizioni riportate.          |
|  | <b>ATTENZIONE</b><br>Un simbolo di Attenzione è usato per avvisare l'utente di una procedura di funzionamento o manutenzione, prassi o condizione che, se non strettamente osservata, potrebbe danneggiare l'apparecchiatura.                                 |

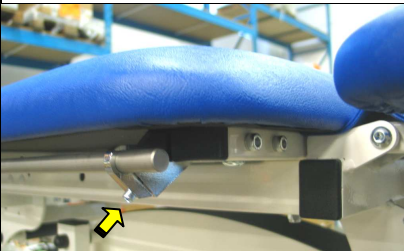
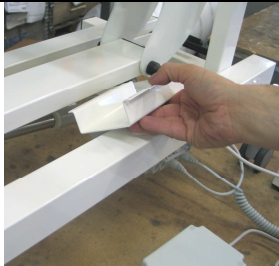
## 2. LIMITAZIONI D'USO E AVVERTENZE PARTICOLARI

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>L'accessorio non deve essere utilizzato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Installato su apparecchiature diverse dagli specifici lettini Chinesport</li> <li>▪ In configurazione impropria o quando ci sia il sospetto che possa arrecare danno al paziente</li> <li>▪ Con un carico di sicurezza superiore a quanto dichiarato.</li> <li>▪ Con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale.</li> <li>▪ In atmosfera esplosiva a rischio d'incendio e/o corrosiva o esposta alle intemperie.</li> </ul> <p><b>Inoltre:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Non inserire parti del corpo nelle zone interessate dal movimento dei vari componenti e/o regolazioni.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Non collegarsi ad un impianto elettrico che non sia conforme alle Norme vigenti per lo stesso.</li> <li>▪ Non versare liquidi sull'apparecchiatura.</li> <li>▪ Staccare sempre la spina dalla rete prima di intervenire su qualsiasi parte elettrica o per lo spostamento dell'apparecchio.</li> <li>▪ Non danneggiare i cavi elettrici: evitare schiacciamenti; non staccare le varie connessioni tirando direttamente il cavo, etc.</li> <li>▪ Controllare frequentemente le condizioni dei cavi elettrici ed in caso di dubbi richiedere la sostituzione</li> </ul>                                                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le gomme espanse e le parti plastiche dell'apparecchiatura possono incendiarsi se messe in contatto con fiamme libere.</li> <li>▪ Prodotti detergenti corrosivi e/o abrasivi possono danneggiare il rivestimento delle imbottiture.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

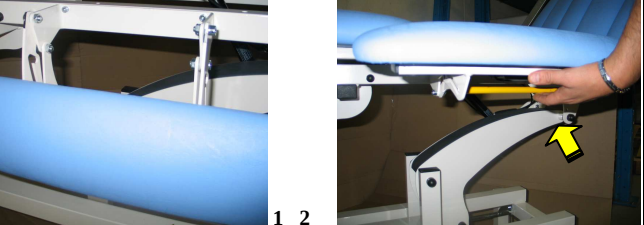
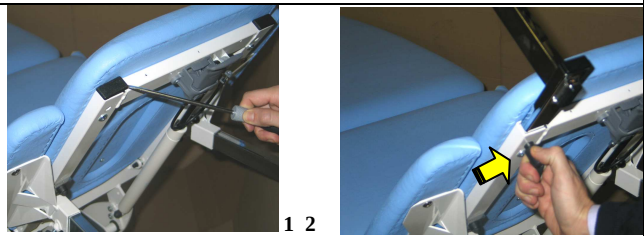
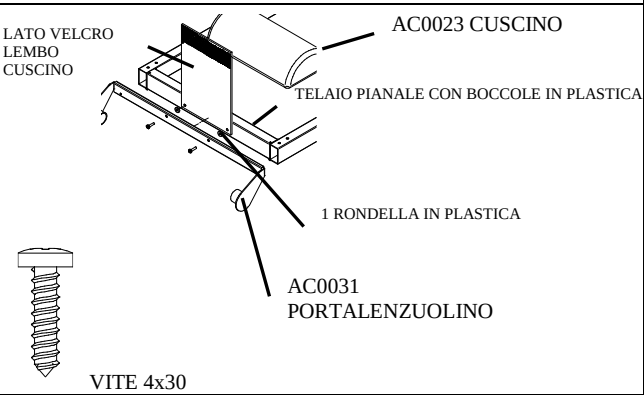
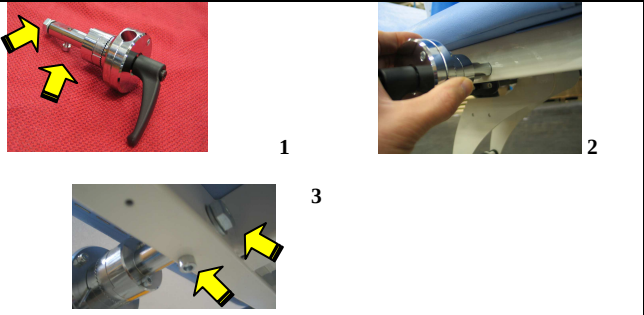
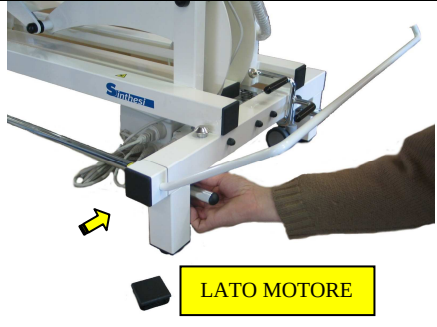
## 3. UTILIZZO

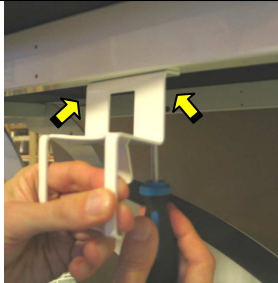
### MESSA IN FUNZIONE E REGOLAZIONI

|                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p style="text-align: center;"> <b>AVVERTENZA</b> </p> |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• FAR SEMPRE RIFERIMENTO AL LIBRETTO ISTRUZIONE DEL LETTO SU CUI È DESTINATO L'ACCESSORIO SCELTO</li> </ul>                                                                       |  |

| Accessorio/Note                                                                                                        | MESSA IN FUNZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SCHEMI E REGOLAZIONI                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>AC0016</div> <div>KIT BARRE PER CINGHIE</div> <div>Nota:<br/>Installabile solo su lettini LH pediera intera</div> | <ul style="list-style-type: none"><li>A seconda delle necessità le staffe possono essere fissate sul I° e III° traverso o sul II° e IV traverso;</li><li>Fissare con decisione le staffe mediante viti e dadi in dotazione su ambo i lati del letto;</li><li>Inserire le barre sulle staffe e bloccare in posizione con apposita chiavetta .</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |
| <div>AC0017</div> <div>BATTERIA AUSILIARIA</div> <div>Nota:<br/>Non installabile su lettini LB e Star.</div>           | <ul style="list-style-type: none"><li>Portare il lettino alla massima altezza (foto1) e scollegare il cavo di alimentazione ;</li><li>Posizionare la staffa in lamiera sotto al tubolare di collegamento leve; la posizione esatta è garantita dall'innesto del pernetto staffa nel foro del tubolare;</li><li>Posizionare sopra la batteria facendo passare il cavo nel mezzo della leva; fissare la batteria con le viti in dotazione (foto2);</li><li>Collegare il cavo della batteria nell'apposita presa della centralina elettrica del lettino ;</li><li>Collegare il cavo di alimentazione del lettino alla rete elettrica.</li></ul> |   <div>1    2</div> |
|                                                                                                                        | <div> <b>AVVERTENZA</b> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>La batteria sopprime a brevi assenze di corrente elettrica nella rete.</li><li>La batteria si carica automaticamente solo se il lettino è collegato alla rete elettrica.</li><li>Evitare di scaricare totalmente le batterie per non danneggiarle irrimediabilmente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |

| Scheda tecnica                                                |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Alimentazione                                                 | 1.2 Ah 24V  |
| N° max cicli di sollevamento<br>(In condizioni di efficienza) | 10          |
| Dimensioni                                                    | 137x105x68h |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>AC0018</b><br/>BRACCIOLI LATERALI</p> <p>Nota:<br/>Installabili solo su lettini LH</p>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posizionare la staffa del singolo bracciolo sul fianco del telaio letto, in riferimento dei fori dedicati (foto1);</li> <li>• inserire viti in dotazione e fissare con dadi; bloccare con decisione.</li> </ul> <p><b>AVVERTENZA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I braccioli laterali non hanno funzione di seduta, non concentrare carichi.</li> <li>• Non sganciare il bracciolo con il paziente in carico.</li> </ul> |  <p>1 2</p> <p>Per posizionare il bracciolo in assetto di utilizzo afferrare lo stesso e ruotarlo fino a garantire l'aggancio sicuro del dispositivo.<br/>Per abbattere il bracciolo sollevare la maniglia gialla posta sotto al piano ed accompagnare fino in battuta (foto2).</p> |
| <p><b>AC0021</b><br/>ASTA TESTATA</p> <p>Nota:<br/>Installabile solo su lettini LH</p>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Togliere dal telaio della testata il tappo chiusura (foto1);</li> <li>• applicare l'asta inserendo il tronchetto della base nella sede liberata dal tappo;</li> <li>• bloccare l'asta al telaio testata avvitando la levetta in dotazione (foto2);</li> </ul>                                                                                                                                                                             |  <p>1 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>AC0031</b><br/>PORTA LENZUOLINO</p> <p><b>AC0023</b><br/>CUSCINO CERVICALE</p>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguire schema a fianco individuando i due fori di predisposizione sui telai del lettino.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>AC0026</b><br/>DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO</p> <p>Nota:<br/>predisposizione solo su letti Test</p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Togliere le due viti avvitate provvisoriamente sul dispositivo (foto1);</li> <li>• Posizionare ed inserire il blocco nella relativa sede del telaio fino in battuta (foto2);</li> <li>• Riavvitare le viti; bloccare entrambi le viti con decisione (foto3);</li> </ul>                                                                                                                                                                   |  <p>1 2 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>AC0030</b><br/>RIVESTIMENTO REGGICOSCE</p>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incappucciare il supporto rigido con il rivestimento rivolto come indicato nella foto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>AC0032</b><br/>PORTA LENZUOLINO RIBLATABILE</p> <p>Nota:<br/>Non installabile su lettini LE, LB e Star.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Togliere il tappo dal traverso della base sul lato del motore elettrico;</li> <li>• Inserire portalenzuolino nel tubolare;</li> <li>• Bloccare avvitando la vite nel foro sotto il traverso;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |  <p>LATO MOTORE</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>AC0041</b><br/>SUPPORTO<br/>PULSANTIERA</p> <p>Nota:<br/>Non installabile su<br/>lettini LH e Star</p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posizionare il supporto in riferimento ai fori presenti sotto il telaio delle imbottiture.</li> <li>• Bloccare avvitando le viti autofilettanti in dotazione</li> </ul>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>AC0042</b><br/>SUPPORTO<br/>TESTA TRONCO</p> <p>Nota:<br/>predisposizione<br/>solo sul lettini<br/>Bobath RIC</p> | <p><b>SUPPORTI LATERALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inserire le staffe nelle sedi asole sul retro del telaio testata.</li> </ul> <p><b>SUPPORTO TESTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inserire il supporto a "U" nella coppia sedi rettangolari del telaio testata.</li> </ul> |  <p>Per regolare i due supporti laterali longitudinalmente agire sulla leva ad eccentrico posta sul retro;<br/>Per regolare i due supporti laterali nel senso della larghezza agire sulla leva ad eccentrico posto a fianco dell' imbottito laterale;<br/>Per regolare il supporto testa longitudinalmente allentare il manettino posto sul retro, posizionare e ribloccare;<br/>Per orientare il supporto testa agire sulle leve ad eccentrico che consentono le specifiche regolazioni in inclinazione ed antero-posteriore;</p> |

#### 4. MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione possono essere eseguiti solamente da personale adeguatamente qualificato e informato sul modello, l'uso e la manutenzione dell'apparecchiatura.

Verificare le condizioni di sicurezza dell'apparecchio dopo ogni situazione di "trattamento rude" (es.: caduta, versamento di liquidi, ecc.) ed ogni qualvolta si abbiano dei dubbi sullo stato di sicurezza dell'apparecchio.

#### MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi di manutenzione ordinaria vanno eseguiti almeno una volta ogni 6 mesi seguendo le indicazioni di tabella:

|  <b>AVVERTENZA</b>                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• IN EVIDENZA DI PERICOLO PER LA SICUREZZA L'APPARECCHIATURA DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE DISATTIVATA SENZA POSSIBILITÀ DI UTILIZZO FINCHÉ IL PERICOLO NON SIA STATO ELIMINATO.</li> <li>• ANNOTARE NELL'APPOSITO MODULO, PRESENTE SUL LIBRETTO ISTRUZIONE DEL LETTO SU CUI È DESTINATO L'ACCESSORIO, OGNI INTERVENTO IMPORTANTE PER LA SICUREZZA</li> </ul> |  |

| FREQUENZA  | OPERAZIONE                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| semestrale | Pulizia generale                                                                                                                              |
|            | Ispezione visiva e funzionale dell'accessorio                                                                                                 |
|            | Telaio e parti meccaniche: verifica allentamento viti e bulloni; giochi delle boccole e perni; assenza di lesioni e deformazioni strutturali. |
|            | Verificare che i connettori elettrici siano inseriti completamente                                                                            |
|            | Verificare integrità dell'isolante dei cavi elettrici                                                                                         |

#### MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per tutti gli interventi diversi da quelli ordinari contattare il Centro Assistenza Chinesport.

**EMAIL DIRETTO PER L'ASSISTENZA TECNICA**  
**assistenza@chinesport.it**

In alternativa è possibile comunicare a mezzo fax n° (+39) 0432-621698 o telefono al  
 (+39) 0432 621699

**CHINESPORT S.P.A.** MADE IN ITALY  
 Via Croazia, 2-33100 Udine-TEL. +39 0432 621621- WWW.CHINESPORT.IT

Codice: 01085  
 Articolo: **ANALIZZATORE POSTURALE LUX**  
 Apparecchio per l'analisi della postura costruito da un filo a piombo ed uno specchio di riferimento.

PORTA LUX 35

**Fac-simile**

**SN09.00000000000018**





**Attenzione:**

- **Prima di contattare l'assistenza rilevare il n° del DDT/fattura. La sua identificazione riduce i tempi e migliora la qualità dell'intervento.**
- **L'apparecchiatura che necessita di riparazione in sede Chinesport deve esporre sull'imballo di spedizione il "NUMERO DI AUTORIZZAZIONE" da richiedere all'Assistenza Tecnica, la sua identificazione riduce i tempi e migliora la qualità dell'intervento.**

## 5. PULIZIA

Le operazioni di pulizia delle apparecchiature elettriche devono essere svolte scollegati dalla rete elettrica.

Per la pulizia utilizzare un panno inumidito in acqua e detergente neutro. Le eventuali macchie sui rivestimenti delle imbottiture vanno rimosse tempestivamente con alcol etilico ( liquido incolore) diluito in acqua al 20% , risciacquare bene.

**AVVERTENZA**

- UTILIZZARE IN CONDIZIONE DI IGIENE DISINFETTANDO SISTEMATICAMENTE LA SIMILPELLE
- PRODOTTI AGGRESSIVI POSSONO DANNEGGIARE LE SUPERFICI.

## 6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il singolo accessorio deve essere utilizzato a corredo di un dispositivo medico (lettino). Per cui fa fede la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ del dispositivo su cui viene applicato.

## 7. GARANZIA

### CONDIZIONI GENERALI ASSISTENZA POST-VENDITA ARTICOLI CHINESPORT

La durata della garanzia è di 36 mesi dalla data di consegna.

La garanzia non copre i materiali di consumo, le batterie ricaricabili, e in generale tutto il materiale soggetto ad usura, i guasti causati da urti, cadute, uso errato o improprio, eventi accidentali, danni causati dal trasporto. Qualora l'apparecchiatura risulti manomessa, la garanzia decade automaticamente.

La riparazione delle apparecchiature sarà eseguita in relazione al guasto dichiarato.

Il preventivo dovrà essere richiesto espressamente.

L'eventuale pagamento si intende in contrassegno, salvo accordi particolari.

Per ogni controversia l'unico foro competente è quello di UDINE.

### RIPARAZIONI IN GARANZIA

Le riparazioni in garanzia dovranno essere richieste espressamente.

Le riparazioni in garanzia si intendono presso il nostro laboratorio , previa autorizzazione e con rilascio del numero di rientro .

Per i prodotti inviati con l'imballo originale, la spedizione di ritorno sarà effettuata in porto franco.

Per la riparazione in garanzia occorre un documento fiscale dove la data d'acquisto rientri nei tempi di garanzia, (bolla di vendita, fattura d'acquisto, scontrino fiscale).

Qualora, al momento del controllo, il prodotto risulti perfettamente funzionante vengono comunque addebitate al cliente le spese di ricerca guasto.

### RIPARAZIONI FUORI GARANZIA

Per le riparazioni fuori garanzia effettuate nei nostri laboratori previa autorizzazione, le spese di trasporto sono a carico del cliente.

Limitatamente alle parti sostituite nell'intervento effettuato, la garanzia sulla riparazione è di 12 mesi dal ritiro della macchina

Qualora, al momento del controllo, il prodotto risulti perfettamente funzionante vengono comunque addebitate al cliente le spese di ricerca guasto.

### RIPARAZIONI A DOMICILIO

In caso di riparazione presso il cliente, occorre richiesta scritta ove siano indicate le generalità complete del richiedente, il tipo di macchina ed il guasto.

Il costo chilometrico del trasferimento del tecnico è da concordare in relazione all'urgenza del cliente.

Nel caso in cui la macchina in oggetto dell'intervento sia in garanzia saranno addebitati solamente i costi del trasferimento.

Il tempo viene conteggiato dalla partenza del tecnico dal nostro laboratorio fino al suo rientro, l'ora di rientro sarà stimata sulla base del tempo impiegato all'andata.

### VENDITA PARTI DI RICAMBIO E CONSUMABILI

Gli ordini dovranno pervenire per scritto specificando il cliente, l'articolo , la modalità di spedizione, nonché i dati fiscali esatti del cliente.

I tempi di evasione dell'ordine potranno variare in dipendenza della disponibilità del materiale.

Non si accettano resi per le parti di ricambio

Il pagamento sarà contrassegno, salvo accordi particolari.

## 8. SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE -ELETTRONICHE E DEGLI IMBALLI

Il simbolo riportato sull'etichetta dell'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata".

Pertanto, l'utente dovrà conferire il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997.

