

CODICE 34070**MANUALE UTENTE - CARROZZINA BARELLA****SIMBOLI:**

Simbolo	Definizione del simbolo
	Leggere attentamente le istruzioni per l'uso
	Conservare lontano da luce solare
	Conservare in luogo asciutto
	Prodotto conforme alla Direttiva Europea 93/42
	Numero di lotto
	Fabbricante
	Codice prodotto

I. Caratteristiche tecniche:

1. Dimensioni prodotto (L x W x H):
Posizione alta: 198 x 55 x 86 cm
Posizione bassa: 198 x 55 x 25 cm
2. Dimensioni imballaggio (1 pz): 198 x 60 x 25 cm
3. Peso Netto: 34 kg Peso Lordo: 40 kg
4. Angolo massimo del Bach: 85°
5. Capacità di carico: meno di 159 kg

II. Modalità di utilizzo:

Questa barella con carrello può essere convertita in una sedia; l'altezza può essere regolata a seconda delle necessità. La barella è estremamente adatta al trasferimento dei pazienti in posti ristretti, quali l'ascensore di un ospedale, un'ambulanza, una strada urbana, ecc. È fatta con materiali in acciaio inossidabile; è antiruggine, utilizzabile in sicurezza e facile da sterilizzare e pulire.

III. Applicazioni:

Questo prodotto, clinicamente testato, è utilizzabile per il trasporto di feriti e pazienti in ambulanze, ospedali, campi di battaglia e palestre; può inoltre essere utilizzato in operazioni generali.

IV. Attenzione:

1. Per ragioni di sicurezza, assicurarsi, quando si trasportano pazienti con questa barella, di bloccare ermeticamente il dispositivo di fissaggio paraurti e di allacciare le cinture di sicurezza.
2. Nelle operazioni generali, fare attenzione a non lacerare la superficie della barella.

V. Manutenzione:

1. Pulite regolarmente il prodotto (incl. sterilizzazione).
2. Verificate spesso la presenza di parti allentate.

VI. Conservazione e trasporto:

1. Conservare il prodotto in un luogo al riparo da umidità e corrosione.
 2. Il prodotto può essere trasportato con normali mezzi di trasporto.
 3. È vietato capovolgere il prodotto durante il trasporto o nel luogo di deposito. Sovrapporre la merce come da istruzioni riportate sull'imballo.
-

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.

Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione.

La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA.

Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura.

La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia.

La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio.

La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulti asportato, cancellato o alterato.

I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.



 GIMA S.p.A. – Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI)
Made in P.R.C.

Rev. 0.10.14