

Mascherina facciale monouso con cuscinetto d'aria

Leggere le istruzioni seguenti prima dell'uso

Modello:

- REF 57700 / CM65304 MASCHERINA MONOUSO N.0 - neonato
- REF 57701 / CM65314 MASCHERINA MONOUSO N.1 - infante
- REF 57702 / CM65324 MASCHERINA MONOUSO N.2 - bambino
- REF 57703 / CM65334 MASCHERINA MONOUSO N.3 - bambino/large
- REF 57704 / CM65344 MASCHERINA MONOUSO N.4 - adulto
- REF 57705 / CM65354 MASCHERINA MONOUSO N.5 - adulto/large
- REF 57706 / CM65364 MASCHERINA MONOUSO N.6 - adulto/extra large

Avvertenze:

1. La legge impone la vendita del presente dispositivo esclusivamente sotto prescrizione medica.
2. Conservare il dispositivo in un luogo asciutto, al riparo da calore e luce.
3. Il paziente deve essere costantemente monitorato durante l'utilizzo del presente dispositivo.
4. Utilizzare esclusivamente su un solo paziente. L'eventuale riutilizzo può causare infezioni crociate. Non mettere a bagno, non risciacquare, non lavare e non sterilizzare il dispositivo. Questi procedimenti potrebbero lasciare pericolosi residui sulla maschera.
5. Distruggere il dispositivo dopo l'avvenuto utilizzo (smaltire secondo regolamentazioni in materia in vigore).
6. Contiene ftalati che potrebbero causare danni all'apparato riproduttivo per le donne in gravidanza e danni allo sviluppo ai bambini. Non ingerire il dispositivo o parti di esso.

Istruzioni per l'uso:

1. Prima dell'uso, controllare che il flusso d'aria passi in modo regolare.
2. Collegare al circuito respiratorio o al dispositivo di rianimazione tramite gli adattatori appropriati.
3. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano compatibili e che siano ben saldi.
4. Tenere fermo il dispositivo con la mano o assicurarlo tramite adeguato supporto a fascia per la testa.

LOT



CE 0434



Fabbricante:

Besmed Health Business Corp. Taipei, Taiwan
No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Rd. Wu-Ku District, New Taipei City, Taiwan 24888
Made in P.R.C.

EC REP

Mdi Europa GmbH, Langenhagener Str. 71, 30855 Hannover-Langenhagen, Germany