



COME IGIENIZZARE LA TURBINA RIUTILIZZABILE MIR

1. NON METTERE MAI IL SENSORE DI FLUSSO SOTTO L'ACQUA CORRENTE
2. UTILIZZARE ANCHE L'ACQUA DEL RUBINETTO MA SEMPRE FREDDA
3. NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE ACQUA CALDA
4. ESEGUIRE LA PROCEDURA CON IL METODO AD IMMERSIONE.

Per ottenere una pulizia accurata e completa del sensore occorre utilizzare una soluzione disinfettante non alcolica che sia compatibile con il materiale "Policarbonato": tipo simil "Amuchina" il quale principio attivo è Cloro Attivo da Sodio. Soluzioni a base alcolica possono opacizzare e danneggiare irreparabilmente il sensore riutilizzabile.

COME FARE:

- ✚ Estrarre la turbina dallo spirometro ed effettuare un controllo visivo. Assicurarsi che non ci siano corpi estranei all'interno come: peli, capelli, o oggetti simili che possano danneggiare o rallentare l'equipaggio mobile della turbina, compromettendo l'accuratezza delle misure.
- ✚ Preparare la soluzione di acqua fredda e igienizzante al 10% (massimo 15%) di purezza.
- ✚ Immergere la turbina nella soluzione fredda, agitarla per rimuovere le impurità, ricordandosi di lasciarla a bagno per non più di 15/20 minuti.
- ✚ Immergere poi il sensore in acqua pura (sempre fredda) per circa 1 minuto.
- ✚ Posizionare la turbina su una superficie pulita in posizione eretta e lasciarla asciugare.
- ✚ Una volta asciutta si potrà procedere con un nuovo test.