


GONIOMETRO 14" BRACCIA EXTRA LUNGHE 180°

Manuale d'uso

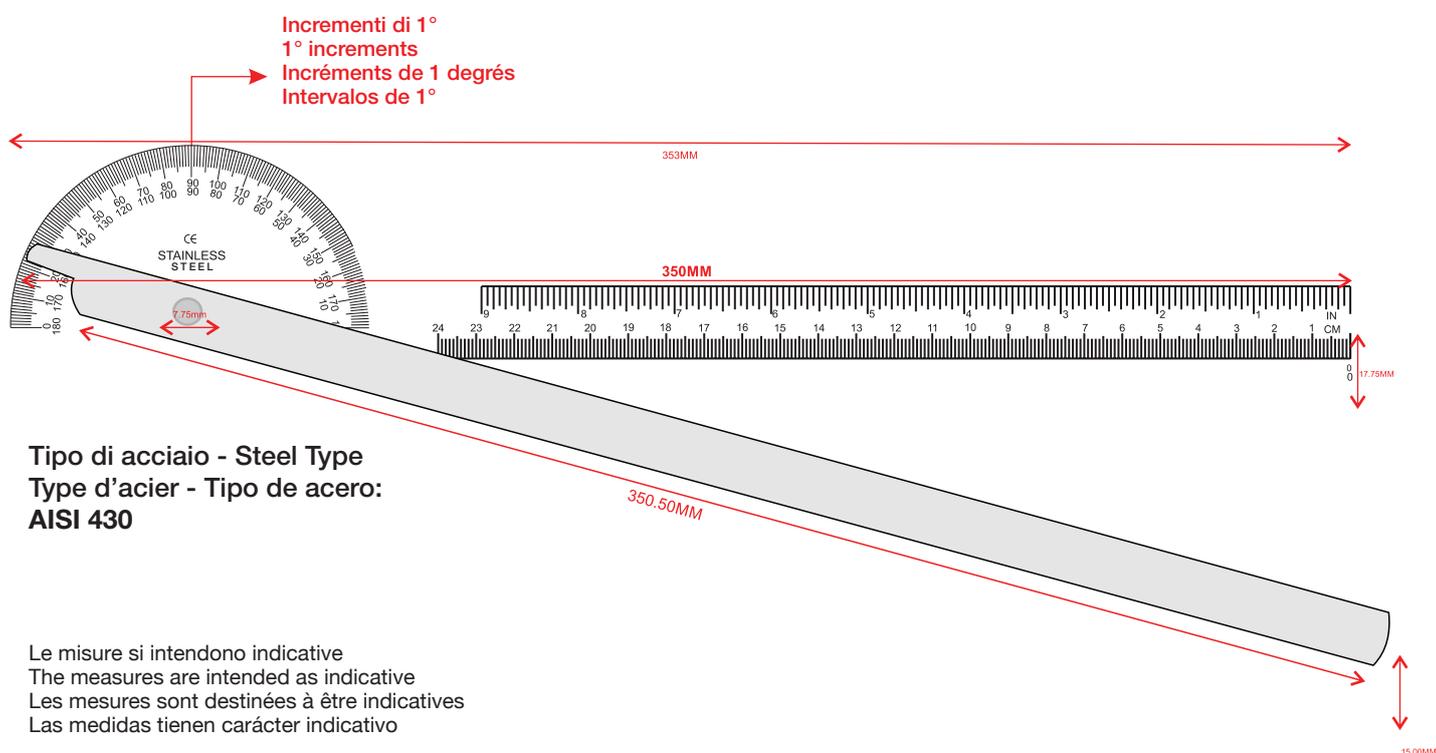

Tipo di acciaio - Steel Type
Type d'acier - Tipo de acero:
AISI 430

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

REF 24904

 Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) - Italy
Made in Pakistan



ISTRUZIONI PER L'USO

Il goniometro misura il campo di movimento (ROM) di varie articolazioni. La testa da 180° è marcata con incrementi di 1°.

La tensione tra le braccia è controllata dalla manopola del pollice. Due braccia extra lunghe delle scale per misurare tutte le articolazioni.

INDICAZIONE PER L'USO E PRECAUZIONI

I dispositivi sono destinati all'uso professionale da parte di operatori qualificati con le necessarie competenze. L'uso del prodotto comporta il contatto diretto con la cute del paziente; utilizzare sempre guanti protettivi, non usare su cute lesa, maneggiare con cura al fine di evitare abrasioni accidentali.

Pulire e sterilizzare prima di ogni utilizzo; utilizzare soluzione disinfettante non aggressiva a ph neutro (PH7), non utilizzare soluzioni contenenti ioni di cloruro o ad alto contenuto di alcol.

Prodotto destinato a fornire misurazioni indicative di facile lettura. Dispositivo Medico di classe I.